

Instrukcja Obsługi:

Krok 1:

Skóra w miejscu stosowania powinna być nawilżona. Ubierz opaskę przewodzącą a następnie przymocuj elektrodę żelową - ok. 4 cm od opaski.

Krok 2:

Podpnij przewody elektrostymulatora do opaski i elektrody.

Krok 3:

Podłącz przewody do urządzenia a następnie wybierz i uruchom odpowiedni program.

Ostrzeżenia:

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z pełną instrukcją użytkowania dołączoną do elektrostymulatora, w szczególności z ostrzeżeniami i przeciwwskazaniami do stosowania.

Czyszczenie:

Należy prać w rękach, w letniej wodzie, z dodatkiem mydła. Nie wyżymaj. Nie susz w suszarce bębnowej. Susz w pozycji rozwieszanej.