

Instrukcja obsługi

Ławka wgłębna z oparciem do wanny

Kod produktu KING-BSB-20



1. Wykonanie

Ławka wgłębna z oparciem do wanny składa się z siedziska z oparciem oraz wyprofilowanej aluminiowej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi, które uniemożliwiają przesuwanie się ławki na wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo oraz stabilność podczas kąpieli. Regulowana rama pozwala na dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku aluminiowej ramy umożliwia jej długotrwałe użytkowanie. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

Zestaw zawiera: siedzisko PCV, oparcie PCV, elementy ramy bocznej – 4 szt. , nasadki antypoślizgowe – 4 szt., elementy ramy oparcia – 2 szt., śruby montażowe dł. 30mm – 4 szt. , śruby montażowe dł. 35mm – 4 szt., śruby montażowe dł. 55mm – 4 szt.




2. Zastosowanie


Ławka wgłębna z oparciem do wanny jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Model ten może być również używany w wersji bez oparcia.

3. Montaż


Krok 1. W pierwszej kolejności należy zamontować nasadki antypoślizgowe na aluminiowych elementach ramy.

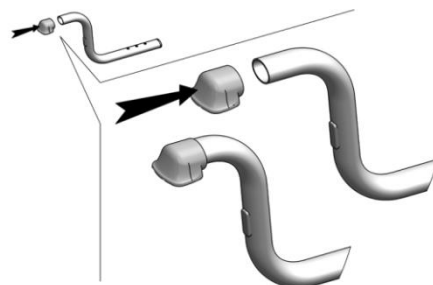

Krok 2. Następnie w otworach montażowych ławki należy zamontować elementy ramy bocznej kolejno z jednej i drugiej strony siedziska.

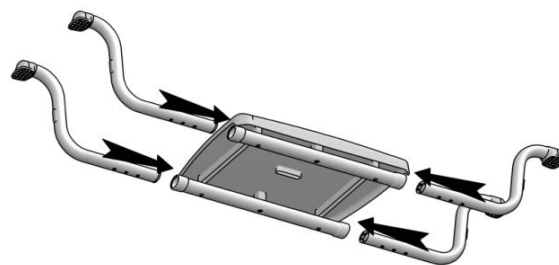


Krok 3. Szerokość ramy ławki należy dopasować poprzez wybranie odpowiedniego otworu montażowego na bocznych elementach ramy.

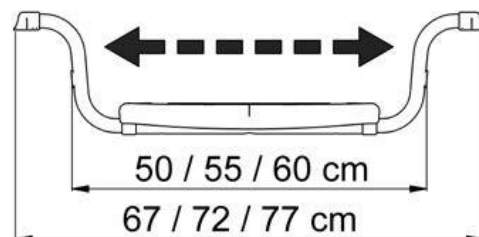


Aby skorzystać z ławki w wersji bez oparcia, należy za pomocą czterech śrub montażowych o dł. 35mm przykręcić boczne elementy ramy do siedziska przy pomocy klucza imbusowego (5mm) i zakończyć montaż na tym kroku. Jeżeli chcemy natomiast skorzystać z wersji z oparciem, należy przejść do kolejnego kroku nr 4 (w tym przypadku śruby montażowe o dł. 35mm pozostaną niewykorzystane).

Krok 4. Następnie przykładając elementy ramy oparcia do ramy siedziska, należy przykręcić je za pomocą czterech dłuższych śrub montażowych o dł. 55mm (przy pomocy klucza imbusowego 5mm). Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zamontowanie elementów ramy oparcia – powinny znajdować się z tyłu siedziska – tylna część siedziska jest węższa niż część przednia

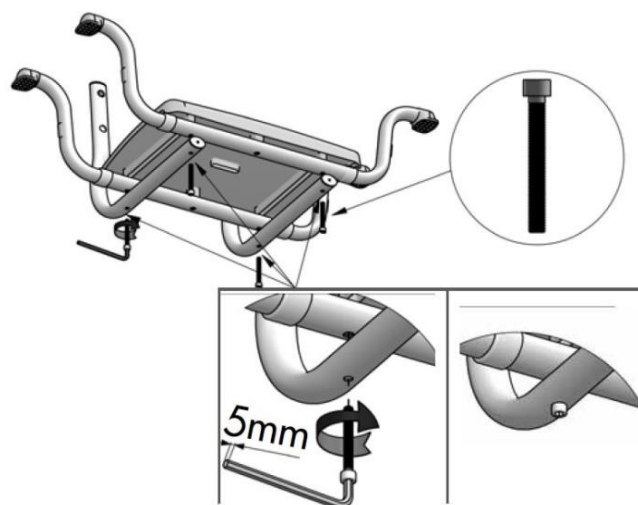

Krok 5. Następnie do elementów ramy oparcia należy przykręcić oparcie PCV za pomocą czterech krótszych śrub montażowych o dł. 30mm (przy pomocy klucza imbusowego 5mm).

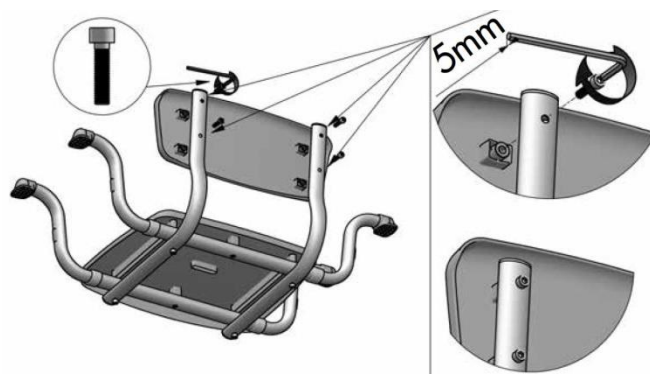

Krok 6. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane są poprawnie oraz czy szerokość jest dopasowana i ustawiona prawidłowo na wannie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	67-77 cm
Szerokość wewnętrzna	50-60 cm
Głębokość	35 cm
Wymiary siedziska	37 x 30 cm
Waga ławki z oparciem	1,80 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wytrzeć do sucha. Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych). Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: stan śrub montażowych, stan rurek.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



LM GLOBAL Design Limited

Suite 74, Guinness Enterprise
Centre, Taylor's Lane,
D8 Dublin, Ireland

Dystrybutor:

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021