

Prezerwatywy Cienkie PASANTE SENSITIVE FEEL 72 SZT Realne Odczucia

Prezerwatywy PASANTE SENSITIVE FEEL charakteryzują się ergonomicznym kształtem, idealnie dopasowującym się do anatomicznych kształtów członka, co gwarantuje wygodne założenie kondoma.

Posiadają ciekłą strukturę, mając na celu zwiększenie przyjemności dla obu partnerów.

Wyprodukowane z najwyższej jakości surowców i z zastosowaniem rygorystycznej technologii produkcji, te prezerwatywy są niezwykle bezpieczne zarówno podczas stosunku waginalnego, jak i analnego.

Dodatkowo, są nasączone środkiem nawilżającym. Nie zawierają substancji plemnikobójczych.

★ UWAGA

Przedmiotem aukcji jest oryginalnie zapakowana paczka 72 sztuk Pasante SENSITIVE FEEL widoczna na zdjęciu.

★ SPECYFIKACJA

- ▶ Długość: 190 mm
- ▶ Szerokość: 52 mm
- ▶ Grubość: 53 mikronów
- ▶ Materiał: Naturalna guma lateksowa
- ▶ Struktura: Prezerwatywy gładkie
- ▶ Kształt: Easy-On, łatwe do nałożenia
- ▶ Kolor: Przezroczyste

★ Prezerwatywy posiadają instrukcje w języku polskim (dodatkowo dołączona do aukcji w formie PDF)

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.
2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo - prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.

4. Usuń prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzuć zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie spłukuj w toalecie.

Prezerwatywy posiadają certyfikat jakości CE oraz ISO.

Każda sztuka jest sprawdzana oraz testowana pod kątem jakości.

Data ważności: 1-4 lata.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Producent: Pasante Ltd. (UK) , Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. (MT), Podmiot prowadzący reklamę: Pasante Europe Ltd. (IE)