


Czepek z kompresem żelowym 360° na ból głowy - Instrukcja użytkowania

Przeznaczenie

Czepek z kompresem żelowym 360° przeznaczony jest do stosowania w celu złagodzenia dolegliwości bólowych głowy u dorosłych, takich jak np. migrena czy napięciowe bóle głowy. Czepek umożliwia stosowanie zarówno terapii ciepłem, jak i zimnem. Zaleca się stosowanie terapii ciepłem lub zimnem w kilku krótkich sesjach. Czepek posiada kompres żelowy 360°, który znajduje się zarówno z przodu, jak i z tyłu, dzięki czemu terapia zimnem lub ciepłem obejmuje całą głowę.

Czepek należy umieścić na głowie, nacięciem w kształcie litery V z przodu, w miejscu nosa. Czepek występuje w jednym, uniwersalnym rozmiarze. Dzięki elastycznemu materiałowi dopasowuje się do rozmiaru i kształtu głowy.

Budowa czepka

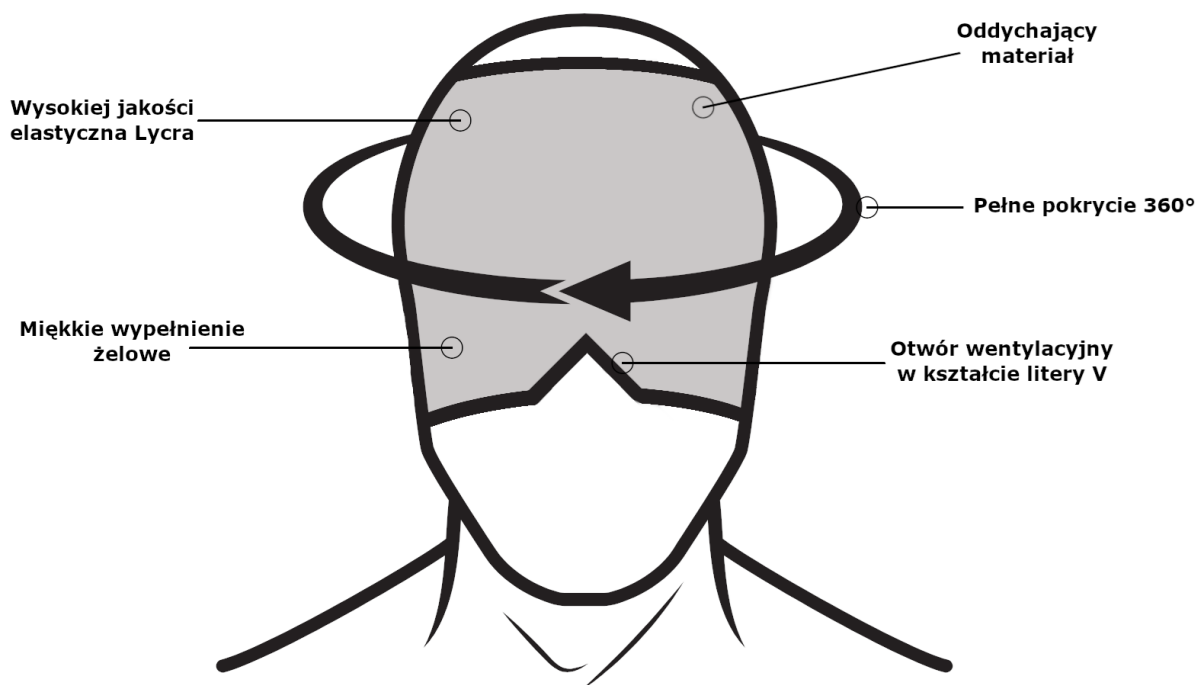

Terapia zimnem

1. Umieść czepek w foliowym woreczku, a następnie w zamrażalniku na 1-2 godziny.
2. Po zmrożeniu czepka, załóż go na głowę, upewniając się, że wycięcie na nos znajduje się z przodu.
3. Nie noś zmrożonego czepka przez zbyt długi czas, jeśli doświadczysz dyskomfortu, niezwłocznie zdejmij czepek.

Terapia ciepłem

1. Umieść czepek w mikrofalówce na okres od 10 sekund do maksymalnie 1 minuty, w zależności od mocy mikrofalówki.
2. Upewnij się, że czepek nie jest zbyt gorący przed założeniem.
3. Załóż na głowę, upewniając się, że upewniając się, że wycięcie na nos znajduje się z przodu.
4. Terapię ciepłem stosuj w kilku krótkich sesjach, nie noś nagrzanego czepka przez zbyt długi czas. Jeśli doświadczysz dyskomfortu, niezwłocznie zdejmij czepek.

Przechowywanie

Czepek przechowuje w temperaturze pokojowej, w miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czepek przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Czyszczenie

Czepka nie można prać. W razie zabrudzenia czepka, przetrzyj jego powierzchnię wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Informacje o bezpieczeństwie

Nie rozcinaj czepek, nie przycinaj go w żadnym miejscu. Jeśli dojdzie do uszkodzenia, rozerwania czepek, np. przez ostre narzędzie, niezwłocznie zaprzestań jego użytkowania.

Czepek nie jest ognioodporny ani wodoodporny, nie wystawiaj go na działanie płomieni i nie używaj w wodzie. Nie wystawiaj czepek na działanie substancji chemicznych. Czepek przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt jest zgodny z normami europejskimi oraz spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i trwałości, określone w obowiązujących przepisach.

Podmiot odpowiedzialny

dajstrone.pl II Marek Musiał

ul. Słodowa 9, 28-300 Jędrzejów

e-mail: idagoinfo@gmail.com