
Instrukcja obsługi – ładowarka do akumulatorów aparatów słuchowych (13 / 312 / 675)

1. Przygotowanie do ładowania

1. Podłącz kabel USB-C do ładowarki.
2. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilacza USB 5V DC (max 1–2 A) lub do portu USB komputera, powerbanku itp.
3. Upewnij się, że źródło zasilania jest stabilne i bezpieczne.

2. Wkładanie akumulatorów

1. Otwórz pokrywę ładowarki (jeśli występuje).
2. Włóż akumulatory do gniazd zgodnie z oznaczeniami biegunów „+” i „-”.
3. Akumulatory muszą być czyste, nieuszkodzone i przeznaczone do wielokrotnego ładowania (np. typu 13, 312 lub 675).

3. Proces ładowania

- Po prawidłowym włożeniu akumulatorów i podłączeniu zasilania:
 - **Czerwone światło LED** oznacza, że ładowanie trwa.
 - **Zielone światło LED** oznacza, że akumulator został w pełni naładowany.
- Standardowy czas ładowania: **5–8 godzin** (w zależności od pojemności ogniwa).
- Można ładować **1 lub 2 akumulatory jednocześnie**.

4. Sprawdzanie poziomu naładowania (funkcja testera)

1. Podłącz ładowarkę do zasilania.
 2. Włóż akumulator do pozycji testowej i przytrzymaj delikatnie palcami.
 3. Odczytaj wynik z kontrolki LED:
 - **1 zapalona dioda LED** – poziom naładowania ok. 20%
 - **2 zapalone diody LED** – poziom naładowania ok. 80%
-

5. Po zakończeniu ładowania

1. Odłącz ładowarkę od zasilania.
 2. Wyjmij naładowane akumulatory i przechowuj je w suchym, bezpiecznym miejscu.
 3. Nie pozostawiaj akumulatorów w ładowarce przez dłuższy czas po zakończeniu ładowania.
-

6. Uwagi dodatkowe

- Do ładowania używaj wyłącznie **akumulatorów wielokrotnego użytku** – nie wolno ładować baterii jednorazowych.
 - Zawsze zachowuj prawidłową biegunowość.
 - Nie używaj uszkodzonych akumulatorów.
 - Ładowarki nie należy rozbierać ani modyfikować.
 - Przechowuj urządzenie z dala od wilgoci, źródeł ciepła i dzieci.
-

Masz pytania dotyczące użytkowania? Skontaktuj się ze sprzedawcą lub sprawdź dodatkowe informacje na stronie producenta.