

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS

(model JH-338)

Ostrzeżenia:

1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce.
2. Podczas ładowania na ładowarce USB pali się czerwona lampka.
3. Po całkowitym naładowaniu się urządzenia, lampka zmieni kolor na zielony.
4. Pełne ładowanie baterii trwa około 7 godzin, jednak zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało przez około 12 godzin.
5. Pierwsze trzy cykle ładowania powin-

ny zakończyć się pełnym naładowaniem baterii (na ładowarce powinna zapalić się zielona lampka).

6. Po pełnym naładowaniu aparat powinien działać do 12 godzin (w zależności od ustawionej głośności przy ciągłym używaniu).
7. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.



Sposób użycia:

1. Pokręćło zmiany głośności ustaw na najniższą możliwą wartość.
Upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji „O”.
2. Przyłóż aparat do ucha i ostrożnie wsuń wkładkę do kanału słuchowego ucha.
3. Załącz urządzenie przesuwając wyłącznik w pozycję „N”.
4. Stopniowo zwiększaj głośność do uzyskania odpowiedniej jakości dźwięku, zmieniając pozycję pokręćła regulacji głośności.

Dane techniczne:

- Bateria akumulatorów: Ni-MH
- Maksymalna moc dźwięku: 125dB

- Sygnalizacja poziomu hałasu: 27dB
- Zakres częstotliwości: od 300 do 400HZ
- Wzmocnienie: 35dB
- Zniekształcenia: 6%
- Czas ładowania: ok. 7 godzin

Właściwości:

- czas działania do 12 godzin po całkowitym naładowaniu,
- odpowiednie dla lewego i prawego ucha,
- wyłącznik ON/OFF,
- dołączono pudełko z przyrządami do czyszczenia,
- dołączono ładowarkę USB,
- w opakowaniu znajduje się 6 szt. końcówek do ucha (różne wielkości).

Ostrzeżenia:

1. Przed założeniem aparatu na ucho aparat powinien być wyłączony, aby nie doszło do uszkodzenia słuchu.
2. Wybierając końcówkę do ucha o odpowiedniej wielkości (dobrze pasującą do ucha) uzyskujesz najlepszą jakość dźwięku i eliminujesz zewnętrzne zakłócenia.
3. Urządzenie należy zawsze wyłączać (wyłącznik w pozycji „O”), gdy jest nieużywane.

Uwagi:

- Urządzenia nie powinny używać osoby cierpiące na zapalenie ucha.
- Nie wolno używać urządzenia

przez dłuższy okres z głośnością ustawioną na najwyższy poziom, aby nie doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

- Gdy w trakcie posługiwania się aparatem pojawi się ból lub jakikolwiek dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Upewnij się, że urządzenie jest czyste i w dobrym stanie, a końcówka dobrze trzyma się w uchu, aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu.
- Należy unikać upadku urządzenia. Nie wolno używać go w wilgotnym otoczeniu ani w obecności wysokich temperatur.
- Nie wolno używać urządzenia w

otoczeniu zagrożonym wybuchem.

- Aparat należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje zagrożenie uszkodzenia ich słuchu.

Ładowanie baterii:

1. Przed rozpoczęciem ładowania należy zawsze wyłączać urządzenie ustawiając wyłącznik w pozycji „0”.



2. Włóż aparat do ładowarki USB

(tak, żeby słuchawka była skierowana w przeciwną stronę niż złącze USB – zob rys.).

3. Po umiejscowieniu aparatu w ładowarce podłącz wtyczkę USB do gniazda w komputerze lub do innego źródła zasilania.
4. Czerwona lampka sygnalizuje rozpoczęcie się ładowania.
5. Ładowanie można uznać za zakończone po zapaleniu się zielonej lampki. Akumulator jest wtedy naładowany, a urządzenie gotowe do użycia.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego

rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź

narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Aktualna wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.tvproducts.pl.