



STERYLIZATOR


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

DANE TECHNICZNE

- Panel sterowania:
 - Pokrętko temperatury
 - Pokrętko czasu
- Długość kabla: 120 cm
- Moc: 1000W
- Zakres temperatury: 0°C – 250°C
- Timer: 0 – 30min
- Pojemność 12l
- Częstotliwość: 50Hz

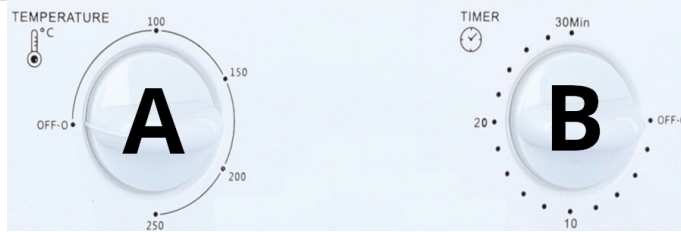

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przygotowanie przedmiotów do sterylizacji.
- Sprawdź, czy sterylizator jest podłączony do odpowiedniego źródła zasilania.
- Umieść produkt na stabilnej powierzchni.
- Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, ostrożnie otwórz drzwi i umieść narzędzia w komorze sterylizacyjnej.
- Upewnij się, że drzwi są dokładnie zamknięte po włożeniu narzędzi.
- Ustaw czas sterylizacji za pomocą pokrętki timera, zgodnie z zaleceniami producenta dla sterylizowanych przedmiotów.
- Uruchom cykl sterylizacji.
- Podgrzej narzędzia do zbiornika aluminiowego, a następnie załóż rękawice adyabatyczne i wyjmij wysterylizowane narzędzia.
- Odłącz sterylizator od źródła zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

KONSERWACJA PRODUKTÓW

- Produkt należy regularnie czyścić wacikiem nasączonym alkoholem, nigdy nie należy używać przemysłowych rozpuszczalników ani papieru ściernego.
- Produkt należy zawsze umieszczać w suchym miejscu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, należy zwrócić się do profesjonalistów w celu sprawdzenia i naprawy produktu

OSTRZEŻENIA

- Ryzyko oparzeń: Urządzenie i zawartość mogą być bardzo gorące. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą. Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas wyjmowania przedmiotów.
- Zasilanie: Upewnij się, że sterylizator jest zawsze podłączony do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją producenta.
- Obsługa: Nie otwieraj drzwi sterylizatora podczas cyklu sterylizacji, ponieważ może to prowadzić do nagłej utraty ciepła i potencjalnego ryzyka kontaminacji.
- Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan uszczelek, drzwi i elementów grzewczych. Uszkodzone lub zużyte części mogą stanowić ryzyko bezpieczeństwa i należy je wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowywanie: Nie przechowuj łatwopalnych ani wybuchowych substancji w pobliżu sterylizatora.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska
ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice
Telefon: +48 32 555 04 75
E-mail: sklep@enzopolska.pl
Godziny pracy:
• Pon – czw: 7-15
• Piątek: 7-14



Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.