

BOWi

Instrukcja użycia

MEDiMAT

MEDiMAT
Mata przeciwoodleżynowa



Wydanie 05.2020

Zastosowanie

Wyrób medyczny do stosowania w profilaktyce powstawania odleżyn oraz przyspieszania gojenia istniejących zmian.

Produkt dedykowany do użytku domowego jak i szpitalnego.

Wskazania

- Stosowanie w ramach profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn do I stopnia włącznie.
- Poprawa komfort osób długotrwale leżących, z problemami neurologicznymi, po urazach i zabiegach, z niedowładami kończyn.
- Poprawa komfortu pacjentów w stanach chorobowych związanych z wysoką gorączką oraz przy nocnym poceniu.
- Poprawa komfort snu kobiet w ciąży.

Przeciwwskazania


Brak.

Opis produkt

MEDiMAT Mata przeciwdleżynowa to wyrób medyczny do stosowania w codziennej profilaktyce przeciwdleżynowej oraz wspomagania leczenia istniejących zmian odleżynowych.

Produkt wykonany jest z innowacyjnej dzianiny dystansowej. Budowa dzianiny zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz łatwość czyszczenia wyrobu. Działina używana w MEDiMAT jest antyalergiczna – posiada naturalną barierę dla rozwoju pleśni oraz właściwości antybakteryjne. Mata jest wytrzymała, sprężysta, odporna na trwałe odkształcenia. Budowa maty zapewnia swobodną cyrkulację powietrza dzięki czemu wilgoć i ciepło odprowadzane są na zewnątrz.

Końce maty wykończone są lamówką, brzegi wzdłuż maty są wykończone maszynowo gwarantując jej wytrzymałość oraz cyrkulację powietrza. MEDiMAT posiada dwie gumy służące do przymocowania maty do materaca.

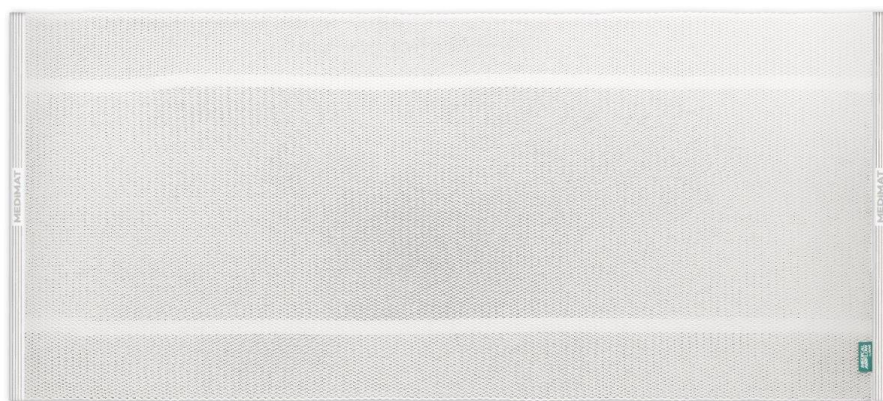

Do maty dołączony jest pokrowiec z tkaniny służący do przechowywania oraz transportu.



Instrukcja umieszczania

- Wyjąć MEDiMAT z pokrowca.
- Rozłożyć MEDiMAT na materacu skierowany stroną z gumami w dół.
- Przymocować MEDiMAT za pomocą gum by zapobiec zsuwaniu i zwijaniu maty (gumy powinny znaleźć się pod materacem).
- Przykryć MEDiMAT prześcieradłem.



Wymiary

	Wartość	Tolerancja
Szerokość	90 cm	+/- 5 cm
Długość	200 cm	+/- 5 cm
Wysokość	1,8 cm	+/- 0,1 cm

Materiał

100% Poliester

Sposób czyszczenia

W warunkach domowych prać w pralce w postaci zrolowanej. Maksymalna temperatura – 60 stopni Celsjusza. Nie chlorować, nie czyścić chemicznie. Suszyć w pozycji rozłożonej lub pionowej. Nie użytkować i nie umieszczać w pokrowcu aż do pełnego wyschnięcia. Przechowywać w suchym miejscu.

W warunkach szpitalnych prać w tunelach pralniczych zakończonych wirówką. Maksymalna temperatura prania – 60 stopni Celsjusza. Stosować wybielacze tlenowe. Nie czyścić chemicznie. Suszyć w suszarce bębnowej o niskich obrotach w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Używać ponownie tylko po całkowitym wyschnięciu maty.

Wymagane środki ostrożności

- Przed użyciem konieczne jest zapoznanie się z instrukcją.
- Nie dopuszcza się użytkowania produktu uszkodzonego.
- Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zabronione jest samodzielne wprowadzanie zmian w produkcie bez pisemnej zgody producenta.
- Montować MEDiMAT gumami w dół. Umieszczenie maty gumami do góry może skutkować zaplątaniem się pacjenta w gumy.
- Nie stosować produktu nieprzymocowanego gumami do materaca / innego podłoża. Może skutkować zwinieniem lub zsunięciem się maty i upadkiem pacjenta.
- Nie stosować bez materaca lub innego optymalnie sztywnego i zapewniającego podparcie podłoża (np. bezpośrednio na ramie łóżka).
- MEDiMAT nie może mieć bezpośredniej styczności z ranami.
- Montaż i użytkowanie MEDiMAT przez dzieci oraz osoby wymagające szczególnej opieki powinny odbywać się pod nadzorem opiekunów.
- Stosowanie maty nie zastępuje leczenia zmian odleżynowych zaordynowanych przez lekarza.

Sposób utylizacji

Wyrób nie jest kategoryzowany jako odpad medyczny wymagający specjalnej utylizacji. Powinien być utylizowany do odpadów plastikowych (przy użytkowaniu w warunkach domowych i w placówkach medycznych) lub zgodnie z zasadami utylizacji odpadów obowiązującymi w danej placówce medycznej.

W celu zabezpieczenia przed zakażeniem innych osób, wytwórca zaleca oczyszczenie z silnych zabrudzeń biologicznych przed utylizacją.

Producent

BOWI-STYL PW Wiesława Sitarz
93-575 Łódź, Polska
ul. RembIELińskiego 14
NIP: 7270005689 REGON: 004337601

Adres e-mail: info@bowi.pl

Telefon kontaktowy: +48 42 293 07 39

Witryna: www.bowi.pl