



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszki przeciwoleżynowe

PODUSZKA

PRZECIWODLEŻYNOWA

OKRĄGŁA W TKANINIE PAROPRZEPUSZCZALNEJ

Wypełnienie - granulatu styropianowy

Średnica w cm	44	33	15
Grubość w cm	8	8	6

Numer kat. REF 121

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Poduszki przeciwoleżynowe w pokrowcu z tkaniny paroprzepuszczalnej w dużym stopniu zmniejszają możliwość wystąpienia odleżyn, tkanina ta przepuszcza powietrze i dodatkowo jest nieprzemakalna. Wewnętrzny wkład w postaci ruchomego granulatu polistyrenowego gwarantuje równomierne dopasowanie się do każdej zmiany ułożenia ciała, jak również w połączeniu z pokrowcem zapewnia tak ważną przy odleżynach przepuszczalność powietrza. Poduszki przeznaczone są do stosowania miejscowego, mają za zadanie zapobiegać powstawaniu odleżyn, ale również doskonale sprawdzają się podczas leczenia już powstałych odleżyn oraz otarć. Otwór w środku poduszki zapewnia stały dostęp powietrza do zagrożonej odleżynami powierzchni skóry i skutecznie odciąża centralną część podpieranej kończyny. Poduszki skutecznie zabezpieczają głowę, łokcie, kolana, pięty, ramiona, oraz okolice kości krzyżowej i ogonowej. Stosowane są najczęściej u osób leżących jako podkład pod pośladki, celem odciążenia miejsc bolesnych. Doskonale odciążają miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem. Poduszki łatwo jest utrzymać w czystości ponieważ tkanina z której są wykonane jest nieprzemakalna i zmywalna.

Przeciwwskazania: Zaleca się unikać ostrych narzędzi.

Użytkowanie: Poduszka zalecana jest w zapobieganiu odleżynom w okolicach kości ogonowej, pośladków, kończyn dolnych i górnych.

Sposób konserwacji: Często wietrzyć. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CZĘSTO wyrównywać nierówności poduszki, aby zapobiec zgnieceniu wkładu pod ciężarem pacjenta.

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

RYZYKO wchłonięcia granulatu do ucha lub nosa przez dzieci, w przypadku rozprucia pokrowca wyrobu.

W takim przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W ŻADNYM WYPADKU nie należy samemu próbować usuwać granulatu, gdyż grozi to dodatkowymi uszkodzeniami.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

