

ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na invalidný vozík.

Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bol invalidný vozík funkčný, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru. Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.

Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu.

Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.

NÁVOD NA POUŽITIE

INVALIDNÝCH VOZÍKOV

KM-2512



ANMED PLUS

Karma ERGOLITE KM-2512 je v súčasnej dobe jedným z najľahších vozíkov na trhu. **Doporučuje sa predovšetkým pre prevoz pacienta v prípadoch, keď sa musí vozík často skladať.**

Rám vozíka je hliníkový s nosnosťou 100 kg. Poťah sedadla a chrbtovej opierky vozíka sú textilné a veľmi priadušné. Použitý textil má antibakteriálnu úpravu. Stupačky sú odklopiteľné.

Sedačka vozíka je "esovito" prehnutá a vďaka tomu je aj celodenné užívanie vozíka veľmi pohodlné. Chrbtovú opierku je možné pre potrebu transportu "zlomiť". Poťah sedadla a chrbtovej opierky vozíka je textilný, umývateľný a veľmi priadušný.

NÁVOD NA POUŽITIE INVALIDNÝCH VOZÍKOV KM-2512

1. Všeobecné informácie

Invalidný vozík je určený pre osoby s dočasnou alebo trvalou indispozíciou k samostatnému pohybu. Vozík môžu používať osoby s váhou do 100 kg.

Skôr ako začnete invalidný vozík používať, je nutné sa zoznámiť s týmto návodom, je to dôležité pre bezpečnosť užívateľa.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1) Nastupovanie a vystupovanie z vozíka je potrebné vykonávať pri nastavených brzdách a zabrzdennom vozíku.
- 2) Počas jazdy sa nesmú používať brzdy (iba ak sa vozík nepohybuje)! Netýka sa to ručnej brzdy použíwanej osobou, ktorá vozík tlačí.
- 3) Pri naklonení dopredu, je potrebné dávať pozor, aby sa váha nepremiestnila príliš dopredu. Aby ste zvýšili stabilitu vozíka, pred nakláňaním dopredu je potrebné sa uistiť, že predné kolesá sú nasmerované dopredu v smere jazdy!
- 4) Nenakláňajte sa príliš dopredu a tiež nevykláňajte sa na bok vozíka!
POZOR: NADMERNÉ NAKLÁŇANIE DOPREDOU ALEBO NA BOK MÔŽE VIESŤ K VYPADNUTIU Z VOZÍKA A PORANENIU!
- 5) Pri nastupovaní a vystupovaní z vozíka nestojte na podnožkách, môže to viesť k prevráteniu vozíka.
- 6) Pri vychádzaní na prahy alebo iné prekážky, pri prenášaní celej váhy na zadné kolesá, buďte opatrní. Ak máte obavy, či sa Vám to podarí, obráťte sa bezpodmienečne o pomoc na druhú osobu.

POZOR: NEOBRATNÉ ALEBO NEOPATRNE PRENÁŠANIE VÁHY NA ZADNÉ KOLESÁ MÔŽE VIESŤ K PREVÁTENIU VOZÍKA DOZADU, ČO JE VEĽMI NEBEZPEČNÉ A MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU PORANENIU! V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK POCHYBNOSTÍ, ČI JE BEZPEČNÉ PREKÁŽKU PREKONAŤ, OBRÁŤTE SA BEZPODMIENEČNE O POMOC NA DRUHÚ OSOBU!

Vyvarujte sa kontaktu vozíka s otvoreným ohňom. Pri priamom kontakte textilných, plastových a gumových častí s ohňom, môže dôjsť k ich vznieteniu

3. Obsluha a údržba

Opierku je možné pre potrebu transportu "zlomiť."

- Vozík má skladací rám - vozík skladáme povytiahnutím prostrednej časti sedačky smerom nahor (najskôr je nutné odopnúť vankúš, ktorý je pripevnený k sedačke suchým zipsom), vozík sa rozkladá pritlačením bokov sedačky smerom dole.

Je potrebné dávať pozor, aby boky sedačky boli v plastových úchytkách. Nesprávne rozloženie sedačky môže spôsobiť prasknutie úchytiak a poškodenie vozíka.

Je potrebné pravidelne kontrolovať stav vozíka a zabezpečovať jeho údržbu:

- kontrolovať stav kolies - ak sú opotrebované, vymeňte ich.
- kontrolovať pritiahnutie skrutiek spojovacích častí.
- čistenie zašpineného vozíka vlhkou handričkou.
- čistenie čalúnenia vlhkou handričkou, prípadne s použitím čistiacich prostriedkov.
- dezinfekcia čalúnenia vozíka určenými dezinfekčnými prostriedkami s atestom.

Výrobca:

KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD

No. 2363 Sec.2 UNIVERSITY RD., MIN-HSIUNG SHIANG, CHIA-YI HSIEN, TAIWAN

Splnomocnenec pre EÚ:

Karma Mobility Limited

Unit 6, Target Park, Shawbank Road,
Reddich B98 8YN, UK

Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716

