

Instrukcja obsługi

Ławka wgłębna do wanny


Kod produktu KING-BS-20

1. Wykonanie

Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz wyprofilowanej aluminiowej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi, które uniemożliwiają przesuwanie się ławki na wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo oraz stabilność podczas kąpieli. Regulowana rama pozwala na dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku aluminiowej ramy umożliwia jej długotrwałe użytkowanie. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

Zestaw zawiera:

- Siedzisko PCV
- Elementy ramy bocznej – 4 szt.
- Nasadki antypoślizgowe – 4 szt.
- Śruby montażowe – 4 szt.

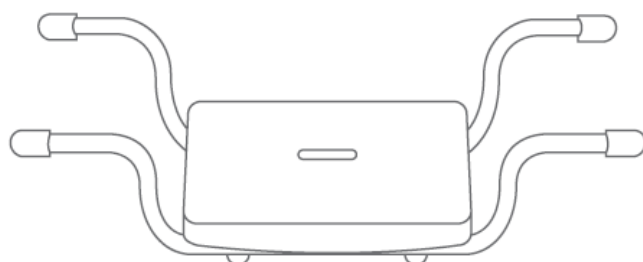


2. Zastosowanie


Ławka wgłębna do wanny jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

3. Montaż


Krok 1. W pierwszej kolejności należy zamontować nasadki antypoślizgowe na aluminiowych elementach ramy.

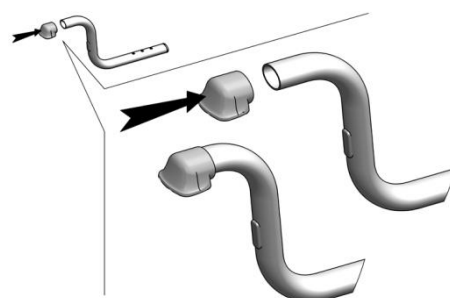


Krok 2. Następnie w otworach montażowych ławki należy zamontować elementy ramy bocznej kolejno z jednej i drugiej strony siedziska.

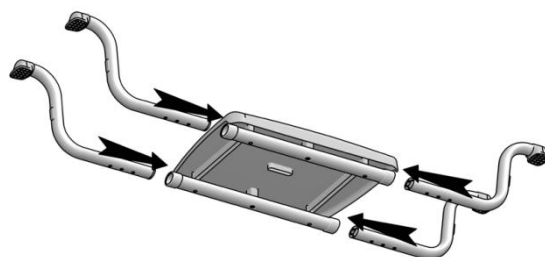

Krok 3. Szerokość ramy ławki należy dopasować poprzez wybranie odpowiedniego otworu montażowego na bocznych elementach ramy.

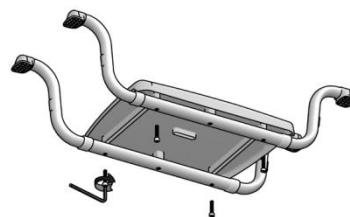

Krok 4. Następnie za pomocą czterech śrub montażowych należy przykręcić boczne elementy ramy do siedziska przy pomocy klucza imbusowego (5mm).

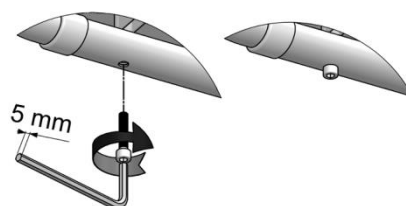

Krok 5. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane są poprawnie oraz czy szerokość jest dopasowana i ustawiona prawidłowo na wannie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	67-77 cm
Szerokość wewnętrzna	50-60 cm
Głębokość	18 cm
Wymiary siedziska	37 x 30 cm
Waga ławki	1,49 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z ławki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wytrzeć do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym:
 - stan śrub montażowych
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



LM GLOBAL Design Limited
Suite 74, Guinness Enterprise
Centre, Taylor's Lane,
D8 Dublin, Ireland

Dystrybutor:

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021