


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

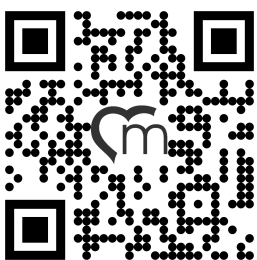

## PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybór produktu marki MEDIMAS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania, by przez wiele lat cieszyć się bezawaryjną pracą sprzętu.

## SERWIS ORAZ OBSŁUGA KLIENTA



Zalecamy korzystanie z oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z serwisem, należy podać numer zamówienia. W przypadku zakupu u naszego partnera handlowego: model, datę zakupu oraz numer seryjny produktu.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania bądź instalacji. Instrukcję obsługi należy zachować w bezpiecznym i dostępnym miejscu, na wypadek konieczności ponownego użycia.

## Instrukcja obsługi

### Składany stół rehabilitacyjny “Prosport 2 Deluxe”

#### I. Dane techniczne




Długość bez podglówka	195 cm (wraz z podglówkiem: 225 cm)
Szerokość	70 cm (z bocznymi podłokietnikami 92 cm)
Wysokość (regulowana skokowo)	61 - 86 cm
Wymiary po złożeniu	70 cm x 98 cm x 20 cm
Regulowany podłokietnik	45 cm x 19 cm
Podłokietniki boczne (2 szt)	11 cm x 40 cm
Otwór na twarz (z zaślepką)	11 cm x 16 cm
Regulowany podglówek	29 cm x 29 cm
Wysokość pianki	8 cm
Waga	18 kg
Dopuszczalne obciążenie	250 kg
Certyfikat	CE zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/ EWG

#### II. Zastosowanie

Stół rehabilitacyjny składany przeznaczony jest do masażu, zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w leczeniu oraz łagodzą skutki chorób i urazów. Pomagają wykonać efektywny i bezpieczny zabieg dzięki przyjęciu przez pacjenta odpowiedniej pozycji leżącej.

### III. Konstrukcja (patrz Fot.1 - 4)

- 1** Błat drewniany pokryty tapicerką
- 2** Nogi zewnętrzne
- 3** Rozpórki nóg zewnętrznych
- 4** Naciąg linkowy (system linek)
- 5** Noga ruchoma
- 6** Nakrętki motylkowe
- 7** Zaślepka otworu na twarz
- 8** Podłokietniki boczne
- 9** Podłokietnik przedni
- 10** Podgłówek na regulowanym stelażu
- 11** Dodatkowy otwór na podłokietnik
- 12** Otwory na podgłówek
- 13** Zamek walizkowy
- 14** Uchwyt transportowy
- 15** Pokrowiec do transportowania stołu

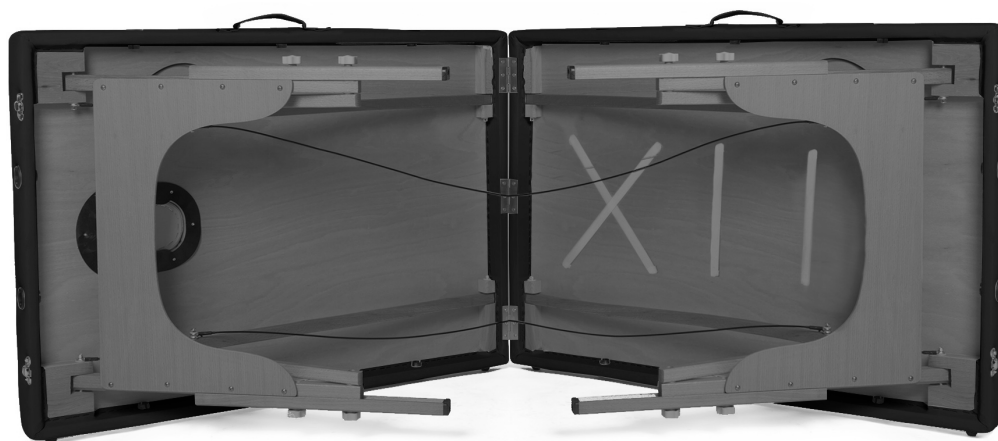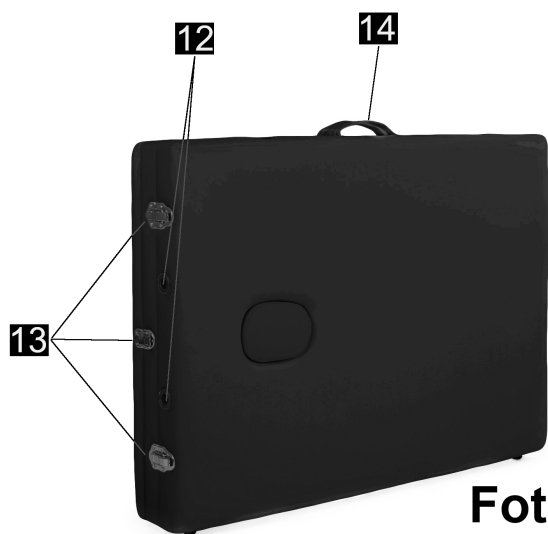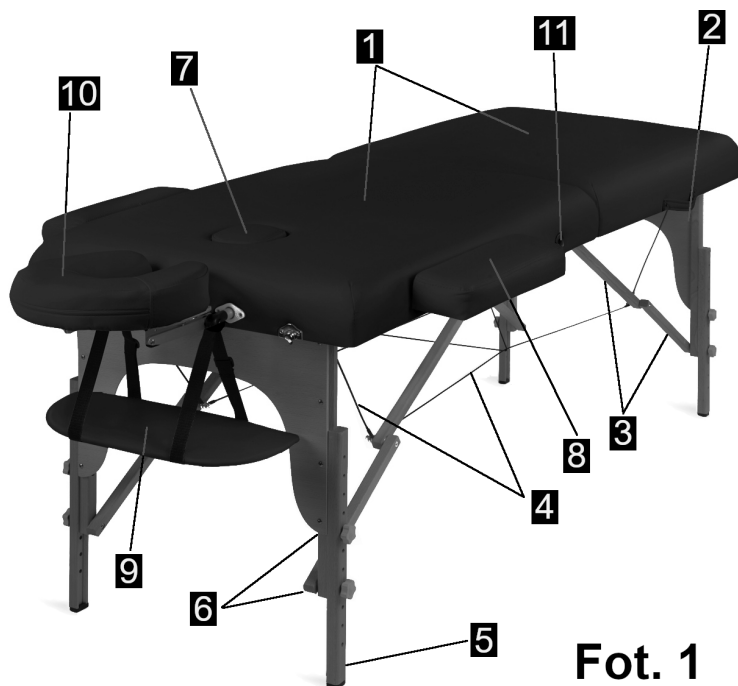

#### IV. Obsługa

Stół w stanie złożonym ma postać walizki (fot. 2), aby go rozłożyć należy:

- a. Otworzyć dwa zewnętrzne zamki walizkowe (14)
- b. Odchylić blaty stołu (1), rozchylając nogi maksymalnie na zewnątrz (2)
- c. Wyjąć wyposażenie z wnętrza stołu (9,10)
- d. Ustawić stół na równym i twardym podłożu (fot. 1)
- e. Sprawdzić naciąg linek (4)
- f. Ustawić odpowiednią wysokość poprzez:
  - odkręcenie nakrętek motylkowych (6)
  - zdjęcie nogi ruchomej (5) ze śrub mocujących
  - przełożenie nogi ruchomej na wybrane położenie
  - przykręcenie nakrętek motylkowych (6)
- g. Zamontować podglówek (10) oraz w razie potrzeby podłokietnik przedni (9) oraz podłokietniki boczne (8)
- h. Aby podnieść sekcję ruchomą (11) należy otworzyć środkowy zamek walizkowy (14) i unieść sekcję na żądaną wysokość
- i. Aby opuścić sekcję ruchomą (11) należy unieść ją do uzyskania oporu zwalniając tym samym mechanizm blokujący i swobodnie opuścić
- j. Sekcję ruchomą zabezpieczyć poprzez zamknięcie zamka walizkowego (14)

#### V. Ułożenie pacjenta:

Zabieg należy rozpocząć od poprawnego ułożenia pacjenta na stole. Pacjent powinien najpierw usiąść na blacie stołu po czym zająć odpowiednią dla danego zabiegu pozycję leżącą. Zajęcie odpowiedniej pozycji na stole jak i zejście ze stołu powinny być asekurowane przez osobę wykonującą zabieg.



#### WAŻNE

Zanim pacjent położy się na stół rehabilitacyjny, należy sprawdzić rozstawienie nóg stołu, prawidłowe ustabilizowanie wysokości za pomocą nakrętek skrzydełkowych, wysokość nóg (czy jest odpowiednia do zabiegu) oraz stan techniczny stalowych linek, w tym ich naciąg.

#### VI. Złożenie stołu

- 1 Zdemontować podglówek i wyposażenie dodatkowe (o ile występuje).
- 2 Przewrócić stół na bok stawiając go na stopkach (fot.4).
- 3 Złożyć nogi zewnętrzne, zwracając uwagę na prawidłowe położenie linek.
- 4 Umieścić wyposażenie wewnątrz stołu - jeżeli występuje (fot.4)
- 5 Zamknąć walizkę dwoma zewnętrznymi zamkami (14), uważając aby nie zatrasnąć linek.
- 6 Postawić stół na stopkach do tego przeznaczonych lub umieścić walizkę w pokrowcu (16)

#### VII. Czyszczenie i konserwacja

- 1 Eko - skóra, skaj. Czyścić łagodnym roztworem szarego mydła oraz letniej wody za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używać rozpuszczalników ani detergentów.
- 2 Elementy lakierowane i chromowane. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używać rozpuszczalników oraz środków ściernych.
- 3 Drewno, sklejka: czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, wycierając do sucha. Nie używać środków chemicznych.

#### VIII. Dezynfekcja

Dezynfekować za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekujących niezawierających alkoholu i chloru.

#### IX. Uwagi eksploatacyjne

- 1 Stół jest przewidziany do wykonywania zabiegu na jednej osobie w jednym czasie.
- 2 Zabrania się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
- 3 Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania)
- 4 Stół należy transportować w stanie złożonym z zamkniętymi zamkami.
- 5 Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.
- 6 Zabrania się siadania, klękania opierania na podglówku (10) i podłokietniki (8,9)

#### X. Zalecenia

- 1 Używać stół zgodnie z instrukcją obsługi.
- 2 Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

## Instrukcja montażu kółek do torby transportowej

Kółka należy przykręcić śrubami dołączonymi do zestawu (16 sztuk, po 4 śruby do jednego kółka) śrubokrętem krzyżakowym. Kółka tylne "A" (nie-skrętne) po stronie kieszeni na wałek, kółka przednie "B" (skrętne) po stronie uchwyty do ciągnięcia. Kółka należy przykręcić zgodnie ze zdjęciem nr 2 zachowując co najmniej centymetr odstęp od brzegu deski.



**"A"** kółka tylne

**"B"** kółka przednie (skrętne)



# Karta gwarancyjna

*(Nie wymaga podpisu ani pieczętki, reklamację można złożyć bez dowodu zakupu - wystarczy numer zamówienia.)*


Nazwa produktu	<b>Stół rehabilitacyjny Prosport 2 Deluxe</b>	Numer zamówienia	
Kod produktu	<b>2E</b>	Data zakupu	

## Notatki z napraw gwarancyjnych

Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych prac	Pieczętka i podpis serwisanta

Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje wady fabryczne (wadliwy materiał bądź wadliwy sposób produkcji). Gwarancja nie dotyczy szkód powstałych na skutek transportu, niewłaściwego użytkowania lub innych wypadków. Wadliwy produkt może zostać zwrócony jedynie wraz z opisem wad oraz adresem sklepu, w którym towar zakupiono. W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej należy postępować zgodnie z instrukcją. Przy zamawianiu nowych części należy opisać numer modelu - jest on umieszczony na opakowaniu, w którym produkt został sprzedany.

# medimas

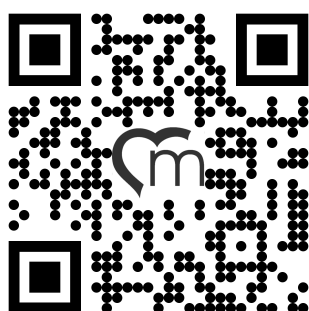

+48 516 805 405



info@medimas.pl