

# Prezerwatywa PASANTE NATURELLE 1 SZT Kondom z Poszerzoną Końcówką

✔ **Prezerwatywy Pasante Naturelle, wykonane z najwyższej jakości lateksu, charakteryzują się bardziej anatomicznym kształtem niż zwykłe kondomy, co zapewnia dodatkowy komfort podczas zbliżeń.**

✔ **Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych materiałów i rygorystycznej technologii produkcji, te prezerwatywy są niezwykle bezpieczne w trakcie stosunku oralnego, waginalnego oraz analnego.**

✔ **Dodatkowo, są delikatnie nawilżone specjalnym lubrykantem na bazie wody, co zwiększa uczucie komfortu i przyjemności.**

## ★ UWAGA

**Przedmiotem aukcji jest oryginalnie zapakowana paczka 72 sztuk Pasante NATURELLE widoczna na zdjęciu**

## ★ SPECYFIKACJA

- ▶ Długość: 190 mm
- ▶ Szerokość: 54 mm
- ▶ Grubość: 65 mikronów
- ▶ Poszerzona końcówka
- ▶ Materiał: Naturalna guma lateksowa
- ▶ Struktura: Prezerwatywy gładkie
- ▶ Kształt: Easy-On, łatwe do nałożenia
- ▶ Kolor: Przezroczyste

## ★ Prezerwatywy posiadają instrukcje w języku polskim (dodatkowo dołączona do aukcji w formie PDF)

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.
2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo - prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.

4. Usuń prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzuć zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie spłukuj w toalecie.

**Prezerwatywy posiadają certyfikat jakości CE oraz ISO.**

**Każda sztuka jest sprawdzana oraz testowana pod kątem jakości.**

**Data ważności: 1-4 lata.**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.**

**Producent: Pasante Ltd. (UK) , Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. (MT), Podmiot prowadzący reklamę: Pasante Europe Ltd. (IE)**