

Instrukcja obsługi – Endoskop z kamerą HD i WiFi

1. Zawartość zestawu

- 1x Endoskop z kamerą HD (8 MP)
- 6x silikonowych końcówek do bezpiecznego czyszczenia
- 6x tradycyjnych łyżeczek do uszu
- 1x butelka do przechowywania końcówek
- 1x czyścik do urządzenia
- 1x kabel USB do ładowania
- 1x instrukcja obsługi

2. Specyfikacja techniczna

- **Kolor:** Czarny
- **Zasilanie:** Akumulatorowe
- **Czas pracy na baterii:** ok. 60 minut
- **Czas ładowania:** ok. 60 minut
- **Kamera:** 8 MP, średnica 3,2 mm
- **Ogniskowa:** 1,4–2 cm
- **Obiektyw:** szerokokątny 360°
- **Oświetlenie:** 6 diod LED
- **Żyroskop:** 6-osiowy
- **Komunikacja:** Wi-Fi 2.4 GHz
- **Kompatybilność:** Android / iOS
- **Aplikacja:** „Soulear”
- **Częstotliwość odświeżania:** 30 fps
- **Sensor:** CMOS
- **Soczewka:** wodoodporna

3. Przygotowanie do pracy (połączenie z aplikacją)

1. Pobierz aplikację „**Soulear**” ze Sklepu Play (Android) lub App Store (iPhone).
2. Włącz **Endoskop** – przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund.
3. Na telefonie wejdź w **Ustawienia** → **Wi-Fi** i połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia (nazwa zaczyna się od „Soulear...”).
4. Otwórz aplikację **Soulear**.
5. Kliknij „**Connect Device**” (Połącz urządzenie).
6. Gotowe – na ekranie telefonu zobaczysz obraz na żywo z kamery Endoskopu.

4. Użytkowanie

- Wybierz odpowiednią końcówkę (silikonową lub tradycyjną łyżeczkę).
- Nałóż końcówkę na otoskop i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.
- Delikatnie wprowadź końcówkę do ucha – bez używania siły.
- Obserwuj obraz w aplikacji i ostrożnie usuwaj woskowinę.
- Możesz robić zdjęcia lub nagrywać filmy.
- Po użyciu zdejmij końcówkę i dokładnie ją wyczyść.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Myj końcówki po każdym użyciu wodą z mydłem lub przetrzyj wilgotną szmatką.
- Samo urządzenie czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Soczewka jest wodoodporna – możesz ją przemyć pod bieżącą wodą.
- Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od dzieci.

6. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie używaj, jeśli w uchu są stany zapalne, rany lub perforacja błony bębenkowej.
- Używaj maksymalnie 5 minut na jedno ucho.
- Nie kieruj światła LED prosto w oczy.
- Urządzenie nie jest zabawką – trzymaj z dala od dzieci.
- Po każdym użyciu dezynfekuj końcówki i przechowuj je w butelce ochronnej.