



KOMBAJN KOSMETYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.


PRZEDMOWA

Mikrokryształiczna dermabrazja została po raz pierwszy zaprojektowana przez włoskiego specjalistę z Florencji, Mattioli, i ma już ponad 20-letnią historię. Początkowo technologia ta była stosowana wyłącznie przez dermatologów i lekarzy, jednak z biegiem czasu zaczęła być wykorzystywana także w salonach SPA oraz gabinetach kosmetycznych. Jest uznawana za jedną z najlepszych metod medycyny estetycznej. Metoda ta została z powodzeniem rozwinięta w Europie na przestrzeni kilku lat, gdzie z powodzeniem przeprowadzono tysiące zabiegów, osiągając wyjątkowo satysfakcjonujące efekty.

Obecnie chcemy przedstawić Diamentową Dermabrazję – innowacyjne udoskonalenie mikrokryształicznej dermabrazji. Diamentowa dermabrazja to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry, który wykorzystuje sterylne głowice diamentowe do złuszczenia lub ścierania wierzchniej warstwy naskórka. Następnie za pomocą próżni usuwane są złuszczone cząsteczki, a także zanieczyszczenia i martwe komórki skóry. Zabieg ten usuwa zanieczyszczenia skóry, niedoskonałości, przebarwienia, zmarszczki oraz niepożądane pigmentacje. Umiarkowane stosowanie diamentowej dermabrazji, w połączeniu z kosmetykami, które wnikać przez wierzchnią warstwę skóry aż do poziomu skóry właściwej, pomaga uzupełnić naturalne składniki odżywcze, przywrócić aktywność komórek i poprawić zdrowie skóry. Rezultatem zabiegu mikrodermabrazji jest zwykle zdrowa, promienna i piękna skóra.

Opis elementów urządzenia:

- A) Włacznik zasilania
- B) Regulator próżni
- C) Uchwyt na pióra
- D) Gniazdo próżniowe
- E) Pióra diamentowe
- F) Przewód diamentowy

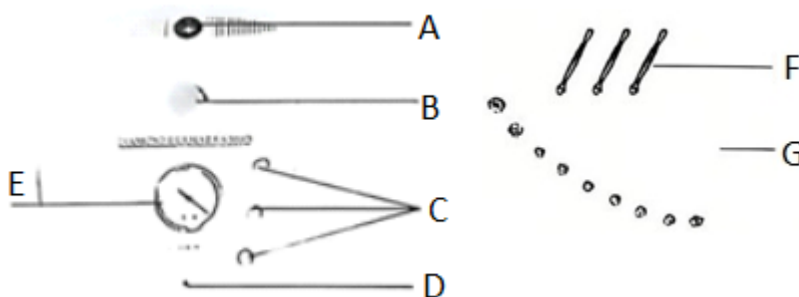

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Włącz diamentową dermabrazję.
 - Naciśnij przycisk 3, aby uruchomić lub zatrzymać funkcję diamentowej dermabrazji.
 - Obróć pokrętkę 2, aby dostosować poziom ciśnienia.

FUNKCJA DIAMENTOWEJ DERMABRAZJI

Diamentowa dermabrazja działa na skórę właściwą, stymulując jej aktywność oraz regenerację. Wspomaga mikrokrażenie (wymianę składników odżywczych i produktów przemiany materii).

- Korzyści dla metabolizmu:
 - Pobudza metabolizm.
 - Poprawia dostarczanie tlenu i składników odżywczych.
 - Usuwa nagromadzone produkty przemiany materii, przyspieszając ich eliminację.
- Krążenie limfatyczne (pasywny drenaż):
 - Poprawia przepływ limfy.
 - Usuwa nadmiar wilgoci oraz zalegające produkty odpadowe.
 - Zwiększa zdolność skóry do przyswajania składników odżywczych.
- Tkanka łączna (skóra właściwa – odżywianie i usuwanie toksyn):
 - Wzmacnia napięcie skóry właściwej.
 - Stymuluje metabolizm skóry.
 - Zwiększa zdolność skóry do wchłaniania składników odżywczych.
- Główne funkcje zabiegu:
 1. Usuwanie martwych komórek naskórka:
 - Zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się komórek skóry, utrzymując ją gładką i delikatną.
 2. Poprawa krążenia krwi i limfy:
 - Przyspiesza transport wilgoci i składników odżywczych, nadając skórze blask i promienny wygląd.
 3. Nawilżenie i regeneracja:
 - Zwiększa przepuszczalność komórek, poprawiając wchłanianie produktów pielęgnacyjnych i nawilżenie skóry.
 4. Regeneracja komórek naskórka:
 - Przyspiesza odnowę skóry, przywracając jej równowagę wodną i zdrowy wygląd.
- Zabieg na wiotką skórę i zmarszczki:
 1. Przyspiesza usuwanie zanieczyszczeń, kurzu i wolnych rodników z powierzchni skóry.
 - Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne, zapobiega degeneracji włókien kolagenowych.
 2. Poprawia krążenie krwi i limfy oraz przyspiesza metabolizm, zapewniając odpowiednie odżywienie skóry.
 - Pomaga w redukcji drobnych linii i zmarszczek.
 3. Zwiększa przepuszczalność skóry, umożliwiając skuteczniejsze wnikanie produktów pielęgnacyjnych w głębsze warstwy skóry.
 - Stymuluje produkcję nowych włókien kolagenowych, wygładza zmarszczki.
 4. Pobudza syntezę kolagenu, wzmacnia odporność skóry, chroni przed uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami i czynnikami środowiskowymi.
 - Utrzymuje skórę jędrną i elastyczną.
- Zabieg na matową skórę i nierówny koloryt:
 1. Usuwa martwe komórki naskórka, zapobiegając ich nagromadzeniu i utrzymując skórę czystą.
 2. Poprawia krążenie krwi i limfy, przyspiesza metabolizm oraz zwiększa zawartość tlenu w skórze, nadając jej zdrowy, różowy wygląd.
 3. Zwiększa przepuszczalność komórek, poprawia wchłanianie składników odżywczych i nawilżenie skóry, czyniąc ją promienną i lśniąca.
 4. Stymuluje regenerację komórek podstawnych naskórka, przyspiesza odnowę skóry i nadaje jej miękką, jasną koloryt.

- Zabieg na skórę z przebarwieniami:
 1. Przyspiesza usuwanie melaniny z keratynocytów w naskórku.
 2. Poprawia mikrokrążenie skóry i stymuluje metabolizm melaniny, pomagając rozjaśnić skórę i zredukować przebarwienia.
 3. Zwiększa przepuszczalność skóry, poprawiając wchłanianie produktów pielęgnacyjnych.
 - Skutecznie hamuje powstawanie melaniny i zapobiega przebarwieniom.
 4. Wspomaga regenerację komórek podstawnych naskórka, wzmacnia odporność skóry i zwiększa jej ochronę przed promieniowaniem UV.
 - Utrzymuje skórę czystą, jasną i promienną.

ZABIEG

Rodzaj problemu skórniego	Liczba sesji	Skuteczność
Blizny potrądzikowe (dziury, zagłębienia)	5-10 sesji	80%-100%
Rozszerzone pory	1-2 sesje	90%
Zamknięte zaskórniki (trądzik zamknięty)	2 sesje	100%
Łojotokowe zapalenie skóry	3-5 sesji	100%
Szorstka skóra	1-2 sesje	100%
Włókniste grudki	2-3 sesje	100%
Zmarszczki nosowo-wargowe, zmarszczki na czole	W zależności od przypadku	80%-100%
Przebarwienia starcze (plamy pigmentacyjne)	W zależności od przypadku	80%-100%
Drobne zmarszczki i trądzik różowaty	W zależności od przypadku	80%-100%
Ujędrnianie skóry (zagęszczenie)	1-10 sesji	70%-100%
Blizny potrądzikowe (płaskie)	3-5 sesji	90%

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY DIAMENTOWEJ DERMABRAZJI

1. Stosuj produkty regenerujące skórę:
 - Często używaj zimnych okładów lub preparatów z żywymi komórkami oraz stabilizowanym kolagenem w celu regeneracji skóry.
2. Zawsze używaj kremu z filtrem przeciwsłonecznym.
3. W przypadku makijażu:
 - Zaleca się stosowanie czystych pudrów mineralnych, aby uniknąć zatykania porów.
4. Myj twarz zimną wodą.
5. Unikaj wysokich temperatur:
 - Przez 10–15 dni po zabiegu nie korzystaj z sauny ani gorących kąpeli.
6. Proces gojenia:
 - Po 2–3 dniach od zabiegu może wystąpić swędzenie, łuszczenie się skóry lub powstawanie strupków. Nie drap ani nie odrywaj złuszczonej się skóry.
7. Przerwy między zabiegami:
 - Odstępy między sesjami powinny wynosić 1–3 tygodnie, w zależności od kondycji skóry, jej witalności oraz miejsca zabiegu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ważne informacje przed rozpoczęciem zabiegu:
 - Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i przeciwwskazaniami.
2. Przeciwwskazania – nie używaj urządzenia u osób z poniższymi schorzeniami:
 - Choroby serca
 - Szmery sercowe lub nieregularny rytm serca
 - Rozrusznik serca lub inne urządzenia regulujące rytm serca
 - Ciąża
 - Padaczka
 - Alkoholizm
 - Wrzody żołądka lub jelit
 - Choroby żołądka, jelit, wątroby lub trzustki
 - Rak piersi
 - Leczenie jakiegokolwiek formy nowotworu
 - Przebyte poważne operacje w ciągu ostatniego roku
 - Astma
 - Przeziębienie, grypa lub rozstrój żołądka
 - Jakiegokolwiek poważne choroby niewymienione powyżej

Uwaga: Zaleca się, aby klient podpisał oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych przed przystąpieniem do zabiegu.

3. Obszary, na których nie należy wykonywać zabiegu:
 - Skóra wrażliwa
 - Wysypki skórne
 - Uszkodzona, zapalna lub zakażona skóra
 - Blizny pooperacyjne młodsze niż 12 miesięcy
 - Opuchnięta skóra
 - Gałki oczne (końcówki urządzenia nie mogą być kierowane na oczy)
 - Narządy płciowe
4. Zasady przeprowadzania zabiegu:
 - Zawsze rozpoczynaj zabieg ostrożnie, obserwując reakcję skóry zarówno wizualnie, jak i dotykowo.
 - Zbyt wysokie ciśnienie lub zbyt duża siła ssania mogą spowodować reakcję zapalną.
5. Możliwe efekty uboczne:
 - Po zabiegu mogą wystąpić obrzęk (edema) i zaczerwienienie (erythema), które powinny ustąpić w ciągu kilku godzin.
 - Zbyt agresywne techniki mogą powodować lekkie łuszczenie się skóry przez 3–4 dni.
 - Nadmierna intensywność zabiegu może prowadzić do krwawienia w powierzchownej warstwie skóry właściwej.
6. Bezpieczeństwo okolic oczu:
 - Zabieg nie powinien być wykonywany na delikatnych obszarach, takich jak powieki.
 - Podczas zabiegu oczy powinny być zamknięte, najlepiej zabezpieczone wilgotnymi płatkami kosmetycznymi.

7. Nieodpowiednie obszary do zabiegu:
- Guzy skórne
 - Pieprzyki
 - Znamię
 - Naczyniaki
 - Usta
 - Oczy
 - Opryszczka
 - Rak skóry
 - Plamy wątrobowe
8. Konserwacja urządzenia:
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie problemów skontaktuj się z technikiem serwisowym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykonaj następujące kroki przed zgłoszeniem potrzeby serwisowania:
1. Niskie ssanie/niskie ciśnienie próżni:
 - Sprawdź, czy wąż próżniowy jest prawidłowo podłączony zarówno do gniazda, jak i do końcówek zabiegowych.
 - Ustaw regulator próżni na maksymalną wartość.
 - Włącz funkcję diamentowej dermabrazji.
 - Zablokuj palcem otwór końcówki zabiegowej.
 - W normalnych warunkach wskaźnik próżni powinien osiągnąć wartość 24 cale Hg.
 2. Sprawdź także pierścienie uszczelniające (O-ringi):
 - W końcówkach diamentowych (Diamond Pens).
 - W gnieździe podłączenia (Socket).

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z dystrybutorem.
Nie otwieraj urządzenia samodzielnie bez pomocy technika.

3. Brak reakcji po włączeniu zasilania:
- Wymień bezpiecznik.
 - Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
 - Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiał/akcesoria	Ilość
Urządzenie do diamentowej dermabrazji	1
Wąż próżniowy PVC 6*4	1
Pióro diamentowe (Diamond Pen)	3
Pudełko na pióra z pianką ochronną	1
Głowice diamentowe	9
Pudełko na głowice z pianką ochronną	1
Pierścienie uszczelniające (O-ringi)	3
Filtr bawełniany	1
Przewód zasilający	1
Bezpieczniki	3
Instrukcja obsługi	1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametr	Szczegóły
Napięcie	240V/50/60Hz 220V/50/60Hz 115V/60Hz
Moc	65V
Bezpiecznik	2A

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Godziny pracy:

- Poniedziałek – Piątek: 7-15



Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.