

Instrukcja montażu i obsługi

Uchwyt prosty wannowy 86,5cm

Model 807/865CC



BEZ BARIER

BEZ BARIER

I. Dane techniczne /Rys. A/

Długość uchwyty	865 [mm]
Odległość od ściany	165 [mm]
Dopuszczalne obciążenie	120 [kg]
Waga netto	1,68 [kg]

II. Zastosowanie

Uchwyt prosty wannowy wykonany został z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach panujących w łazienkach. Może on znaleźć zastosowanie również w gabinetach lekarskich, szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych. Poprzez zastosowanie uchwyty prostego wannowego, kompensowane jest upośledzenie narządów ruchu oraz kręgosłupa. Zwiększone jest bezpieczeństwo korzystania z wanny. Uchwyt prosty wannowy może być mocowany osobno, jak również może być połączony wraz z innymi uchwytami w różne moduły /Rys. C/. Do połączenia uchwytów w moduły należy zastosować łącznik kątowy 806CC.

III. Budowa /Rys. A i B/

1. Uchwyt prosty wannowy



IV. Montaż /Rys. B/

Zalecany jest montaż uchwyty prostego wannowego do ściany pełnej. W przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwory należy wierceć bez uderu. Otwory po wierceniu należy oczyścić z pyłu oraz zwiercić. Uchwyt prosty wannowy przykręcić do ściany przy pomocy 4 wkrętów poz. 2 i kołków rozporowych poz. 3 załączonych w zestawie. Po przykręceniu uchwyty, na wkręty nałożyć zaślepki poz. 4 dołączone w zestawie. Nie wolno mocować uchwyty prostego prysznicowego bezpośrednio do płyt kartonowo - gipsowych!


V. Obsługa i eksploatacja /Rys. B/

1. Przed użytkowaniem uchwyty wannowego należy zwrócić uwagę na stan techniczny i pewność zamocowania do ściany.
2. Zaleca się okresowe sprawdzenie prawidłowego zamocowania uchwyty prostego wannowego.
3. W przypadku wdrożonej szczeliny pomiędzy podkładką a ścianą należy dokręcić wkręty mocujące poz. 2.

BEZ BARIER

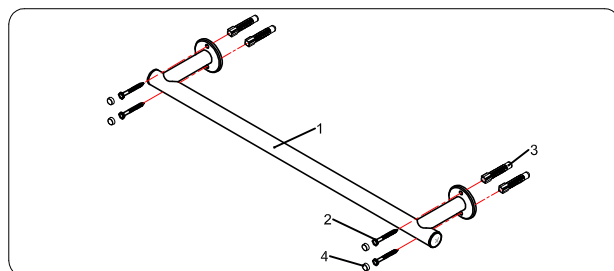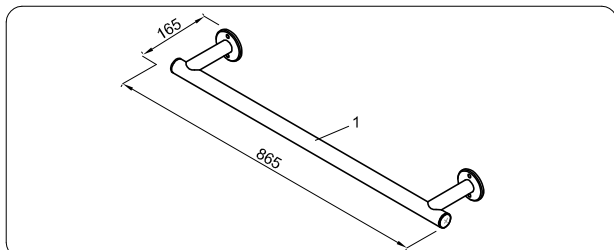

Przykładowe moduły Andex Bez Barier

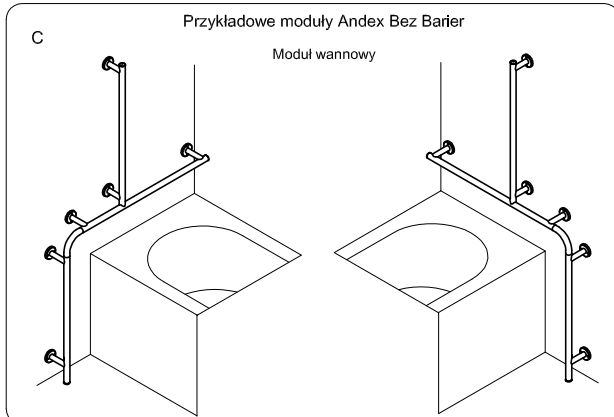

BEZ BARIER

VI. Konserwacja

1. Stal nierdzewna Inox charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na czynniki działające w trakcie normalnej eksploatacji. Nie traci swego połysku i gładkości powierzchni, pod warunkiem systematycznej konserwacji przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Należy używać środków przeznaczonych do czyszczenia szkła, ale nie zawierających chlorków. Powierzchnie bardzo zaniebane mogą być czyszczone przy użyciu środków do polerowania metali. Niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających chlor, a w szczególności kwas solny. Może to prowadzić do przeżółcenia powierzchni lub pojawienia się rdzawych plam.
2. Do zwykłego zabrudzenia stosować mokrą tkaninę, do bardziej opornego - nylonowe gąbki. Nie wolno stosować stalowych poduszek i szczotek drucianych do szorowania, aby uniknąć porysowania powierzchni i zanieczyszczenia cząsteczkami żelaza.
3. Środki zastosowane do konserwacji uchwyty prostego wannowego, powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Użytkować uchwyt prosty wannowy zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Czyszczenie uchwyty ze stali nierdzewnej winno być dokonywane zanim nagromadzone zanieczyszczenia lub odciski palców staną się widoczne, dla zminimalizowania pracochłonności i kosztów czyszczenia.