



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszki przeciwoleżynowe

PODUSZKA

PRZECIWODLEŻYNOWA

Z OTWOREM W TKANINIE BAWĘLIANEJ-FROTTE



Średnica w cm	20	40
Grubość w cm	6	7

Numer kat. REF 133

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Poduszki przeciwoleżynowe z pianki poliuretanowej rozkładają nacisk ciała zmniejszając do minimum możliwość wystąpienia odleżyn, przeznaczone są do stosowania miejscowego, doskonale sprawdzają się podczas leczenia już powstałych odleżyn oraz otarć. Otwór w środku krążka zapewnia stały dostęp powietrza do zagrożonej odleżynami powierzchni skóry i skutecznie odciąża centralną część podpieranej kończyny. Krążki skutecznie zabezpieczają głowę, łokcie, kolana, pięty, ramiona, oraz okolice kości krzyżowej i ogonowej. Doskonale odciążają miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem. Pokrowiec wykonany z tkaniny frotte zamykany na zamek można zdejmować i prać.

Przeciwwskazania: Zaleca się unikać ostrych narzędzi.

Użytkowanie: Poduszka przeznaczona do zapobiegania powstawaniu odleżyn w okolicach kości ogonowej, pośladków, kończyn górnych i kończyn dolnych, pięt, łokci.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. Nie prasować i nie przyspieszać procesu suszenia. W żadnym wypadku nie można suszyć krążka przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie krążka. Często wietrzyć. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CZĘSTO wyrównywać nierówności krążka, aby zapobiec zgnieciu wkładu pod ciężarem pacjenta.

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

40



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3