

Scarban®
profesionální péče o jizvy

NÁVOD *k použití*

**PÉČE O JIZVU
PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU**



Protože každá jizva potřebuje péči!

www.scarban.eu

PÉČE O JIZVU PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU



TA NEJLEPŠÍ PÉČE O VAŠI JIZVU ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ!

Po operacích jako je císařský řez vždy dochází ke vzniku jizvy. A vy si určitě přejete, aby se jizva co nejlépe zhojila a byla co nejmenší.

Silikonová náplast na jizvu po císařském řezu Scarban® C-Section vám přináší tu nejlepší péči, proto je doporučována po celém světě.

Silikonová náplast Scarban® je velmi účinná a bylo klinicky ověřeno, že redukuje tvorbu jizvy a souvisejících problémů. Náplast vytváří na kůži polopropustnou vrstvu, díky které nedochází v kůži ke ztrátě vody, která je nejdůležitější příčinou tvorby abnormálních a nehezkých jizev.

Výsledek:

- Tvorba jizev je redukována až na minimum
- Výrazná úleva od problémů souvisejících s jizvami jako je svědění a bolest
- Lepší vzhled jizvy, menší zarudnutí

Shrnutí

Náplast Scarban® C-Section vám poskytne optimální podporu při prevenci vzniku abnormální jizvy.

Proto začněte s ošetřením už dnes, aby byly výsledky co nejlepší!

TIPY K POUŽÍVÁNÍ NÁPLASTI

Prosím uvědomte si, že silikonová náplast Scarban® je určena k použití na zcela zhojenou pokožku.

Začněte se Scarban® silikonovou terapií až po vytažení stehů a odpadnutí strupů.

Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, používejte náplast minimálně 12 a maximálně 23 hodin denně.

Silikonovou náplast Scarban® **nalepte** na čistou nemastnou pokožku. Nepoužívejte mastné krémy nebo oleje, snížily by lepicí schopnost náplasti.

Jizva se nezahojí hned. Může trvat až 6 měsíců nebo déle než jizva vyzraje a zahojí se.

Silikonovou náplast Scarban® **čistěte každý den**, například při pravidelném sprchování. Díky tomu bude lépe lepit a prodlouží se její životnost.

Nikdy nevystavujte narušenou pokožku slunci. Slunce může způsobit popáleniny a permanentní změnu barvy pokožky.

Silikonové náplasti Scarban® jsou bezpečné a efektivní na staré i nové jizvy!

Další pokyny a praktické informace naleznete dále.

NÁVOD K POUŽITÍ



1

Pokud je to nutné, můžete silikonovou náplast Scarban® nůžkami upravit na požadovanou velikost. Silikonová náplast musí pokrývat jizvu a okolní kůži do šíře 2 cm.



2

Odstraňte ochlupení v blízkosti jizvy, aby náplast lépe držela a měla větší trvanlivost. Před aplikací jizvu a okolí omyjte a důkladně osušte.



3

Sejměte ochrannou folii ze zadní strany náplasti Scarban®.



4

Opatrně nalepte Scarban® silikonovou náplast na jizvu.



5

Pokud je to nutné, můžete náplast zafixovat na místě pomocí adhezivního nebo elastického obvazu. Po odstranění silikonové náplasti pokožku ošetřete hydratačním krémem.



6

Scarban® silikonová náplast se musí každý den důkladně čistit, aby byla zachována její lepicí schopnost. Kápněte na silikonovou náplast několik kapek čistícího prostředku Scarban® Silicone Cleaning Soap nebo jiného neutrálního prostředku.



7

Odstaňte co nejvíce nečistot čistícím prostředkem a vlažnou vodou. Silikonovou náplast důkladně opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou.



8

Lepicí schopnost náplasti se po kontaktu s mýdlem a vodou sníží a náplast se sroluje. Silikonovou náplast nechte uschnout na suchém a čistém povrchu, lepicí stranou nahoru. Při usychání se náplast narovná a začne znovu postupně lepit.

CZ

Název:

Scarban® je značka vysoce kvalitních produktů pro péči o jizvy.

Popis produktu:

- Scarban® silikonové náplasti jsou osvědčená technologie pro ošetření jizev (hypertrofických a keloidních) a prevenci vzniku abnormálních jizev po operaci nebo úrazu.
- Tyto náplasti vyrobené ze silikonu pro medicínské účely jsou samolepící, omyvatelné a lze je používat dlouhodobě.
- Čistící přípravek Scarban® Silicone Cleaning Soap je určen k čištění těchto silikonových náplastí.

Složení:

- Textilní vrstva: polyamid, elastan
- Silikon pro zdravotnické účely

Vlastnosti:

- Díky Scarban® silikonovým náplastem jsou jizvy plošší, pružnější a tenčí a zmírni se problémy, které s jizvami souvisí (přetrvávající zarudnutí, pocit pnutí, svědění, omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické aspekty).
- Silikonové náplasti vytváří polopropustnou (krycí) vrstvu na svrchní části pokožky, díky které je zajištěna vyšší hydratace pokožky (epidermis). Díky lepší hydrataci se poškozená a zjizvená pokožka lépe hojí a dochází ke zmírnění souvisejících problémů.
- Scarban® silikonové náplasti zajišťují standardně ochranu proti slunečnímu záření (ochranný faktor SPF 50).

Indikace/aplikace:

Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pro:

- staré i nové jizvy,
- všechny typy pokožky,
- všechny věkové kategorie,
- ošetření a prevence abnormálních jizev (hypertrofické a keloidní),
- ošetření jizev po popáleninách,
- ošetření jizev po operacích,
- použití pod oděv a při tlakové terapii,
- řešení přetrvávajících problémů souvisejících s jizvami (přetrvávající zarudnutí, pocit pnutí, svědění, omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické aspekty).

Pokyny pro použití:

- Aby bylo dosaženo optimálních výsledků, začněte Scarban® silikonovou náplast používat okamžitě po uzavření rány (po vytažení stehů a odpadnutí strupů).
- Doporučuje se postupně zvykat pokožku na silikonovou terapii Scarban®, během prvního týdne od minimálně 12 hodin do maximálně 20 hodin denně.
- Pokožka si musí na silikon postupně zvyknout.
- Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, používejte náplast minimálně 12 a maximálně 20 hodin denně.
- Pokud potřebujete, můžete Scarban® silikonovou náplast nastříhat na požadovanou velikost (obr. 1).
- Dbejte na to, aby Scarban® silikonová náplast přesahovala na každé straně o 2 cm za okraje jizvy.
- Odstraňte ochlupení v blízkosti jizvy, aby náplast lépe držela a měl větší trvanlivost.
- Před použitím náplasti jizvu a kůži v jejím okolí důkladně omyjte a vysušte (obr. 2).
- Sejměte ochrannou folii ze zadní strany náplasti (obr. 3) a opatrně nalepte Scarban® silikonovou náplast na jizvu (obr. 4). Pokud je to nutné, můžete náplast zafixovat na místě pomocí adhezivního nebo elastického obvazu (obr. 5).
- Po odstranění silikonové náplasti pokožku ošetřete hydratačním krémem.

Péče o náplasti:

- Scarban® silikonové náplasti se musí každý den důkladně čistit, aby byla zachována jejich lepicí schopnost.
- Kápněte na silikonovou náplast několik kapek čistícího prostředku Scarban® Silicone Cleaning Soap nebo jiného neutrálního prostředku. (obr. 6).
- Odstraňte co nejvíce nečistot čistícím prostředkem a vlažnou vodou.
- Silikonovou náplast důkladně opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou (obr.7).
- Lepicí schopnost náplasti se po kontaktu s mýdlem a vodou sníží a náplast se sroluje (obr. 8).
- Silikonovou náplast nechte uschnout na suchém a čistém povrchu, lepicí stranou nahoru (obr. 8).
- Při usychání se náplast narovná a začne znovu postupně lepit.
- Náplast použijte, až když je zcela suchá.
- Pokud se odlepují okraje z důvodu opotřebení, můžete je odstříhnout.

Jak dlouho mám používat silikonové náplasti Scarban®?

- Scarban® silikonové náplasti používejte tak dlouho, dokud jizva zraje, je zarudlá nebo přetrvávají problémy.
- O délce trvání léčby se poraďte se svým lékařem.

Doba použití:

- Každé balení Scarban® obsahuje 1 nebo více silikonových náplasti.
- Při správném používání a čištění (podle pokynů k použití) vystačí každé balení na 6 až 8 týdnů léčby.
- Z hlediska dlouhodobé terapie budete možná potřebovat několik balení.

Zvláštní upozornění a opatření:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pouze pro zevní použití.
- Scarban® silikonové náplasti používejte pouze na zhojenou, uzavřenou kůži (po odpadnutí strupů) a nikdy nepoužívejte na otevřené rány.
- Scarban® silikonové náplasti nikdy nesušte na slunci ani v blízkosti tepelného zdroje.
- Při plavání nebo sportu si Scarban® silikonovou náplast sundejte. Pot nebo kontakt s vodou může způsobit odlepení náplasti Scarban®.

Nežádoucí účinky:

- Ve vzácných případech, může kůže na silikon reagovat hypersenzitivně (podráždění pokožky). V takových případech léčbu přerušete, dokud se pokožka nezklidní.
- Začněte znovu s ošetřením a nechte kůži, aby si na náplasti Scarban® postupně zvykala (každý den o hodinu déle).
- Pokud problémy přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Pokud dojde v souvislosti s používáním produktu k jakýmkoliv závažným nežádoucím účinkům, je nutné tyto oznámit výrobci a kompetentním orgánům (v příslušném státě), kde k nim došlo.

Skladování:

- Datum expirace je uvedeno na obalu.
- Skladujte při teplotách 5 – 25 °C.

Datum poslední revize pokynů k použití:

Duben 2020

Scarban®

profesionální péče o jizvy

PROTOŽE KAŽDÁ JIZVA POTŘEBUJE PÉČI!

www.scarban.eu

www.jizvy.eu



PATENT
PENDING
MEDICAL DEVICE



UV PROTECTION



SCARPRO N.V.
Lobulckstraat 3,
BE-9880 Aalter.

MADE IN BELGIUM
Email: info@scarban.eu
www.scarban.eu



SB-C-Section-FLU-004