

Zasady bezpieczeństwa i higieny przy korzystaniu z aparatu i maski CPAP

1. Dezynfekcja sprzętu

Wszystkie nasze urządzenia są oczyszczane za pomocą ozonowania. Maski są myte lub moczone w specjalnych preparatach biobójczych, dlatego dodatkowe środki ochrony podczas ich użytkowania nie są konieczne.

Dla osób obawiających się takiego sposobu dezynfekcji dostępny jest (za dodatkową opłatą) filtr antybakteryjny, który można zamontować między rurą a maską. Chroni on przed drobnoustrojami, ale uniemożliwia korzystanie z funkcji nawilżania.

Osoby, które nadal mają wątpliwości, mogą zakupić nową maskę na własny użytek.

2. Zasady dotyczące nawilżacza

Do nawilżacza należy używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej. Trzeba przestrzegać oznaczenia poziomu „Max” widocznego na nawilżaczu i codziennie wymieniać wodę.

3. Transport aparatu z nawilżaczem

Nie wolno przenosić ani przechylać urządzenia z napełnionym nawilżaczem. Przed transportem należy zawsze opróżnić wodę, aby uniknąć zalania i uszkodzenia sprzętu.

4. Zakaz palenia

W pomieszczeniu, gdzie przechowywany jest aparat, torba lub akcesoria, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli urządzenie zostanie zanieczyszczone dymem tytoniowym, użytkownik poniesie koszty zakupu nowego sprzętu.

5. Czyszczenie maski

Codziennie należy myć silikonową część maski, która styka się z twarzą lub nosem. Paski i uprząż można prać ręcznie, zgodnie z potrzebami. Do mycia należy używać ciepłej wody oraz delikatnego detergentu, np. płynu do naczyń.

6. Czyszczenie rury i nawilżacza

Raz w tygodniu zaleca się mycie rury oraz nawilżacza ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Po umyciu należy dokładnie osuszyć elementy przed kolejnym użyciem.

Instrukcja obsługi aparatów CPAP

1. Tryb automatyczny

Aparat działa w trybie automatycznym. Po założeniu maski wystarczy go włączyć, a po zakończonej terapii wyłączyć przyciskiem.

2. Regulacja wilgotności

W urządzeniach wyposażonych w nawilżacz można ustawić poziom wilgotności za pomocą menu aparatu. W razie potrzeby można również skontaktować się z naszą obsługą, aby uzyskać pomoc.

3. Podłączenie do prądu

Aparat powinien być stale podłączony do źródła zasilania, co pozwala na przesyłanie danych dotyczących terapii.

4. Zdalna konfiguracja

Większość naszych urządzeń posiada moduł SIM, umożliwiający zdalne dostosowanie parametrów terapii przez internet w zależności od potrzeb użytkownika.

Wymagana kaucja przy wypożyczeniu sprzętu

1. Wypożyczenie samego aparatu

W przypadku wypożyczenia samego aparatu CPAP wymagane jest wniesienie kaucji w wysokości **500 zł**. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu okresu wypożyczenia, pod warunkiem, że sprzęt nie zostanie uszkodzony ani zanieczyszczony w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.

2. Wypożyczenie aparatu z nawilżaczem

W przypadku wypożyczenia aparatu CPAP z nawilżaczem kaucja wynosi **900 zł**, w tym **500 zł za aparat** i **400 zł za nawilżacz**. Podobnie jak w przypadku samego aparatu, kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu wypożyczenia, o ile sprzęt będzie w dobrym stanie.