

ZESTAW DO CZYSZCZENIA USZU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Pamiętaj, aby ostrożnie umieścić końcówkę w uchu, aby uniknąć uszkodzenia błony bębenkowej.
2. Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz czynną infekcję ucha, pęknięty bębenek(błonę bębenkową) lub podrażnienia, wysypkę itp.
3. Podczas czyszczenia uszu za pomocą tego urządzenia osoba musi pozostać w pozycji siedzącej, w pozycji pionowej, z głową utrzymaną prosto.
4. W przypadku wystąpienia krwawienia, podrażnienia lub jakiegokolwiek urazu należy natychmiast przerwać stosowanie.
5. Natychmiast przerwij stosowanie i zasięgnij pomocy lekarza, jeśli podczas stosowania poczujesz ból.
6. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Przeczytaj uważnie instrukcję. Nie bierzemy za siebie odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, które mogą zostać spowodowane przez nasze produkty.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

JAK STOSOWAĆ

A. PRZYGOTOWANIE ROZTWORU MYJĄCEGO

1. Używaj wyłącznie letniej wody, aby uniknąć zawrotów głowy lub innego dyskomfortu.
2. Dobry efekt można uzyskać zarówno wodą, jak i wodą utlenioną w odpowiednich proporcjach z octem lub nadtlenkiem wodoru.
3. Napełnij butelkę ciepłą wodą i załóż rozpylacz. Nakręć jednorazową końcówkę na dyszę.

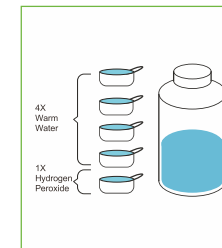

B. ETAP MYCIA

1. Przykręć część rozpylającą i przetestuj system, spryskując miskę.
2. Utrzymuj ręce w czystości. Posadź pacjenta, aby zapobiec wypadkom przy zawrotach głowy.
3. Załóż czysty ręcznik na ramiona, aby zapobiec zamoczeniu.
4. Umieść miskę pod uchem, które ma być nawadniane, aby zebrać spływającą wodę.
5. Ostrożnie włóż końcówkę czyszczącą do przewodu słuchowego i powoli pompuj. Powinien być lekki ucisk, ale bez bólu.
6. Poruszaj końcówką w różnych kierunkach, aby poluzować zablokowany воск. Uderzony воск może nie poluzować się natychmiast. Poczekaj kilka minut, aż blokada stanie się miękka.
7. Po irygacji, przechylić głowę w stronę chorego ucha i poczekać, aż roztwór spłynie z ucha.
8. Użyj gruszki do uszu, aby usunąć nadmiar wody w uchu.
9. Osusz i oczyść ucho zewnętrzne ręcznikiem i odpocznij przez kilka minut, aby zapobiec zawrotom głowy podczas wstawania.
10. Odkręć końcówkę czyszczącą i wyrzuć ją. Końcówki czyszczące są przeznaczone do jednorazowego użytku.
11. Umyj i wyczyść pompkę do butelki, rurki i miskę. Wysuszyć i przechowywać w czystym miejscu.

