

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Wyprodukowano w Polsce
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Pas brzuszny pooperacyjny MEK 3002



Wyrób medyczny: Brzuszny pas podtrzymujący, wielokrotnego użytku

Wersja: Pas brzuszny pooperacyjny (MEK 3002)

1. Opis:

- Wyrób medyczny wykonany jest z oddychającego, hipoalergicznego materiału kompozytowego, co pozwala na stosowanie go zarówno na odzież, jak i bezpośrednio na ciele.
- Anatomiczny kształt sprawia, że użytkowanie pasa jest tak bezpieczne i komfortowe, jak to tylko możliwe.
- Uniwersalność konstrukcji pozwala na zastosowanie bandaża zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 7 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Zapewnia prawidłowe tworzenie się blizny pooperacyjnej dzięki stabilizacji i równomiernemu, elastycznemu uciskaniu przedniej ściany brzucha.
- Ucisk i wzmocnienie powłok brzusznych w okolicy rany pooperacyjnej zapobiega tworzeniu się i progresji przepuklin brzusznych.
- Zmniejsza ból, zapewnia wczesną mobilizację i skraca okres rehabilitacji.

IFU_3002_v1

- Pas może być wykorzystywany przez kobiety w okresie poporodowym, gdyż wzmacnia nadmiernie rozszerzone w okresie ciąży powłoki brzuszne.

3. Wskazania do stosowania:

- Okres pooperacyjny po zabiegach na narządach jamy brzusznej, abdominoplastyce.
- Zapobieganie przed rozejściem się szwów pooperacyjnych i powstawaniu przepuklin.
- Osłabienie i rozluźnienie powłok brzusznych, obecność przepuklin brzusznych.
- Okres rehabilitacji po cięciu cesarskim.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału, z którego jest wykonany produkt.

5. Instrukcja obsługi:

1. Wybierz rozmiar zgodnie z tabelą, po uprzednim zmierzeniu obwodu talii.

XS	obwód pasa	64-72 cm
S		72-80 cm
M		80-90 cm
L		90-100 cm
XL		100-110 cm
XXL		110-120 cm
XXXL		120-130 cm

2. Załóż pas bez naciągania w stanie niepełnego wdechu leżąc na plecach.
3. Zapiąć rzepy stopniowo od góry do dołu.
4. Czas noszenia pasa określa lekarz prowadzący

IFU_3002_v1

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapnij wszystkie rzepy.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.




Kolor: czarny, beżowy

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa

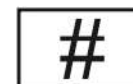

3002



FU_3002_v1