

INSTRUKCJA UŻYWANIA

KRZESŁO TOALETOWE MICHAEL 805

Nr katalogowy	RF-805
Całkowita długość	64 cm
Całkowita szerokość	51 cm
Całkowita głębokość	59,5 cm
Szerokość siedziska	49,5 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Zakres regulacji wysokości siedziska	41 – 56,3 cm
Max waga użytkownika	120 kg
Waga krzesła	6 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Krzesło toaletowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesła można użytkować przy łóżku pacjenta. Pomaga osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i starszym w podstawowych czynnościach fizjologicznych. Ułatwia też opiekę nad nimi. Barierek ułatwiających wstawanie z krzesła i siadanie na nim.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed korzystaniem z krzesła toaletowego upewnić się, że:
 - wysokość krzesła jest odpowiednio wyregulowana;
 - przyciski blokujące działają poprawnie;
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - wszystkie stopki krzesła ustawione są na tej samej wysokości
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
- Nie przechowywać krzesła w temperaturze poniżej 0°C.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
- Podczas otwierania opakowania sprawdź integralność kompletu i czy nie wykazuje on żadnych nieprawidłowości, skontaktuj się z dystrybutorem, u którego go kupiłeś.
- Podczas użytkowania krzesła należy ustawić na płaskiej, niezawilgoconej lub śliskiej powierzchni.
- Sprawdź poprawność mocowania zdejmowanych nóżek oraz klipsów regulujących wysokość.
- Zawsze przed użyciem zwracaj uwagę na wagę pacjenta, która nie może przekraczać udźwigu zadeklarowanego przez producenta.



Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

SIADANIE I WSTAWANIE

- Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
- Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
- Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na podłokietnikach.
- Powoli siadaj na krzesło, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
- Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki krzesła, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzać czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części krzesła toaletowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła toaletowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Krzesło toaletowe po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.
3. Wskazane jest okresowe sprawdzanie komfortu i szczelności spoin.
4. Sprawdź działanie zacisków mocujących, śrub i zużycie końcówek.
5. Czyścić nieagresywnymi detergentami.
6. W przypadku dezynfekcji stosować środki na bazie alkoholu.
7. Udogodnienie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

MONTAŻ

1. Zamontuj boczne ramy krzesła (rys. 1).
2. Włóż śruby w dolne otwory (rys. 2).
3. Dołącz poprzeczkę łączącą na tyle krzesła (rys. 3).
4. Dokręć śruby motylkowe (rys. 4).
5. Dołącz poprzeczki do wiadra (rys. 5).
6. Zamontuj poprzeczkę łączącą na przodzie krzesła (rys. 6).
7. Zamocuj oparcie i przykręć za pomocą śrub motylkowych (rys. 7 i rys. 8).
8. Włóż wiadro do ramy (rys. 9).
9. Zamontuj deskę toaletową (rys. 10).
10. Zamontuj kłapkę (rys. 11).
11. Sprawdź stabilność krzesła (rys. 12).



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4



rys. 5



rys. 6



rys. 7



rys. 8



rys. 9



rys. 10




rys. 11



rys. 12

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach krzesła. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką (rys. 13), drugą przesunij rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzasknij przycisk blokujący.

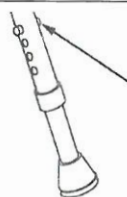

rys. 13

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

klapka	PE (polietylen)
podłokietnik	PE (polietylen)
deska toaletowa	PE (polietylen)
rama	stal
nasadka	PVC (polichlorek winylu)
pokrywka	PVC (polichlorek winylu)
wiaderko	PVC (polichlorek winylu)
nasadka stabilizująca	PVC (polichlorek winylu)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie

KARTA GWARANCYJNA

KRZESŁO TOALETOWE MICHAEL 805

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Krzesło jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że krzesło było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją krzesła opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia krzesła np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku niezasadzonego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					