

VenenWalker® » basic «



Instrukcja obsługi

PL

by GlobalMIND®

Gratulujemy wyboru produktu VenenWalker® »basic«!

VenenWalker® »basic« jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, które może pomóc w zapobieganiu chorobom żylnym i zmniejszyć ryzyko powstania pajączków i żylaków. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem!

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące VenenWalker® »basic«, skontaktuj się z nami przez stronę internetową: www.venenwalker.com

Życzymy powodzenia przy korzystaniu z VenenWalker® »basic«.

Pozdrowienia,
GlobalMIND!



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Jeśli urządzenie jest przekazywane komuś innemu, zawsze powinno zostać przekazane z instrukcją obsługi. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przestrzegane! Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji urządzenia, opakowania lub załączonej dokumentacji w dowolnym momencie w związku z naszą polityką ciągłego rozwoju.

Znaczenie symboli w instrukcji obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa są oznaczone tym symbolem. Przeczytaj je uważnie i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych.



Wskazówki, uwagi i zalecenia są oznaczone tym symbolem.



Symbol urządzeń z klasą ochrony III. Urządzenia o tej klasie ochrony działają z bardzo niskim bezpiecznym napięciem.

Spis treści

Przeznaczenie	4
Instrukcje bezpieczeństwa	4
Właściwe obchodzenie się z bateriami.....	4
Niebezpieczeństwo obrażeń.....	4
VenenWalker® »basic« od GlobalMIND.....	5
Historia IPC (kompresja przerywana pneumatyczna)	6
Zasada IPC.....	7
Korzyści z IPC	8
Zastosowanie.....	9
Przeciwwskazania.....	10
Zawartość opakowania i przegląd urządzenia	11
Przegląd jednostki sterującej.....	12
Uruchamianie urządzenia.....	13
Wkładanie/wymiana baterii	13
Podłączanie zasilacza sieciowego	13
Korzystanie z urządzenia	14
Po zakończeniu korzystania	15
Czyszczenie i pielęgnacja	15
Dodatkowe informacje na temat VenenWalker® »basic«	16
Dane techniczne	18
Inne informacje	18
Utylizacja	19

Przeznaczenie

- ☐ Urządzenie VenenWalker® »basic« może być używane tylko w celu odblokowania zatorów w obszarze stopy i dolnej części nogi. Jeśli masz takie wskazania medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem!
- ☐ Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
- ☐ Trzymaj urządzenie z dala od wilgotnych i mokrych obszarów.

Instrukcje bezpieczeństwa



Właściwe obchodzenie się z bateriami

- ☐ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy styki w urządzeniu i akumulatorach są czyste; wyczyść je, jeśli to konieczne.
- ☐ Używaj tylko baterii określonych w danych technicznych.
- ☐ Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie. Nie używaj baterii różnych typów lub marek ani baterii o różnych pojemnościach. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+ / -).
- ☐ Wyjmij baterie z urządzenia, gdy są rozładowane lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Zapobiegnie to uszkodzeniom, które mogą wystąpić w przypadku wycieku z baterii.
- ☐ Natychmiast usuwaj zużyte baterie z urządzenia. Oczyszczyć styki przed włożeniem nowej baterii.
- ☐ Baterie nie mogą być ładowane ani reaktywowane w inny sposób, zdemontowane, wrzucone do ognia, zanurzone w płynach lub zwierane.



Niebezpieczeństwo obrażeń

- ☐ Trzymaj urządzenie i opakowanie dala od dzieci i zwierząt. Istnieje ryzyko zranienia i uduszenia!
- ☐ Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) z zaburzeniami zdolności sensorycznych lub umysłowych lub które nie mają odpowiedniego doświadczenia i lub wiedzy o takich urządzeniach, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje od takiej osoby, jak korzystać z urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ☐ Urządzenia nie należy używać, jeśli jest uszkodzone.
- ☐ Używaj tylko akcesoriów dostarczonych z urządzeniem lub zalecanych przez oryginalnego producenta!

VenenWalker® »basic« od GlobalMIND

Kompleksowe urządzenie do masażu w celu zapobiegania dolegliwościom żylnym - w bardzo niskiej cenie.

Za dużo czasu w pozycji siedzącej, za dużo czasu w pozycji stojącej, złe odżywianie: zgodnie z szacunkami, 20% wszystkich Europejczyków skarży się na dolegliwości żylne, a ponad połowa cierpi na zaawansowane problemy żylne. Ta globalna choroba stylu życia rozpoczyna się nie-szkodliwie uczuciem mrowienia w nogach. Nogi stają się wtedy ciężkie, opuchnięte i zmęczone, pojawiają się pajęczki i żylaki. Cały układ sercowo-naczyniowy jest zagrożony i istnieje ryzyko wrzodów, zakrzepicy, zatorowości płucnej i niezdolności do pracy.

Jak przebiega choroba żylna? Żyły zbierają zużytą krew w tkance ciała i przenoszą ją z powrotem do serca. Mięśnie nóg i zastawki żylne napinają się i odpężają, zachowując się jak pompa do transportu krwi do żył. Jednakże, jeśli osoba stoi lub siedzi przez długi czas, lub nadmierne obciąża organizm z powodu nadwyrżki masy ciała prowadzi do zatorów, krew nie może prawidłowo przepłynąć, a ściany żyłne są nadmiernie rozciągnięte. Obrzęk nóg jest tego wynikiem. Obrzęk w nodze tworzy się ze względu na to, że płyn i białko przechodzą przez rozluźnioną ścianę żylną i do tkanki. Należy pilnie skonsultować się z lekarzem w momencie, gdy takie zatory żyłne stają się ciągłym problemem. Leki nie są w stanie zapobiec zatorom, ani odwrócić nieprawidłowego rozluźnienia żył. Pończochy chirurgiczne są sprawdzonym sposobem na wzmocnienie osłabionej tkanki od zewnątrz i zapobieganie obrzękom nóg. Jednak powinny być noszone przez cały czas.

"Vein walking", szczególny rodzaj sportu, który jest bardzo popularny w USA, szczególnie stymuluje krążenie w żyłach i trenuje wszystkie ważne mięśnie. Ten trening jest skuteczny tylko wtedy, gdy ćwiczy się konsekwentnie. Specjalne masaże przy użyciu urządzeń do kompresji naprzemiennej okazały się szczególnie skuteczne i oszczędzają czas w leczeniu dolegliwości żylnych.

Venen-Walker® »basic« to pierwsze wszechstronnie skuteczne urządzenie do masażu, które może skutecznie zapobiegać dolegliwościom żylnym - i to w zaskakująco niskiej cenie. VenenWalker® »basic« składa się z urządzenia kontrolnego i dwóch mankietów o podwójnych ściągawkach, które obejmują również całe stopy, łącznie z podeszwami. Nogi są lekko masowane przez urządzenie VenenWalker® "basic" za pomocą pompującej poduszki powietrznej, która symuluje efekt pompowania mięśni nóg podczas ćwiczeń. Poprzez poprawę refluksu żylnego, zmagazynowany płyn jest mobilizowany i można go wypłukać.

VenenWalker® »basic« został opracowany w ścisłej współpracy ze specjalistami medycznymi (flebotomistami), jest łatwy w użyciu i, jeśli jest właściwie stosowany, jest całkowicie bezpieczny i nie powoduje żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Cały zestaw zawiera urządzenie do masażu i dwie nogawki, oraz szczegółową i łatwą do zrozumienia instrukcję obsługi.

Komentarze specjalistów:

Dr med. Frank Sömmmer, lekarz rodzinny i flebotomista (lekarz ze specjalistyczną wiedzą z zakresu zaburzeń żylnych), z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom żylnym oraz dyrektor medyczny Instytutu Terapii Ciepłej w Lubece, miał następujące zdanie na temat GlobalMIND VenenWalker®:

"VenenWalker Basic z krótkimi nogawkami jest bardzo łatwy w użyciu i może prowadzić do dobrego wzrostu ruchu żylnego z dolnych partii nóg, ponieważ pobudza to ważną pompę mięśniową łydki."

Historia IPC (kompresja przerywana pneumatyczna)

Zasada przerywanej kompresji pneumatycznej wywodzi się od "masażu ręki". W 1899 r. opublikowano już raport o specjalnym leczeniu obrzęków limfatycznych w kończynach górnych (ramionach). Tutaj kończyny zostały zanurzone w żelaznym cylindrze wypełnionym ręką.

W 1917 r. Zwiększono ciśnienie w komorze pneumatycznej, aby "wydalić zastoły krwi żyły". W roku 1929 po raz pierwszy w leczeniu obłożnie chorych na troficzne owrzodzenie zastosowano "... sporadyczne pompowanie i opróżnianie poduszek powietrznych".

W Klinice Uniwersyteckiej w Lipsku przewlekłe zaburzenia krążenia żylnego z zaostreniami (stwardnieniem) i owrzodzeniem były leczone z rytmiczną zmianą przepływu krwi tętniczej od początku lat 30.

Mniej więcej w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych podejmowano próby leczenia następstw chorób okluzyjnych tętnic z zastosowaniem przerywanej kompresji.

Równolegle z coraz większym zastosowaniem klinicznym IPC, równoważne urządzenia były dalej rozwijane na poziomie technicznym aż do dzisiejszego systemu wielokomorowego do leczenia ciężkich obrzęków limfatycznych.

Zasada IPC

Sporna (naprzemienna) kompresja, która nie jest generowana przez masaż manualny, ale raczej przez urządzenie, jest znana w medycynie jako przerywana kompresja pneumatyczna lub IPC. Wykorzystuje zasadę pneumatycznych naprężeń przemiennych. Jest przepisywany przez lekarzy w leczeniu chorób żylnych lub limfatycznych. Stosowany w celu zapobiegania zakrzepicy i urazom sportowym nie wiąże się z ryzykiem związanym z leczeniem farmakologicznym.

IPC symuluje działanie naturalnych pomp mięśniowych występujących w ludzkim ciele. Na przykład powietrze pompowane jest naprzemiennie na mankiety o podwójnych ściankach. Ciśnienie jest zwiększane i zmniejszane w określonych segmentach czasowych. Powinno być możliwe dostosowanie poziomu ciśnienia do potrzeb użytkownika, a ciśnienie nigdy nie powinno przekraczać 100 mmHg. Czas trwania i częstotliwość leczenia zależą od stanu zdrowia osoby, gdy są stosowane w celach kosmetycznych lub zgodnie z zaleceniami lekarza, gdy są stosowane z powodów medycznych. Leczenie powinno trwać co najmniej 20 minut. Wszelkie zastosowania medyczne powinny być nadzorowane przez lekarza. Istotny jest kształt i rodzaj użytego mankietu. Ze względu na udowodnione znaczenie odwodnienia sieci żył w podszwach, mankiety powinny pokrywać zarówno całą nogę, jak i stopę.

Rytmiczny wzrost i spadek ciśnienia w tkance prowadzi do wypompowania wody i białka z tkanki śródmiąższowej. Jeśli pacjent ma wskazania medyczne, należy zastosować opatrunek uciskowy lub po założeniu IPC należy założyć pończochę chirurgiczną, ponieważ białko reszkowe powoduje, że surowica krwi płynie z naczyń włosowatych do tkanki po sesji leczenia IPC. Ten środek zapobiega występowaniu tego przepływu. W przypadku korzystania z urządzenia w domu warto skorzystać z niego przed snem.

Korzyści z IPC

- Udoskonalenie żylnego i limfatycznego makrokrążenia poprzez bierną aktywację naturalnej pompy mięśniowej
- Poprawa mikrokrążenia skóry, tkanki łącznej i mięśni
- Poprawa charakterystyki przepływu krwi
- Pozytywne efekty przepływowo-mechaniczne
- Wzrost białka antykoagulacyjnego we krwi C
- Znaczna poprawa bólu
- Znaczny impuls w procesie gojenia ran
- Szybszy efekt przeciwbólowy w przypadku zatrzymania płynów tkankowych (obrzęki) po zabiegu - możesz szybciej wstać z łóżka
- Może wspomagać gojenie owrzodzeń podudzi
- Korzystny wpływ na przetoki w układzie limfatycznym
- Mniejsze ryzyko niż inne metody
- Bezbolesne, wygodne, nieskomplikowane i doskonałe tolerowanie

Zastosowanie

Dla celów kosmetycznych

- Obrzęk nóg spowodowany brakiem ruchu, na przykład ze względu na dłuższe przerwy w pracy biurowej lub z powodu długich podróży.
- Nienaturalna reprodukcja tkanki łącznej (włóknienia)
- Obrzęk nóg spowodowany przez chorobę lub * ciążę
- W przypadku żylaków
- Do bólu mięśni

Do celów medycznych (profilaktyka)

- Opuchnięte nogi po rozpoznaniu medycznym
- Zapobieganie dolegliwościom żylnym, takim jak żylaki
- Zapobieganie żylakom z powodu ciąży
- Zapobieganie zatorom z powodu obłożnie chorych
- Obrzęk limfatyczny
- Zatory spowodowane urazem stawów lub nadmiernym wysiłkiem, np. krwiak przez uraz sportowy
- Obrzęk po wyciągnięciu mięśni lub skręceniu
- Choroba wrzodowa dolnych kończyn spowodowana zaburzeniem krążenia żylnego
- Aby wspomóc proces gojenia ran po operacji

* Podczas korzystania z tego urządzenia w czasie ciąży należy pamiętać o następujących kwestiach: jeśli zauważysz zwiększoną częstotliwość tętna lub trudności w oddychaniu, należy przerwać korzystanie z urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie korzystaj z IPC - lub używaj go tylko po konsultacji z lekarzem - jeśli masz:

- Ostre stany zapalne
- Otwarte obrażenia
- Problemy z sercem i zatrzymaniem płynów w nogach
- Zaawansowaną chorobę tętnic
- Podejrzenie zakrzepicy
- Nowotwory złośliwe
- Obrzęki płucne
- Wysokie ciśnienie krwi

Zawartość opakowania i przegląd urządzenia



1. 2x mankiety na nogawkach
2. Jednostka sterująca
3. Worek do przechowywania
4. 2x rurki powietrzne
5. Adapter sieciowy

Nie pokazane:

- Baterie demonstracyjne 4x 1,5 V, typ AA

Przegląd jednostki sterującej



1. Tuba powietrza do napełniania mankietów
2. Regulator ciśnienia
3. Przełącznik włącz/wyłącz
4. Lampka kontrolna włączenia/wyłączenia
5. Przyłącze tuby powietrza do opróżniania mankietów na nogach

Uruchamianie urządzenia

Urządzenie może być zasilane z baterii lub z dostarczonego zasilacza sieciowego. Przed użyciem włóż baterie lub podłącz zasilacz sieciowy.

Wkładanie/wymiana baterii

Komora baterii znajduje się z tyłu jednostki sterującej. Będziesz potrzebował czterech baterii 1,5 V AA. Używaj tylko standardowych baterii, nigdy akumulatorów! Cztery baterie są już dołączone do tego urządzenia w momencie dostawy. Dostarczone baterie demonstracyjne mają wystarczającą moc, aby obsługiwać urządzenie przez ok. 20 minut. Usuń zabezpieczenie transportowe przed pierwszym użyciem.

1. Otwórz komorę baterii.
2. Włóż cztery baterie 1,5 V typu AA. Podczas wkładania baterii upewnij się, że biegunowość (+/-) jest prawidłowa.
3. Następnie zamknij komorę baterii.

Twój VenenWalker® »basic« jest teraz gotowy do użycia!



Podłączanie zasilacza sieciowego

1. Podłącz zasilacz sieciowy do sterownika. Gniazdo podłączenia znajduje się poniżej obszaru do otwierania komory baterii.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, które odpowiada danym technicznym urządzenia (patrz rozdział "Dane techniczne").

Twój VenenWalker® »basic« jest teraz gotowy do użycia!

Korzystanie z urządzenia



UWAGA!

- ☐ Aby nie uszkodzić komór powietrznych, nie zginaj mankietów! Ostrożnie złóż je po użyciu i schowaj.
- ☐ Nie zamykaj suwaków na nogawkach podczas użytkowania, ponieważ w przeciwnym razie mankiety mogłyby zostać uszkodzone.
- ☐ Upewnij się, że urządzenie jest zawsze nie osłonięte i nie jest przykryte kocem ani innymi przedmiotami.

Urządzenie może być zasilane zarówno bateriami, jak i dostarczonym zasilaczem sieciowym. Aby podłączyć zasilacz sieciowy lub włożyć baterie, przeczytaj rozdział "Uruchamianie urządzenia".



1. Załóż mankiety na nogę ze złączami do przewodów powietrznych skierowanymi na zewnątrz.
2. Podłącz tuby powietrzne do połączeń na mankietach na nogi. Upewnij się, że rury są prawidłowo podłączone i nie mogą się wysunąć.



3. Podłącz wtyczkę przewodów powietrznych do złącza na jednostce sterującej w celu nadmuchania mankietów.
4. Ustaw regulator nacisku na ustawienie maksymalne.
5. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Lampka kontrolna włączania/wyłączania świeci się natychmiast po włączeniu urządzenia.
6. Mankiety na nogach są teraz napompowane na przemian. Jeśli nacisk na twoją nogę jest zbyt silny lub jeśli jest nieprzyjemny, ustaw regulator nacisku na niższe ustawienie. Idealne ustawienie ciśnienia powinno być silne, ale nie nieprzyjemne.

Jak to działa:

Twoje nogi są masowane przez rytmiczne i naprzemiennie pompujące i wypuszczające poduszki powietrzne. Masowanie twoich nóg ma ten sam wpływ na twoje żyły i mięśnie, co nieco męczący spacer. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nogi powinny być ustawione poziomo lub podniesione podczas użytkowania, aby krew mogła krążyć bez przeszkód. Zalecamy używanie urządzenia przez około 20-30 minut.



Zwróć uwagę, że nogi są masowane jedna po drugiej przez poduszki powietrzne pompowania i wypuszczania powietrza, a nie jednocześnie. Nacisk powstaje najpierw w jednym mankiecie na nogę, a następnie na drugim. Nie oznacza to, że urządzenie jest wadliwe!

Po zakończeniu korzystania

Po zakończeniu użytkowania należy usunąć powietrze z mankietów.

1. Ustaw regulator ciśnienia na najwyższym poziomie.
2. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Lampka kontrolna zgaśnie.
3. Odłącz wtyczkę przewodu powietrza z górnego gniazda na jednostce sterującej.
4. Teraz podłącz wtyczkę przewodów powietrznych do złącza z boku jednostki sterującej.



5. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Lampka kontrolna włączania/wyłączania świeci się natychmiast po włączeniu urządzenia. Powietrze jest wypompowywane z mankietów na nogach.

6. Po wypompowaniu powietrza otwórz rozprek i zdejmij nogawki.

7. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

8. Jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazda sieciowego i urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja



UWAGA!

- ☐ Trzymaj urządzenie w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi wahaniami temperatury.
- ☐ Do czyszczenia urządzenia nie używaj żrących ani ściernych środków czyszczących. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przed czyszczeniem zawsze usuwaj rurki powietrzne z mankietów na nogi i ze sterownika. Mankiety na nogi można czyścić lekko wilgotną ściereczką i detergentem domowym. Jeśli mankiety na nogi są używane przez więcej niż jedną osobę i jeśli mają bezpośredni kontakt ze skórą, należy zdezynfekować mankiety standardowym środkiem dezynfekującym, aby uniknąć zanieczyszczenia. Konieczne jest upewnienie się, że żadna wilgoć nie dostaje się do otworów wlotu i wylotu powietrza. W przypadku długiego używania końcówki rur mogą się rozszerzać, a powietrze może wycieć. W takim przypadku możesz odciąć krótki kawałek końcówek. Delikatnie zwijaj mankiety. Zagięcie mankietów zbyt dużą siłą może doprowadzić do pęknięć. Zalecamy czyszczenie jednostki sterującej tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne! Czyść jednostkę sterującą wilgotną szmatką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością detergentu domowego.

Dodatkowe informacje na temat VenenWalker® »basic«

Korzyści

- Bezawaryjna opcja niskiego ryzyka wspomagania leczenia obrzękniętego przy użyciu opatrunków do kompresji
- Łatwy w użyciu
- Mankiety rozciągające się od stóp do kolan są rytmicznie naprzemiennie napompowane i opróżniane
- Powietrze jest automatycznie usuwane z mankietów po przełączeniu wtyczek
- Noga jest delikatnie masowana
- Symulacja funkcji mięśni nóg
- Nie tylko w przypadku problemów kosmetycznych lub urazów sportowych
- Również dla pacjentów starszych lub z nadwagą
- Można go wygodnie użytkować na co dzień w domu
- Może być również używany na wakacjach, po długim siedzeniu
- Ciągłe przyspieszenie żylnego przepływu na zewnątrz przez kilka godzin
- Zmniejszają się obrzęki, bóle i uczucie ciężkości nóg

Używaj zapobiegawczo w domu



UWAGA!

☐ W przypadku poważnych chorób skonsultuj się ze swoim lekarzem przed użyciem!

- Urazy sportowe
- Ból mięśni
- Kontuzje
- Skręcenia
- Krwiaki
- Pajęczki żyły
- Żylaki
- Proste przeciążenie żyłne
- Obrzęk
- Poczucie ciężkości
- Nieznaczne zaburzenia przepływu krwi tętniczej

Sporadyczna kompresja jest dobrze sprawdzona dla:

Choroby żyłne, tętnicze, limfatyczne i tkanki łącznej

Jakie są wyniki?

- Obrzęk jest zmniejszony
- Bóle zatorów ustępują
- Ucisk w żyłkach/pajęczkach jest zmniejszony, szerokość zmniejsza się
- Zawory żyłne po raz kolejny lepiej się zamykają
- Jest stosowany jako uzupełnienie leczenia obrzęków limfatycznych

Dane techniczne

Ciśnienie w mankiecie:	maksymalnie 120 mmHg
Napięcie zasilające	
W trybie zasilania sieciowego:	
Wejście:	100 V - 240 V ~
Wyjście:	6 V DC
Częstotliwość sieci:	50 Hz
Pobór prądu:	0,1 A
W trybie baterii:	
	6 V DC (4x baterie 1,5 V, typ AA)
Zakres temperatury	
- Działanie:	15 - 40° C
- Przechowywanie i transport:	0- 40° C
Wilgotność powietrza	
- Działanie:	30 - 75%
- Przechowywanie i transport:	10 - 80%
Wymiary:	80 mm (dł) x 45 mm (szer) x 190 mm (wys)
Waga:	około. 460 gramów
Stopień ochrony:	typ B 
Klasa ochrony:	III 



Znak CE potwierdza, że producent potwierdza zgodność produktu z obowiązującą dyrektywą WE i zgodność z "ogólnymi wymaganiami". Numer 0123 nawiązuje do wskazanej pozycji (certyfikatora). Obaj wspólnie potwierdzają, że dystrybutor przestrzegał niemieckiej ustawy o urządzeniach medycznych (MPG).

Inne informacje

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące VenenWalker® »basic«, skontaktuj się z nami przez stronę internetową: www.venenwalker.com

Utylizacja



Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Zutilizuj go w sposób przyjazny dla środowiska i zanieś do punktu recyklingu.



Pozbywaj się urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska. Nie należy go wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Zutilizuj go w punkcie recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Możesz uzyskać więcej informacji od władz lokalnych.



Baterie, które nie nadają się do ponownego naładowania, powinny zostać usunięte przed utylizacją urządzenia i wyrzucone oddzielnie od urządzenia. Aby chronić środowisko, baterie jednorazowego użytku i baterie wielokrotnego ładowania nie mogą być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, ale należy je zabrać do odpowiednich punktów zbiórki. Zwróć

także uwagę na odpowiednie przepisy ustawowe regulujące usuwanie baterii.

GlobalMIND[®]
consumer electronics GmbH

11.2013 GlobalMIND GmbH, Ernst-Mantius-Str.11, 21029 Hamburg – Germany