

Prezerwatywy PASANTE NATURELLE Paczka 72 szt Kondomy z Poszerzoną Końcówką

✅ **Prezerwatywy Pasante Naturelle, wykonane z najwyższej jakości lateksu,** charakteryzują się bardziej anatomicznym kształtem niż zwykłe kondomy, co zapewnia dodatkowy komfort podczas zbliżeń.

✅ Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych materiałów i rygorystycznej technologii produkcji, **te prezerwatywy są niezwykle bezpieczne w trakcie stosunku oralnego, waginalnego oraz analnego.**

✅ **Dodatkowo, są delikatnie nawilżone specjalnym lubrykantem na bazie wody,** co zwiększa uczucie komfortu i przyjemności.

★ UWAGA

Przedmiotem aukcji jest oryginalnie zapakowana paczka 72 sztuk Pasante NATURELLE widoczna na zdjęciu.

★ SPECYFIKACJA

- ▶ Długość: 190 mm
- ▶ Szerokość: 54 mm
- ▶ Grubość: 65 mikronów
- ▶ Poszerzona końcówka
- ▶ Materiał: Naturalna Guma Lateksowa
- ▶ Struktura: Prezerwatywy Gładkie
- ▶ Kształt: Easy-On, Łatwe do Nałożenia
- ▶ Kolor: Przezroczyste

★ Instrukcja dla prezerwatywy (dodatkowo dołączona do aukcji w formie PDF)

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.
2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo - prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.

4. Usunąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzucić zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie spłukuj w toalecie.

Prezerwatywy posiadają certyfikat jakości CE oraz ISO.

Każda sztuka jest sprawdzana oraz testowana pod kątem jakości.

Data ważności: 1-4 lata.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Producent: Pasante Ltd. (UK) , Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. (MT), Podmiot prowadzący reklamę: Pasante Europe Ltd. (IE)