



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



LEWY

PRAWY

Numer kat. REF 202

Ortezy stopy

PODCIĄG

GUMOWY NA OPADAJĄCĄ STOPE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rozmiar: uniwersalny

Zastosowanie: Stosuje się go powszechnie w przypadku: stopy opadającej, w wyniku wiotkich porażen i niedowładów prostowników, w niewielkich niedowładach spastycznych z przewagą zginaczy stopy. Jest to orteza taśmowa przodostopia stabilizowana na opasce podkolanowej, wykonana ze skóry i taśmy gumowej. Jest lekki i łatwy do stosowania. Jest to sprzęt raczej domowy i szpitalny, mniej nadający się do zaopatrzenia wyjściowego.

Przeciwwskazania: Brak przeciwwskazań

Użytkowanie i regulacja: Zakładając podciąg po raz pierwszy, należy zapiąć opaskę na stopie, następnie założyć opaskę podkolanową i napiąć paski podciągu pod napięciem, koniecznym do uzyskania korekcji. Kolejne zakładanie i zdejmowanie nie wymaga dopasowywania. W czasie dopasowania ortozy tego typu, należy stosować nałożenie próbne na okres 15 – 20 minut, kiedy uwidaczniają się na skórze objawy miejscowego ucisku, po czym dokonuje się niezbędnej korekcji napięcia. Podeszwa i obcas buta powinny w pozycji stojącej opierać się równo na podłożu, świadczy to o poprawności uregulowania ortozy. Zbyt duże naciągnięcie regulacji taśmy gumowej spowoduje podniesienie przodostopia, co jest nieprawidłowe. W pozycji siedzącej chory powinien czuć się swobodnie i nie odczuwać przeszkód w zginaniu stawu kolanowego. Ucisk lub ból występujący przy zmianach pozycji lub chodzeniu świadczy o niedokładności i błędach w czasie zakładania.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Nie moczyc w wodzie, nie prać. Można myć delikatnie miękką tkaniną lub gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie, tak aby oczyścić powierzchnię nie moczając jej całej. Następnie wytrzeć suchym ręcznikiem. NIE WOLNO przechowywać ich przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie podciągu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

Trwałość i niezawodne funkcjonowanie podciągu w znacznym stopniu zależy od prawidłowej eksploatacji i kultury technicznej użytkownika. Zaleca się choremu zgłoszenie się do kontroli po paru dniach lub tygodniach, ponieważ powstają w tym czasie spowodowane stosowaniem podciągu zmiany w stanie fizycznym pacjenta, które wymagają często odpowiednich poprawek dopasowania. Często zależy od nich efektywność zaopatrzenia i wyniki postępowania.

Nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia. Unikać styczności z olejami oraz innymi agresywnymi środkami i oparami chemicznymi, gdyż mogą one pogorszyć właściwości stosowanych materiałów.

Niedopuszczalne są samodzielne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. W przypadku uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Wyrób medyczny zawiera tkanki pochodzenia zwierzęcego.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia taśm mocujących, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3