

INSTRUKCJA MONTAŻU



*„Dostałam wiele komentarzy na temat mojego
pięknego uśmiechu”*

**Nakładki na zęby IMAKO możesz zakładać i
zdejmować dowolna ilość razy bez potrzeby
wizyty u stomatologa.**



**Ładny uśmiech korzystnie wpływa na Twoje
samopoczucie i jakość życia.**

**Nakładka IMAKO nie jest produktem terapeutycznym,
ale może podnieść Twoją samoocenę w przystępnej
cenie. Dziękuję za zakup nakładki na zęby IMAKO.**



**Nakładka jest elastyczna i mocuje się bez użycia
kleju.**

- a) przednia warstwa stabilizuje pozycję**
- b) punkty między zębami blokują nakładkę na Twoich zębach**
- c) poprzez odginanie nakładki ,zdejmuje się ją i zakłada.**

Zdjęcie gotowej nakładki.



Potrzebne będą następujące przedmioty:
lustro, zegarek z sekundnikiem, czajnik z gotującą wodą, miseczka i
nożyczki do paznokci.

Zanim rozpoczniesz montaż nakładki, umyj ręce, umyj własne zęby i wyczyść
szczeliny między zębami nicią dentystyczną./delikatnie, żeby nie rozkrwawić dziąseł/

TERAZ KONIECZNIE OBEJRZYJ FILM INSTRUKTARZOWY !!!


<http://www.xindesigns.com/current/imako/dev/fitting-video.html>

POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, PUNKT PO PUNKCIE !!!


Rozpakuj nakładkę i **NIE** wkładaj jej do gorącej wody.
Przyłóż nakładkę do swoich zębów i sprawdź czy nie przeszkadza wędzidełko.
Jeśli tak, to podetnij delikatnie nakładkę w miejscu wędzidełka.

- WRZĄCĄ
1. Włóż do miseczki z ~~gorącą~~ ^{WRZĄCĄ} gorącą wodą /ok.90 stopni-~~C~~/ kawałek różowego plastiku
 2. Gdy będzie miękki /po ok.2 minutach/, wyjmij go przy użyciu łyżeczki i połóż na dłoni.
 3. Rozwałkuj na dłoni do grubości „makaronu spaghetti „ i szerokości własnej dłoni./można szerzej/ -zdjęcie poniżej.

ważne!-utrzymuj rozwałkowany kawałek różowego plastiku cały czas miękki, jeżeli trzeba to zanurz go ponownie w miseczce z gorącą wodą.

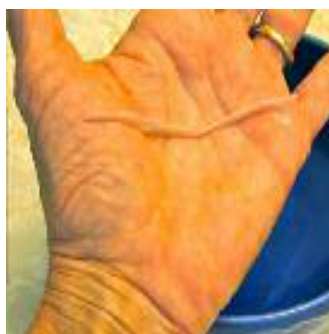


- WRZĄCĄ
4. Uchwyć nakładkę odwrotnie, trzymając za płytkę imitującą zęby i zanurz na chwilę w miseczce z ~~gorącą~~ ^{WRZĄCĄ} wodą..Trzeba zmiękczyć powierzchnię, by łatwiej skleić ze sobą obydwie **części**. /zdjęcie poniżej/

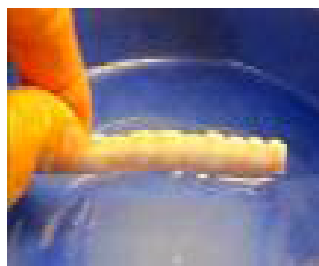

5. Przyłóż różowy kawałek „spaghetti” do tylnej, górnej krawędzi nakładki i delikatnie go dociśnij na całej długości. /zdjęcie poniżej/ Wystające poza nakładkę końce obetnij na równo z nakładką.




6. Umieść nakładkę stroną imitującą zęby do góry w miseczce z ^{WRZĄCĄ} gorącą wodą./około 90 stopni C /

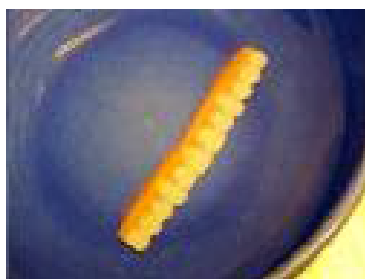

7. Gdy dolna warstwa zmieni kolor-stanie się przezroczysta, odlej wodę.

8. Teraz nakładka jest miękka. Spójrz w lustro. Odchyl swoją górną wargę i włóż nakładkę, zwracając szczególną uwagę by była pośrodku i w poziomie.

9. Dociśnij mocno nakładkę do każdego ze swoich zębów **tylko 1 raz**, uważając by się nie przesunęła/inaczej cała praca pójdzie na marne/Delikatnie unieś swoją wargę by sprawdzić czy różowy wałeczek „spaghetti” dotyka do Twoich dziąseł. **Nie** przyciskaj nakładki do swoich zębów cały czas, ponieważ trudno ją będzie później wyjąć nie uszkadzając odlewu. Upewnij się że nakładka dokładnie zasłania Twoje zęby lub maskuje ich brak.

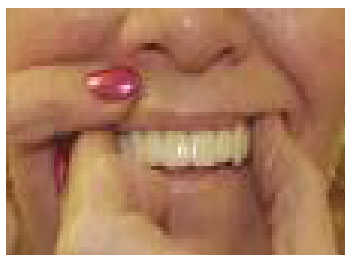

UWAGA ! Nie dotykać różową masą do części imitującej zęby.

10. Na wewnętrznej części nakładki, mogą powstać nadlewy, które trzeba delikatnie obciąć za pomocą nożyczek do paznokci.

11 Zrobione, nakładka jest gotowa do użycia.

GDY BRAKUJE CI ZĘBÓW

Musisz wypełnić miejsca po brakujących zębach.

a) Żeby to zrobić, rozpuść białe kulki, 2-3 sztuki na jeden brakujący ząb / woda o temperaturze ok. 90 stopni C /

b) Włóż nakładkę do ust.

c) Palcami wyczuj miejsce po brakującym zębie.

d) Wyjmij nakładkę z ust.

e) Podgrzej ją nad parą w miejscu gdzie wyczułaś brak zęba.

f) Włóż ponownie nakładkę do ust-uważaj żeby się nie poparzyć.


g) Wyjmij z miseczki z gorącą wodą rozpuszczoną białą masę po kulkach i włóż w brakujące miejsce po zębie. Uformuj ją na wzór zęba-obie masy /nakładka i biała masa po kulkach / muszą się ze sobą scalić.

UWAGA !!!

Biała masa po kulkach **NIE** może w żadnym wypadku dotykać imitacji zębów od przodu.

h) Każde miejsce po brakującym zębie należy wypełniać osobno /powtarzać czynności jak powyżej /

ZDJECIA POGLĄDOWE JAK WYGLĄDAJĄ WYPELNIONE MIEJSCA PO BRAKUJĄCYM ZĘBIE.

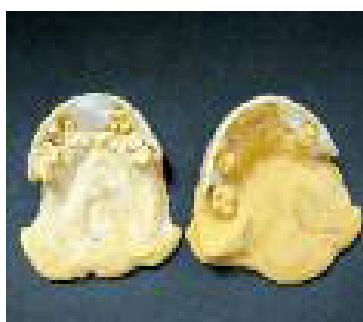

ŻYCZE PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić tel. 515-777-044
Zapraszam do dowiedzenia strony internetowej www.sztucznezeby.eu

**KRAJ POCHODZENIA :
USA**

**Importer:
A.D.I Adrian Zambrzycki
ul.Częstochowska 3a lok.2
02-344 Warszawa
Polska
tel.+48 790-386-286
email: sztuczne-zeby@wp.pl
www.sztuczne-zeby.com**