

Instrukcje Obsługi

Igła do pena insulinowego

C € 0197

[Struktura] Dla typu I, igła do pena insulinowego składa się z piasty igły, rurki igły, pojemnika na igłę, osłony igły i uszczelki.

[Modele]

Model	Długość igły na końcu pacjenta (L1)	Długość igły na końcu kartridża (L2)	Średnica rurki igły
Typ I	4mm	5,7-7mm	32G

[Średnice rurek igłowych]

G	32G
Średnica (mm)	0,23

[Metoda sterylizacji]

Urządzenie jest sterylizowane przez napromieniowanie.

[Przeznaczenie] Igły do pena insulinowego to sterylne igły jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczami do wstrzykiwania insuliny.

[Docelowi Użytkownicy] Pracownicy służby zdrowia, Pacjenci, Osoby nieprofesjonalne

[Docelowa populacja pacjentów]

Osoby z cukrzycą. Brak ograniczeń dotyczących wieku, płci, wagi lub rasy.


[Wskazanie]

Igła do penów insulinowych jest przeznaczona dla osób, które potrzebują podskórnego wstrzyknięcia insuliny.

[Przeciwwskazania] Brak.

[Instrukcje obsługi]

Typ I

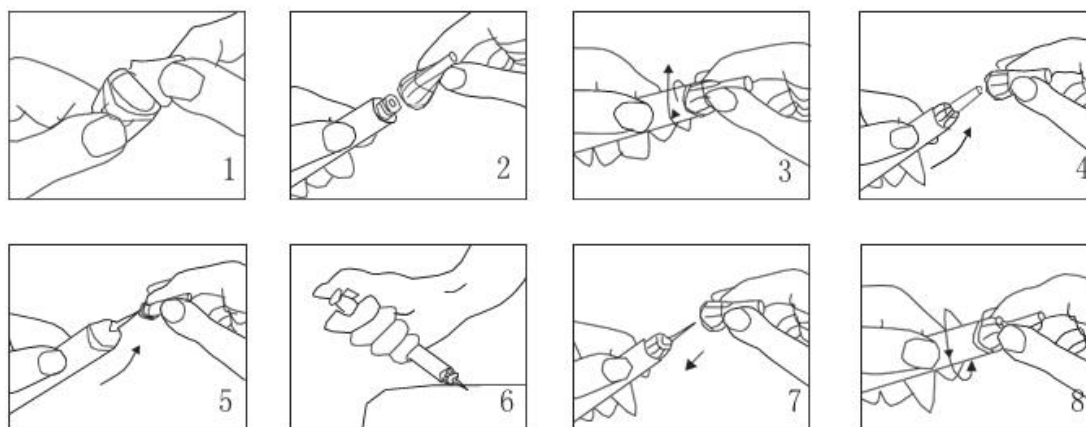

1. Usunąć uszczelkę.
2. Wyrównaj igłę ze penem insulinowym.
3. Proszę mocno przykręcić igłę do pena insulinowego. Trzymać igłę prosto bez żadnych uszkodzeń.
4. Usunąć pojemnik z igłą prosto wzdłuż pena insulinowego.
5. Usunąć osłonę igły, aby odsłonić igłę.
6. Przeprowadź wstrzykiwanie zgodnie z zaleceniami lekarza. Upewnij się, że wykonujesz test bezpieczeństwa dla każdego wstrzykiwania zgodnie z instrukcjami obsługi pena insulinowego. Po wstrzykiwaniu, pozostaw igłę pod

skórą przez co najmniej 6 sekund, zanim ją wyjmiesz.

7. Włóż używaną igłę do pojemnika igły.

8. Usuń igłę z pena insulinowego i wyłóż go do odpowiedniego pojemnika.



Produkty kombinacyjne muszą być ze sobą zgodne. Gdy używasz igieł HuaHong z penami insulinowymi innych producentów, operator musi się upewnić, że te produkty są zgodne.



Zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą medycznym przed użyciem.

[Przechowywanie] Produkty powinny być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i chronić przed światłem, wilgocią i gazami korozji.

[Okres trwałości] 5 lat.

[Ostrzeżenie]

1. Produkt powinien być użyty natychmiast po usunięciu osłony. Proszę NIE używać igły do pena insulinowego, jeśli osłona została uszkodzona lub wcześniej usunięta.
2. Ten produkt jest sterylizowany przez napromieniowanie i jest przeznaczony do jednorazowego użytku.. Powtórne użycie może prowadzić do awarii mechanicznej i potencjalnej kontaminacji mikrobiologicznej.
3. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.
4. Przeznaczony wyłącznie do użytku z penem insulinowym.
5. Trzymaj igły do pena insulinowego poza zasięgiem dzieci.
6. Nie dziel się igłami z innymi osobami, ponieważ może to prowadzić do przenoszenia chorób wirusowych. Może Użytkownik przekazać komuś poważną infekcję lub zakażenie odebrać od nich.
7. Nie wstawiaj igły pod kątem w stronę palców, ponieważ może to spowodować uraz igłą.
8. W przypadku poważnego zdarzenia niepożądane, proszę zgłosić producentowi i odpowiednim organom.