

Wyrób medyczny: Orteza stawu barkowego/ łokciowego/nadgarstka

Wersja: Aparat odwodzący kończynę górną z klinem (MEK 4002)

Opis:

- Wyrób medyczny - aparat odwodzący kończynę górną z klinem - wykonany jest z nowoczesnej oddychającej tkaniny, która zapewnia higroskopijność i niezawodną mikrokrajenie powietrza.
- Składa się z poduszki, odwodzącej kończynę górną w stawie barkowym pod kątem 15° i rotacji wewnętrznej, temblaku naramiennego z pasami podtrzymującymi.
- Specjalna konstrukcja z anatomicznym krojem jest optymalnie dopasowana do ciała dzięki systemowi pasów i rzepów oraz zapewnia komfort podczas długotrwałego noszenia.
- Niska waga konstrukcji sprawia, że noszenie wyrobu nie powoduje dodatkowego obciążenia.
- Konstrukcja pozwala na pozostanie w rozluźnionej pozycji i wykonywanie ćwiczeń mięśniami przedramienia.
- Konstrukcja produktu jest uniwersalna, odpowiednia dla prawej i lewej ręki.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

Funkcje:

- Zapewnia optymalne dopasowanie do obręczy barkowej.

IFU_4002_v1

- Stabilizuje staw barkowy w koniecznej do terapii pozycji odwodzenia z zewnętrzną rotacją barku.
- Redukuje naprężenia w stawach barkowych i łokciowych, odciąża bark, przedramię, dłoń.

Wskazania do stosowania:

- Rehabilitacja po urazach w okolicy stawu barkowo-obończykowego, stawu barkowego, kości ramiennej.
- Stan po operacji stawu barkowego, w tym po operacji plastycznej stożka rotatorów barku i akromioplastyce.
- Zapalenie stawów obręczy barkowej z silnym zespołem bólowym.

Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

Instrukcja obsługi:

1. Zaleca się noszenie ortezy na bawełnianej bieliźnie.
2. Przyłóż poduszkę do tułowia. Przełóż pas przez klamrę i zapnij rzep. Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasa. Następnie ponownie przypnij rzep.
3. Umieść rękę w temblaku, a kciuk w pętli.
4. Przypnij temblak do poduszki na rzep.
5. Przełóż pasy przez ramię i pod pachą, ustaw osłonę szyi w odpowiednim miejscu.
6. Przepleć pasy przez klamrę i zapnij na rzep. Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy. Następnie ponownie przypnij rzep.

IFU_4002_v1

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA
S-M	30-36 cm
L	36-42 cm
XL	42-48 cm

Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zapnij wszystkie zapięcia przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
 - W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
 - Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.



Kolor: czarny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



4002



Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Aparat odwodzący kończynę górną z klinem (MEK 4002)

