



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszki przeciwoodleżynowe

PODUSZKA

PRZECIWODLEŻYNOWA Z OTWOREM W TKANINIE BAWĘLIANEJ

	Rozmiar		
Średnica w cm	44	33	15
Wysokość w cm	8	8	6

Numer kat. REF 132

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Poduszki przeciwoodleżynowe w pokrowcu z tkaniny bawełnianej przeznaczone są do stosowania miejscowego, mają za zadanie zapobiegać powstawaniu odleżyn, ale również doskonale sprawdzają się podczas leczenia już powstałych odleżyn. Wewnętrzny wkład w postaci ruchomego granulatu polistyrenowego gwarantuje równomierne dopasowanie się do każdej zmiany ułożenia ciała, jak również w połączeniu z pokrowcem wykonanym z tkaniny bawełnianej zapewnia tak ważną przy odleżynach przepuszczalność powietrza. Otwór w środku poduszki zapewnia stały dostęp powietrza do zagrożonej odleżynami powierzchni skóry i skutecznie odciąża centralną część podpieranej kończyny. Doskonale odciążają miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem.

Przeciwwskazania: Nie używać ostrych narzędzi.

Użytkowanie: Poduszki przeciwoodleżynowe w pokrowcu z tkaniny bawełnianej przeznaczone są do stosowania miejscowego. Skutecznie zabezpieczają głowę, łokcie, kolana, pięty, ramiona, oraz okolice kości krzyżowej i ogonowej.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Często wietrzyć. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CZĘSTO wyrównywać nierówności poduszki, aby zapobiec zgnieceniu wkładu pod ciężarem pacjenta.

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

RYZYKO wchłonięcia granulatu do ucha lub nosa przez dzieci, w przypadku rozprucia pokrowca wyrobu. W takim przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W ŻADNYM WYPADKU nie należy samemu próbować usuwać granulatu, gdyż grozi to dodatkowymi uszkodzeniami.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli występują działania niepożądane np. alergia, ból – skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

