

NAZWA PRODUKTU

c6_tds0463_Plastry na chrapanie 10x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed pierwszym użyciem wykonaj test alergiczny – naklej plaster na mały fragment skóry, aby sprawdzić reakcję alergiczną.

- **Nie stosuj na uszkodzoną lub podrażnioną skórę** – może to powodować dyskomfort lub zaostrzenie stanu zapalnego.
- **Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu** – unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
- **Nie używaj ponownie tego samego plastra** – produkt jest jednorazowego użytku.
- **Unikaj kontaktu plastra z oczami lub błonami śluzowymi.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Oczyść i osusz nos przed użyciem – zapewni to lepszą przyczepność plastra.

1. **Aplikuj zgodnie z instrukcją** – umieść plaster poziomo na nosie w taki sposób, aby rozciągał delikatnie nozdrza.
2. **Stosuj wyłącznie na noc** – plastry są przeznaczone do używania podczas snu.
3. **Usuwać delikatnie** – po użyciu zdejmij plaster powoli, aby uniknąć podrażnień skóry.
4. **Regularne stosowanie** – w celu uzyskania najlepszych efektów używaj plastra każdej nocy.

OBOSTRZENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosuj w przypadku alergii na kleje medyczne – produkt zawiera substancje klejące, które mogą wywołać reakcję alergiczną.

1. **Nie używaj, jeśli masz trudności z oddychaniem przez nos** – np. z powodu poważnego zatkania nosa lub przegrody nosowej.
2. **Nie stosuj u dzieci poniżej 12 roku życia** – produkt nie jest przeznaczony dla młodszych użytkowników.
3. **Nie stosuj, jeśli masz skłonność do podrażnień skóry** – może to prowadzić do zaczerwienień lub uczuleń.
4. **Konsultacja z lekarzem** – skontaktuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli chrapanie wynika z bezdechu sennego lub innych schorzeń.

