



Instrukcja obsługi komór hiperbarycznych,
koncentratora tlenu.

Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Mikrohiperbaryczna komora do terapii tlenowej

Model:

Ze względu na pojemność dane komory hiperbaryczne są jednoosobowe, co oznacza że pod czas zabiegu w komorze może znajdować się jedna osoba.

Kształt:

W instrukcji są opisane trzy typy komór:

- Komora tlenowa sferyczną, typu siedzący.
- Komora tlenowa trójkątną, typu siedzący.
- Komora tlenowa w kształcie kapsułki typ leżący.

Materiał komory:

miękki TPU.

Opis produktu:

Mikrohiperbaryczna komora tlenowa pod ciśnieniem powietrza, o ciśnieniu wewnętrznym wynoszącym do 0,3 Bar, (Co równia się 0,03 MPa lub 1,3 ATA)

1. Dobry wybór do użytku rodzinnego i pracowników firmy, przeciwdziałający zmęczeniu, łagodzący stres, poprawiający sen i wytrzeźwiający od alkoholu itp.
 2. Wykorzystywany w instytucjach medycznych i zarządzających zdrowiem do pomocniczej fizjoterapii dla osób z nadciśnieniem, hiperlipidemią, hiperglikemią, chorobami sercowo-mózgowymi, problemami zdrowotnymi i inne.
 3. Używane w salonach kosmetycznych do detoksykacji, upiększania, pielęgnacji skóry i tak dalej.
 4. Szeroko stosowane w drużynach sportowych, salach gimnastycznych, wojsku, lotnictwie i innych instytucjach w celu zwalczania zmęczenia, przywracania siły fizycznej, poprawy sprawności fizycznej, wspomaganie gojenia się ran i tak dalej.
-



JAK UŻYWAĆ

- Rozpakuj -

1. Otwórz karton i wyjmij komorę i koncentrator tlenu.
2. Otwórz górną pokrywę koncentratora tlenu i wyjmij małe opakowanie zawierające 2 przezroczyste przewody powietrzne i 1 adapter do wstępnego nadmuchania wspornika .

- Podłącz Koncentrator tlenu -

3. Koncentrator tlenu podłącz do gniazdka.
4. Podłącz do górnego otworu w koncentratorze przewód tym węzem będzie podawany tlen do komór . Na zdjęciu (wylot tlenu).
5. Dolny otwór to wylot sprężonego powietrza. Podłącz tu drugi przewód.
Na zdjęciu: (wylot sprężonego powietrza).
6. Kubek napełnić wodą , aby zwiększyć wilgotność tlenu.

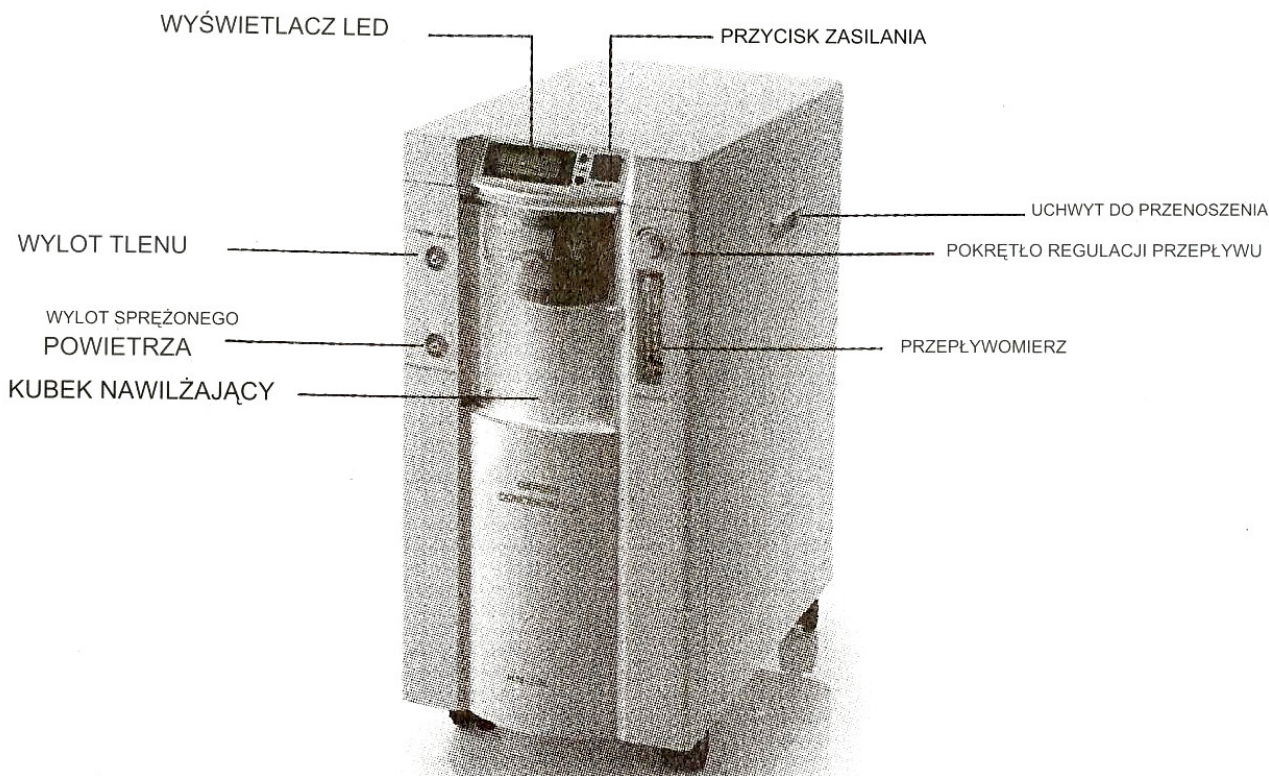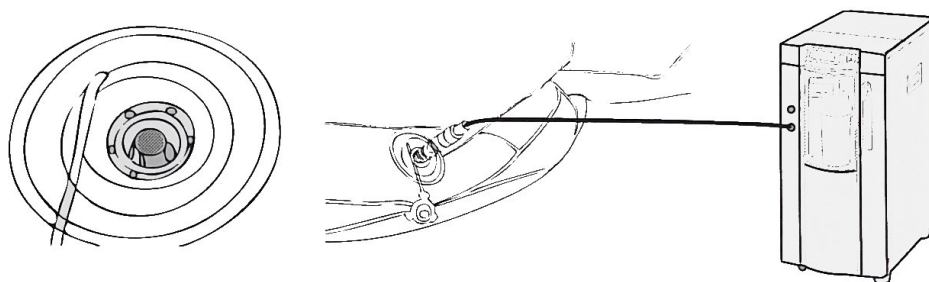

Koncentrator tlenu

- Podłącz Komorę -

7. Obróć i otwórz pokrywę dyszy powietrznej na wsporniku , naciśnij kołek wystający na zewnątrz, w celu wypuczenia powietrza.

8. Przewód który jest podłączony do dolnego otworu koncentratora (wylot sprężonego powietrza) połącz z adapterem a następnie adapter połącz do wspornika (szkielet komory).

9. Drugi przewód (wylot tlenu) połącz z komorą, do otworu wlotu powietrza. (Później do tego samego otworu, ale od środka zostanie podłączona maska.)

- Napełnij wspornik -


10. Naciśnij przełącznik, aby włączyć koncentrator tlenu w celu nadmuchania wspornika powietrza. W międzyczasie upewnij się, że oba zamki błyskawiczne komory tlenowej są Rozpięte, a komora jest rozłożona i wyprostowana.

11. Czas napełniania powietrzem wynosi zwykle około 2 do 3 minut. Gdy twardość wspornika kolumny powietrza jest wystarczająca, wyjmij adapter z dyszy powietrza i przykryj pokrywą.

12. Zamknij szczelnie ręczny zawór spustowy (ten zawór znajduje się na zewnątrz korpusu komory, obrót w prawo w celu dokręcenia, obrót w lewo w celu uwolnienia ciśnienia pacząc z zewnątrz komory.



Adapter dla wstępnego nadmuchania wspornika

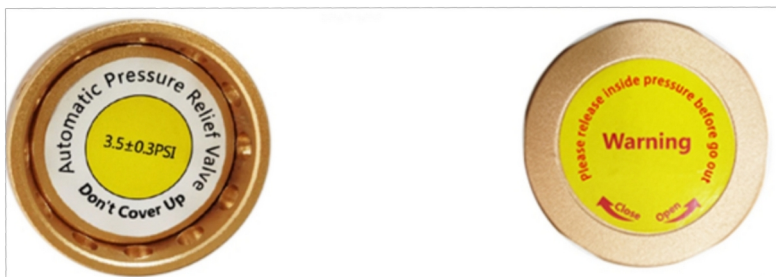

Automatyczny zawór nadmiarowy Ciśnienia/ zawór bezpieczeństwa.

Ręczny zawór nadmiarowy ciśnienia/ reduktor ciśnienia

JAK UŻYWAĆ

- Napełnij wspornik -

13. Podłącz przewód który jest podłączony do dolnego otworu koncentratora (wylot sprężonego powietrza) połącz z bocznym otworem wlotu powietrza. (ten sam węz co był użyty do nadmuchiwanie wspornika)



14. W jednym z wolnych otworów wręcz manometr. Gwint manometru powinien zostać owinięty teflonową w celu uszczelnienia.

14. Po wejściu do komory tlenowej zamknij dobrze zamek wewnętrzny i zewnętrzny, włóż koncentrator tlenu, załóż maskę i rozpocznij wdychanie tlenu.

- Po zakończeniu -

15. Po zakończeniu tlenoterapii wyłącz aparat tlenowy.

16. Poluzuj wewnętrzny ręczny zawór nadmiarowy ciśnienia, dopiero gdy komora stanie się płaska, rozepnij dwa zamki błyskawiczne, aby otworzyć komorę.

Uwaga:

Proszę nie rozpinać bezpośrednio komory bez wcześniejszego zwolnienia ciśnienia w komorze.

Ostrzeżenie:

1. Przedmioty łatwopalne i wybuchowe nie mogą dostawać się do korpusu komory, aby uniknąć eksplozji i innych pilnych sytuacji.
2. Nie używaj komory jeśli czujesz się nieswojo z powodu gorączki, przeziębienia lub bólu brzucha.
3. Jeżeli podczas stosowania odczuwasz szumy uszne, bóle uszu i inne dolegliwości, możesz przełykać, mówić odpowiednio, tak aby osiągnąć równowagę ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego, co pozwoli na wentylację trąbki Eustachiusza;
4. Podczas użytkowania zrelaksuj się i oddychaj naturalnie tlenem.
5. Podczas dekompresji uważaj, aby nie wstrzymywać oddechu. Podczas dekompresji poczujesz, że z ucha ucieka powietrze, jest to normalne.
6. **Pamiętaj, aby nie wstrzymywać oddechu podczas dekompresji**, aby uniknąć obrażeń spowodowanych zmianą ciśnienia powietrza. Ponadto podczas dekompresji należy się zrelaksować i normalnie oddychać.
7. Utrzymuj komorę w czystości, nie pluj, nie zaśmiecaj itp.

Przeciwwskazanie

Pacjenci z przeziębieniem, nieżytem nosa, polipami nosa, blokadą trąbki Eustachiusza, zapaleniem ucha środkowego, ciężkim zapaleniem zatok, wysoką gorączką, wysokim ciśnieniem krwi powyżej 160/100 mmHg, bradykardią, zespołem chorej zatoki, schizofrenią, napadami typu grand mal, ciężką rozedmą płuc, rozstrzeniami oskrzeli.

Nie należy stosować leku w przypadku ciężkiej infekcji płuc, wczesnej ciąży, odwarstwienia siatkówki i skrajnego wyczerpania.



Sposób transportu i przechowywania Produkty

W procesie transportu powinny unikać słońca i deszczu. Produkt należy przechowywać w wentylowanym, suchym pomieszczeniu pozbawionym substancji żrących

Podwójny zamek błyskawiczny.



1. Podczas pompowania wspornika kolumny, dwa zamki błyskawiczne powinny być otwarte.
2. Zapnij dwa zamki błyskawiczne w komorze, przed jej użyciem upewnić się, że komora jest szczelna.
3. Po zakończeniu tlenoterapii nie można bezpośrednio rozpinać komory bez wcześniejszego obniżenia ciśnienia w komorze.
3. Poluzuj wewnętrzny ręczny zawór nadmiarowy ciśnienia, gdy komora stanie się płaska, rozepnij dwa zamki błyskawiczne, aby otworzyć komorę.

- 1) Okno obserwacji
- 2) Nadmuchiwany wspornik
- 3) Zamek błyskawiczny
- 4) Nadmuchiwany wspornik
- 5) Ręczny zawór spustowy powietrza
- 6) Automatyczny korek odpowietrzający
- 7) Wlot powietrza wspornika
- 8) Automatyczny odpowietrznik
- 9) Automatyczny korek odpowietrzający
- 10) Manometr
- 11) Wlot/wylot powietrza

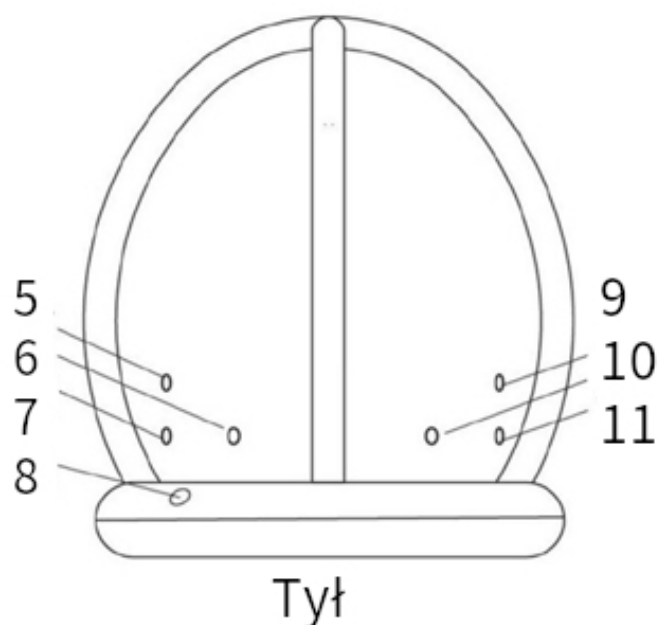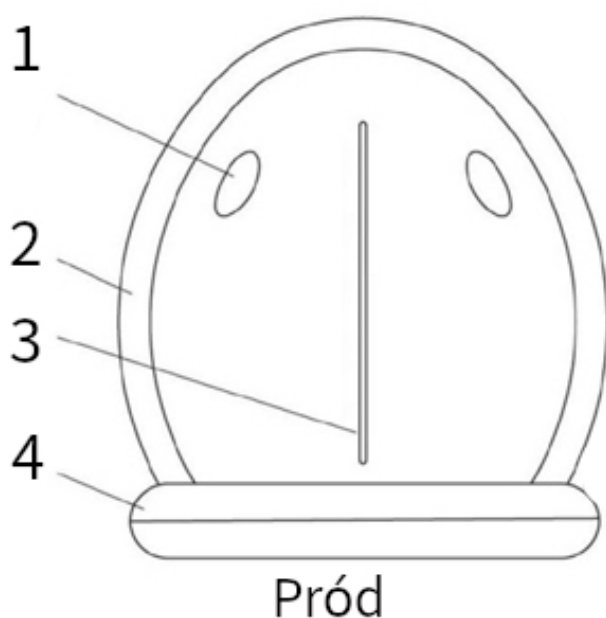

Model	Nadmuchiwana komora hiperbaryczna z siedziskiem sferycznym
Wymiar komory	124*163 cm (średnica*wysokość)
Wymiary koncentratora tlenu	48*27*56 cm
Moc znamionowa	≤500VA
Materiał komory	TPU
Maks. Wyjście tlenu	3 l/min
Maks. Wyjście powietrza	55 l/min
Ciśnienie wylotowe tlenu	0,05 MPa
Ciśnienie wylotowe powietrza	0,10 MPa

- 1 Ręczny zawór nadmiarowy ciśnienia
- 2, 6 automatyczny zawór nadmiarowy ciśnienia
- 3, 10 wlot i wylot powietrza
- 4 nadmuchiwany wspornik
- 5 zamek błyskawiczny
- 8 okno obserwacji
- 9 Gniazdo do napełniania nadmuchiwanego wspornika

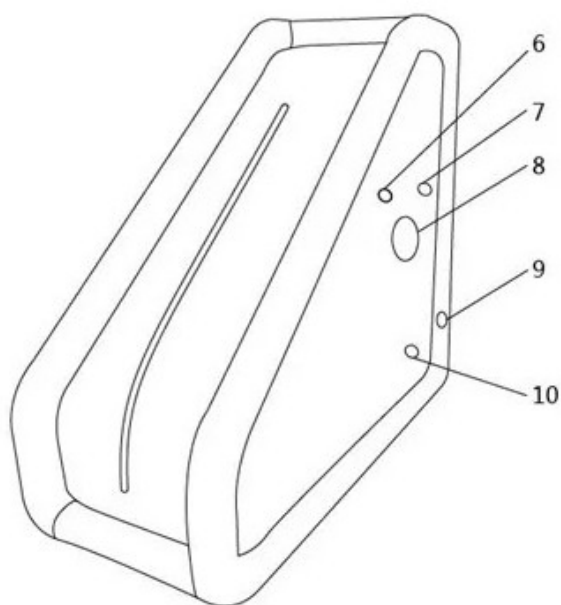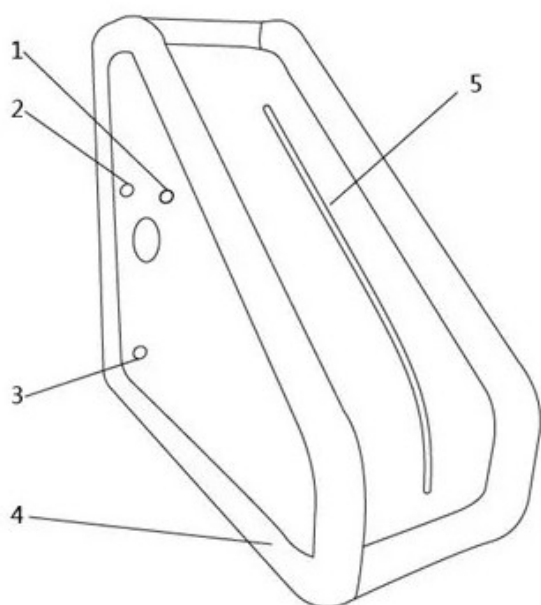

Model	Typ siedzenia trójkątnego Nadmuchiwane wsparcie Hiperbaryczna komora tlenowa
Wymiar komory	181*160*103 cm
Wymiary koncentratora tlenu	48*27*56 cm
Moc znamionowa	≤500VA
Materiał komory	TPU
Maks. Wyjście tlenu	3 l/min
Maks. Wyjście powietrza	55 l/min
Ciśnienie wylotowe tlenu	0,05 MPa
Ciśnienie wylotowe powietrza	0,10 MPa



Model	Nadmuchiwana komora tlenowa typu połów
Wymiar komory	80 cm * 230 cm
Wymiary koncentratora tlenu	48*27*56 cm
Moc znamionowa	≤500VA
Materiał komory	TPU
Maks. Wyjście tlenu	3 l/min
Maks. Wyjście powietrza	55 l/min
Ciśnienie wylotowe tlenu	0,05 MPa
Ciśnienie wylotowe powietrza	0,10 MPa
