



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Szelki Pavlika

SZELKI PAVLIKA

Rozmiar	S	M	L
Obwód pasa	35-40	39-44	43-48

Numer kat. REF 310

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Szelki Pavlika stosowane są przy wrodzonym nie doksztalcie, zwicnięciach i dysplazji stawów biodrowych. Utrzymuje nóżki dziecka w zgięciu i odwiedzeniu.

Przeciwwskazania: Niestabilność stawów biodrowych spowodowana zaburzeniami bilansu mięśniowego jak np. mielodysplazja, astogrypoza, nadmierna wiotkość stawów.

Użytkowanie i regulacja: Szelki Pavlika zakładamy tak by pasek nośny, do którego przymocowane są szelki i paski, znajdował się powyżej bioderek dziecka. Szelki krzyżujemy na plecach i zapinamy na piersi. Następnie zakładamy sandałki na stópki, regulując pozycję odwiedzenia nóg w stawach biodrowych.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Miejsca silnie zabrudzone przecierać gąbką lub szmatką zamoczoną w letniej wodzie, z dodatkiem, łagodnych środków piorących, a następnie spłukać wodą i wysuszyć. Nie wykręcać! Nie wirować! Suszyć w pozycji rozłożonej. Do elementów skórzanych stosować neutralne środki konserwujące.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Wyrób medyczny zawiera tkanki pochodzenia zwierzęcego. Nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia. Unikać styczności z olejami oraz innymi agresywnymi środkami i oparami chemicznymi, gdyż mogą one pogorszyć właściwości stosowanych

materiałów. Niedopuszczalne są samodzielne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. W przypadku uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

Wyrób medyczny zawiera tkanki pochodzenia zwierzęcego.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3