

Instrukcja obsługi – Profesjonalne cęgi do wrastających paznokci



Marka: Classic Manicure | Linia: Solingen | Materiał: stal chirurgiczna

1. Przeznaczenie produktu

Cęgi służą do precyzyjnego usuwania wrastających, grubych i problematycznych fragmentów paznokci. Produkt przeznaczony do użytku domowego i profesjonalnego – idealny dla klientów indywidualnych, gabinetów kosmetycznych i podologicznych.

2. Przed pierwszym użyciem

Dezynfekcja: Przed użyciem umyj narzędzie i zdezynfekuj środkiem do narzędzi chirurgicznych lub kosmetycznych.

Higiena: Umyj dłonie oraz przygotuj paznokcie – najlepiej po kąpieli lub namoczeniu stóp przez 10–15 minut w ciepłej wodzie.

3. Instrukcja użycia

Chwyt: Trzymaj cęgi wygodnie za wyprofilowaną rączkę – zapewnia to kontrolę i precyzję.

Cięcie: Delikatnie podnieś fragment wrastającego paznokcia i przytnij go ostrzami – tylko w miejscu widocznym i dostępnym.

Bezpieczeństwo: Nie wsuwaj ostrza zbyt głęboko pod wał paznokciowy – grozi to uszkodzeniem skóry.

4. Po użyciu

Oczyść ostrza z pozostałości paznokcia lub skóry.

Zdezynfekuj cęgi i osusz dokładnie.

Załóż osłonkę na ostrza i przechowuj w dołączonym pudełku.

Cęgi można sterylizować w autoklawie – wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej (twardość 52–54 HRC).