

Instrukcja montażu i obsługi

Uchwyt prosty prysznicowy 37cm

Model 804/370NG



BEZ BARIER

BEZ BARIER

I. Dane techniczne /Rys. A/

Długość uchwytu	370 [mm]
Odległość od ściany	65 [mm]
Dopuszczalne obciążenie	120 [kg]
Waga netto	0,652[kg]

II. Zastosowanie

Uchwyt prosty prysznicowy wykonany został z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach panujących w łazienkach. Może on znaleźć zastosowanie również w gabinetach lekarskich, szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych. Poprzez zastosowanie uchwytu prostego prysznicowego, kompensowane jest upośledzenie narządów ruchu, oraz kręgosłupa. Zwiększone jest bezpieczeństwo korzystania z prysznica. Uchwyt prosty prysznicowy może być mocowany osobno, jak również może być połączony wraz z innymi uchwytami w różne moduły /Rys. C/. Do połączenia uchwytów w moduły należy zastosować uchwyt łącznikowy kątowy 806NG.

III. Budowa /Rys. A i B/

1. Rurka uchwytu prostego prysznicowego

IV. Montaż /Rys. B/



Zalecany jest montaż uchwytu prostego prysznicowego do ściany pełnej. W przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwory należy wierceć bez uderu. Otwory po wierceniu należy oczyścić z pyłu oraz zwiercić. Uchwyt prosty prysznicowy przykręcić do ściany przy pomocy 4 wkrętów poz. 2. I kołków rozporowych poz. 3 załączonych w zestawie. Na wkręty poz.2, nałożyć podkładki z PCW poz. 4 dołączone w zestawie. Nie wolno mocować uchwytu prostego prysznicowego bezpośrednio do płyt kartonowo - gipsowych !
Po montażu na lby wkrętów, założyć osłonki poz.5

V. Obsługa i eksploatacja /Rys. B/


1. Przed użytkowaniem uchwytu prostego prysznicowego należy zwrócić uwagę na stan techniczny i pewność zamocowania do ściany.
2. Zaleca się okresowe sprawdzenie prawidłowego zamocowania uchwytu prostego prysznicowego.
3. W przypadku widocznej szczeliny pomiędzy podkładką a ścianą należy dokręcić wkręty mocujące poz. 2.

BEZ BARIER

BEZ BARIER

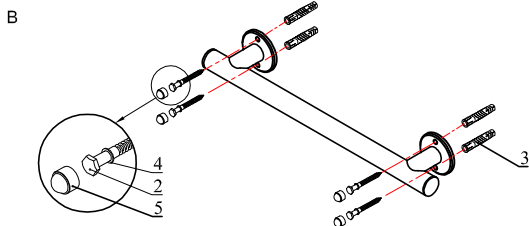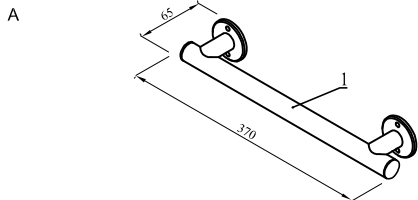

Przykładowe moduły Andex Bez Barier

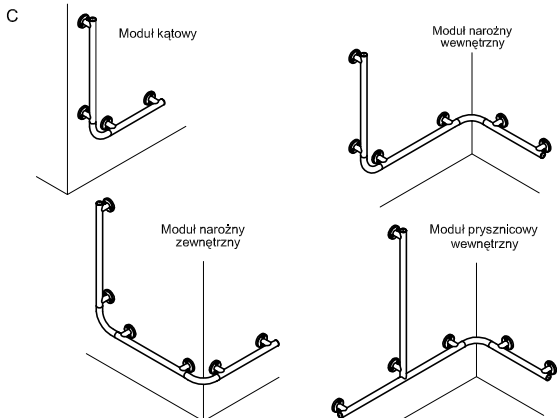

VI. Konserwacja

1. Konserwacja powłoki proszkowej powinno przeprowadzać się poprzez regularne czyszczenie przy pomocy płynów, łagodnych środków detergentowych, rozcieńczonych w ciepłej wodzie. Do mycia należy stosować tradycyjne detergenty o wartości PH 5 i 9. Środek czyszczący nie może zawierać materiałów ściernych lub rozpuszczalników. Niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających chlor, a w szczególności kwas solny. Może to doprowadzić do przyżółceń i uszkodzeń. Wszystkie powierzchnie powinny być czyszczone przy pomocy miękkich tkanin lub gąbek. Materiały o działaniu ciemnym mogą spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. Mechaniczne czyszczenie szczotką lub stalową poduszką może spowodować zniszczenie powłoki. Po umyciu element należy spłukać czystą, świeżą wodą i starannie wysuszyć, a następnie wypolerować suchą miękką szmatką np. flanelą.
2. Środki zastosowane do konserwacji uchwytu prostego prysznicowego, powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Użytkować uchwyt prosty prysznicowy zgodnie z instrukcją obsługi.