


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE PREVENT

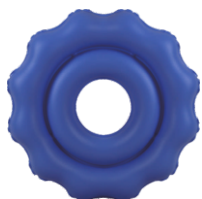

Modele: AR-090
okrągła



AR-091
kwadratowa



AR-092
kwadratowa II



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel. fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

Wydanie 4 z dnia 28.04.2023r.



Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć poduszkę z opakowania
2. W pierwszej kolejności należy poduszkę rozłożyć do właściwego jej kształtu zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu (okrąg lub kwadrat)
3. Otworzyć zawór i delikatnie wsunąć pompkę. Następnie należy napompować poduszkę do wymaganej twardości.



Przeciwwskazania i zalecenia:

Nie zaleca się stosowania poduszki w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Nie należy stosować u osób z niestabilnością kręgosłupa, mających problem z pionizacją, otwartymi ranami, w trakcie doleczenia złamań jak również zaburzeniami błędnika.

Przed zastosowanie należy skontaktować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.



Uwagi i ostrzeżenia:

Podczas pompowania należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić zaworu. Nie wolno pompować poduszki kompresorem mechanicznym – nadmierne ciśnienie może doprowadzić do rozerwania poduszki. Zaleca się aby poduszka była pompowana dołączoną pompką lub w sytuacjach wyjątkowych inną pompką ręczną, systematycznie kontrolując poziom twardości poduszki. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta. Nie wolno wskakiwać na poduszkę (gwałtowny skok ciśnienia wewnątrz poduszki może doprowadzić do jej rozerwania).



W celu uniknięcia urazów:

Nie wolno gwałtownie wskakiwać na poduszkę
Zabrania się stawać na poduszce nogami - grozi wypadkiem!
Zabrania się dopompowywać poduszkę w trakcie użytkowania
Zabrania się przekraczać maksymalne dopuszczalne obciążenie określone przez producenta
Stosować tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA PREVENT

*Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie pomocny i znacznie przyczyni się do poprawy Państwa zdrowia oraz komfortu. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.*

Zastosowanie:

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

- zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- poprawia komfort siedzenia

Właściwości produktu:

Unikalny kształt oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości zmywalnego anty-alerogenicznego nylonu medycznego odpornego na ścieranie oraz nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Ukrywany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

Wymiary:

AR-090 – średnica 43cm +/- 10mm po napompowaniu

AR-091/ AR-092 – rozmiar 44x44cm +/- 10mm po napompowaniu

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Zakończenie użytkowania:

Po zakończeniu użytkowania można wypuścić powietrze. Zawór należy otworzyć a następnie ścisnąć palcem wskazującym oraz kciukiem. Poduszkę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotów. Nie należy pozostawiać poduszki w dużym nasłonecznieniu (szczególnie napompowanej), wzrost temperatury powietrza w środku (a tym samym ciśnienia) może doprowadzić do rozerwania poduszki.

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie pod bieżącą wodą z użyciem łagodnych środków myjących np. mydła. Nie stosować „agresywnych” detergentów, substancji żrących oraz oleistych. Mogą doprowadzić do uszkodzenia powłoki poduszki a tym samym jej rozszczelnienia.

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Okres ważności: 5 lat.

SYMBOLE:



Wyrób medyczny Zapoznaj się z instrukcją Producent Wyrób spełnia wymagania UE Ostrzeżenie Nr dato / serii Data produkcji m-c/rok Nadaje się do recyklingu Selektywna zbiórka odpadów

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

