

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Siedziska do podnośnika

- RF-1010** Siedzisko do podnośnika standardowe
RF-1011 Siedzisko do podnośnika ze stabilizacją głowy
RF-1012 Siedzisko do podnośnika kąpielowe

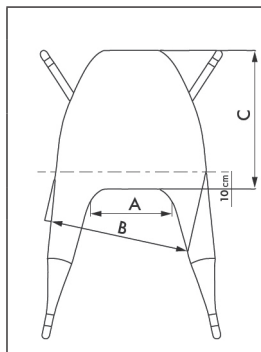
I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
 Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
 Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.
 Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

	Nr modelu	RF-1010	RF-1011	RF-1012
	Nazwa	Siedzisko do podnośnika standardowe	Siedzisko do podnośnika ze stabilizacją głowy	Siedzisko do podnośnika kąpielowe
	Rozmiar	A-46 cm, B-98 cm, C-95 cm	A-47 cm, B-88 cm, C-85 cm	A-46 cm, B-98 cm, C-95 cm
	Materiał	100% Poliester	100% Poliester	100% Poliester
			Siedzisko posiada dodatkowo dodatkową stabilizację (stabilizacja głowy).	Wykonane z materiału poliestrowego o strukturze siatkowej, co gwarantuje szybkie schnięcie i sprawia, że jest idealne do użytku podczas kąpieli.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Siedzisko służy jako wyposażenie pomocnicze przy korzystaniu z podnośnika rehabilitacyjnego podczas transportowania i przemieszczania pacjentów wewnątrz pomieszczeń.

Transportowane mogą być osoby z całkowitą lub częściową niepełnosprawnością, takie jak pacjenci obłożnie chorzy i w podeszłym wieku o ograniczonej zdolności ruchowej.

Prawidłowe stosowanie podnośnika z siedziskiem umożliwia poruszanie się osób starszych, niepełnosprawnych i sparaliżowanych, np. do łóżka, toalety, łazienki, itp.

Siedzisko standardowe przeznaczone jest dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy.

Siedzisko kąpielowe ze względu na typ materiału z którego jest wykonane przystosowane jest do używania podczas pielęgnacji pacjenta (kąpeli). Przeznaczona jest dla osób posiadających zdolność samodzielnego utrzymania głowy, nie wymagających dodatkowego wsparcia w tej okolicy.

Siedzisko ze stabilizacją głowy jest przeznaczone dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia tułowia i głowy.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Osobom z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, wzrokową lub psychiczną nie wolno korzystać samodzielnie z siedziska zamontowanego na podnośnik!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu należy stosować siedzisko zalecane przez lekarza, dostosowane do potrzeb pacjenta. Siedziska nie są przeznaczone do przenoszenia pacjentów na duże odległości. Podczas przemieszczania pacjenta zawieszono na siedzisku podłączonym do podnośnika, należy unikać przesuwania urządzenia po przeszkodach takich jak uniesione krawędzie dywanów, progi drzwi czy nierówne powierzchnie, które mogą spowodować destabilizację podnośnika. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych oznak należy natychmiast przerwać transport pacjenta.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed użyciem wyrobu każdorazowo sprawdzić czy wyrób jest kompletny i nieszkodzony.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wyrobu! Maksymalne dopuszczalne obciążenie - 150 kg.
- Podczas korzystania z wyrobu zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
- Nie pozostawiać pacjenta na siedzisku, bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego wyrobu.
- Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

Wyrób należy stosować pod wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Siedzisko wyposażone jest w pasy, które należy zawiesić na uchwycie podnośnika.

Wyrób stawowi dodatkowe wyposażenie do podnośnika rehabilitacyjnego, przed użyciem (zamontowaniem) wyrobu na podnośnik, zapoznaj się z instrukcją podnośnika.

1. Umieść siedzisko pod tułowiem pacjenta, w taki sposób aby pomarańczowe uchwyty do manewrowania pacjentem podczas transportu, znajdowały się po zewnętrznej stronie.
2. Zawieś na hakach podnośnika górne pasy nośne w wybranym kolorze. Następnie przeciągnij pod udem pacjenta (od zewnętrznej do wewnętrznej strony uda) dolne pasy nośne i zawieś na wybranym kolorze. Zabezpiecz pacjenta zawieszając taśmę w kolorze szarym na hakach podnośnika.
3. Unieś ramię podnośnika wraz z pacjentem umieszczonym w siedzisku.



UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę wyrobu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.

Prac i konserwować zgodnie z informacjami podanymi na metce dołączonej do wyrobu. Utrzymywać wyrób w czystości. Każdorazowo po zakończeniu korzystania z wyrobu należy usunąć z niego pozostałości, takie jak włosy, jedzenie, napoje i inne. Stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Okres używania uzależniony jest od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu. Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi od 1 roku do 5 lat przy normalnym użytkowaniu.

X. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Numer modelu		Ostrzeżenie
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania		Nie przecinać
	Wyrób medyczny		Przechowywać z dala od światła słonecznego



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
email: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/RF-1010-1012/1/22.01.2025
Data wydania instrukcji używania 01.2025 v.1