



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Ortezy kończyny górnej

TEMBLAK

Z POPRZECZNYM PASEM

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość w cm	31	37	43	49
Szerokość w cm	23	23	26	26

Numer kat. REF 053

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Stosuje się do podwieszania kończyny górnej przy porażeniach i niedowładach, a także do ograniczenia ruchomości w niewielkich zespołach bólowych i urazach w obrębie barku, oraz w złamaniach lub zwłknięciach jako zaopatrzenie transportowe.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadkach oparzeń, otwartych złamań lub innych niebezpiecznych uszkodzeń skór, a także w przypadku złamań, zwłknięć wymagających radykalnego unieruchomienia kończyny.

Mocowanie pasa obwodowego: Przymocować za pomocą taśmy verclo jeden koniec pasa do zewnętrznej części temblaka i poprowadzić pas dookoła uszkodzonego ramienia, przez plecy i pod zdrowym ramieniem. Zamocować wolny koniec pasa za pomocą taśmy verclo. Temblak można nosić z pasem lub bez. Korzystając z pomocy personelu medycznego podczas pierwszego założenia, pacjent uniknie niewłaściwego umiejscowienia lub dobrania niewłaściwego rozmiaru. W przypadku pojawienia się brzęku kończyny lub innych objawów dyskomfortu, ponownie zgłosić się do technika ortopedy lub fizjoterapeuty, a w drastycznych przypadkach do lekarza.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. Suszyć w ręczniku, rozkładając następnie płasko, aż do zupełnego wyschnięcia. Nie prasować i nie przyspieszać procesu suszenia. W żadnym wypadku nie można suszyć temblaka przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie temblaka. Nie wykręcać, nie wirować. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia,
- wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji,
- uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia),
- wygoda i komfort użytkowania,
- odbarwienie taśm mocujących.



Data produkcji:

LOT

Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3