

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



Profil produktu i instrukcja użytkowania

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl


Basen sanitarny z pokrywką, Typ Europejski

Sprzęt Medyczny klasa I

Wymiary : 515 x 299 x 142 mm

Pojemność : 3000 ml

Materiał : Polipropylen

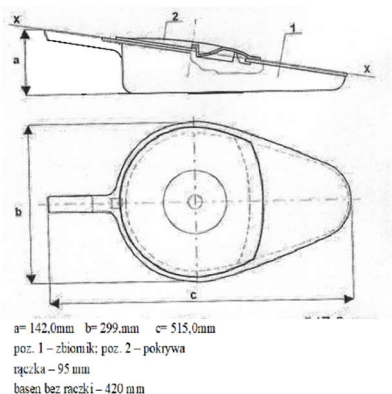

Przeznaczenie

- Basen sanitarny dla dorosłych z pokrywką.
- Pomoc przy obsłudze osób niepełnosprawnych.
- Produkt wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów z urazem lub niepełnosprawnością, zwykle przykuty do łóżka szpitalnego, a także dla pracowników służby zdrowia, pielęgniarek i personelu medycznego.

Cechy produktu

- Mocny i trwały.
- Gwarancja 1000 cykli.
- Łatwy w chwycie uchwyt z pokrywką.
- Można czyścić w automatycznych myjkach dezynfekujących lub myć ręcznie.
- Nadaje się do użytku bariatrycznego - testowane obciążenie do 160 kg.
- Gładkie krawędzie i powierzchnie.

Informacje o opakowaniu


Numer katalogowy	Kod kreskowy opakowania (GTIN 13)	Kolor	Opakowanie Podstawowe	Opakowanie zbiorcze	Waga
BS01B	5 907522 870607	Biały	Worek foliowy 1 x 1	Zgodnie z zamówieniem (max. 30 szt.)	28 kg
BS02Z	5 907522 870690	Zielony	„	„	„
BS03T	5 907522 870683	Turkusowy	„	„	„

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Profil produktu i instrukcja użytkowania

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl

Symbole produktu

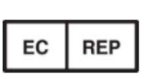Producent	Numer katalogowy	Zgodność z przepisami UE	Wyrób medyczny	Autoryzowany przedstawiciel WE	Uwaga	Kod partii	Data przydatności do użycia	Niesteryl-ny	Brak lateksu	Nie używać, jeśli opakowanie nie jest uszkodzone	Przechowywać w suchym miejscu	Chronić przed światłem słonecznym
												

Producent



PPH KAMED-Plus, Solskiego 3, 42-209 Częstochowa, Polska

Telefon: +48 34 3621509 E-mail; kamedlus@gmail.pl, kamedplus@kki.pl

Normy

- Produkt jest zgodny z: rozporządzeniem 2017/745 oraz, w stosownych przypadkach, z wszelkimi innymi odpowiednimi przepisami unijnymi, które przewidują wydanie deklaracji zgodności UE.

Instrukcja użytkowania:

Przechowywanie i obsługa:

- Nie upuszczać.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w czystych i suchych warunkach.
- Przechowywać na półce lub palecie, nie kładąc się na podłogę.
- Okres przydatności 36 miesięcy.

Przygotowanie:

- Produkt dostarczany w stanie niesterylnym.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkty.
- Wycofać uszkodzone produkty i zgłosić przełożonemu.
- Przepłukać ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości opakowania.

Produkt dostarczany jako zestaw składający się z:

- Basenu i pokrywy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Profil produktu i instrukcja użytkowania

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl

Czyszczenie i dezynfekcja

- Ustawiaj produkty pojedynczo, unikając kontaktu z innymi przedmiotami.
- Ustawiaj produkty tak, aby umożliwić wnikanie i odprowadzanie wody.
- Czyść maszynowo w myjniach dezynfekujących zgodnych z normą ISO 15883.
- Cykl prania w temperaturze do 130°C do 30 min. oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C Dezynfekcja powszechnie używanymi do tego celu środkami.
- Używaj zatwierdzonych detergentów, środków czyszczących enzymatycznych lub biobójczych, odpowiednich do czyszczenia wyrobów medycznych.
- Używaj detergentów i środków dezynfekujących o zakresie pH od 2 do 13.
- Dopuszczalne jest czyszczenie ręczne.
- Płucz czystą wodą.

Inspekcja Konserwacja i Raportowanie Incydentów

- Wizualna inspekcja produktu w celu zidentyfikowania uszkodzeń.
- Wyrzucenie uszkodzonego produktu.
- Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce podczas użytkowania tego produktu, należy zgłaszać producentowi i Właściwemu Organowi na terytorium, na którym znajduje się użytkownik.

Utylizacja

- Koniec okresu użytkowania określa się na podstawie zużycia, kontroli wizualnej lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli produkt jest zanieczyszczony, należy traktować go jak odpad kliniczny i utylizować zgodnie z procedurami dotyczącymi odpadów klinicznych.

Uwagi

- Nie należy używać proszków ściernych ani szczotek metalowych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Nie przekraczać temperatury 130°C.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania

- Informacje dostarczone przez PPH KAMED-Plus stanowią oficjalne instrukcje firmy dotyczące tego produktu.
- Obowiązkiem przetwórcy jest zapewnienie, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z tymi informacjami oraz że personel, maszyny i sprzęt spełniają odpowiednie normy dotyczące przetwarzania.
- Wszelkie odstępstwa od tych informacji wymagają oceny pod kątem skuteczności i potencjalnych negatywnych skutków.
- Dodatkowe informacje dostępne na życzenie, skontaktuj się z nami: kamedplus@gmail.com