

ul. Śrutarska 20
 43-400 Cieszyn
 tel. +48 516 805 405

Instrukcja obsługi
Składany stół rehabilitacyjny
"Prosport 3"



I. Dane techniczne


Długość bez podglówka: 195cm
 Długość z podglówkiem: 225cm
 Szerokość: 70cm
 Wysokość (regulowana skokowo): 64-90cm
 Wymiary po złożeniu: 70cm x 98cm
 Waga: 17kg
 Dopuszczalne obciążenie: 250kg

II. Zastosowanie


Stół rehabilitacyjny składany przeznaczony jest do masażu, zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w leczeniu oraz łagodzą skutki chorób i urazów. Pomagają wykonać efektywny i bezpieczny zabieg dzięki przyjęciu przez pacjenta odpowiedniej pozycji leżącej.

III. Konstrukcja


- 1 - Błat drewniany pokryty tapicerką
- 2 - Nogi zewnętrzne
- 3 - Rozpórki nóg zewnętrznych
- 4 - Naciąg linkowy (system linek)
- 5 - Noga ruchoma
- 6 - Nakrętki motylkowe
- 7 - Zaślepka otworu na twarz
- 8 - Podłokietniki boczne
- 9 - Podłokietnik przedni
- 10 - Podglówek na regulowanym stelażu
- 11 - Sekcja ruchoma
- 12 - Dodatkowy otwór na podłokietnik
- 13 - Otwory na zagłówek
- 14 - Zamek walizkowy
- 15 - Uchwyty transportowy
- 16 - Pokrowiec do transportowania łóżka

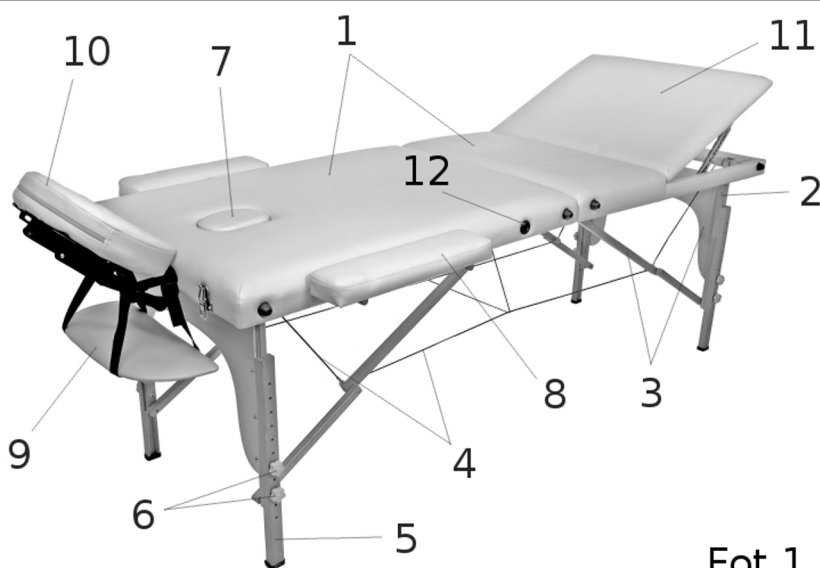

Fot.1

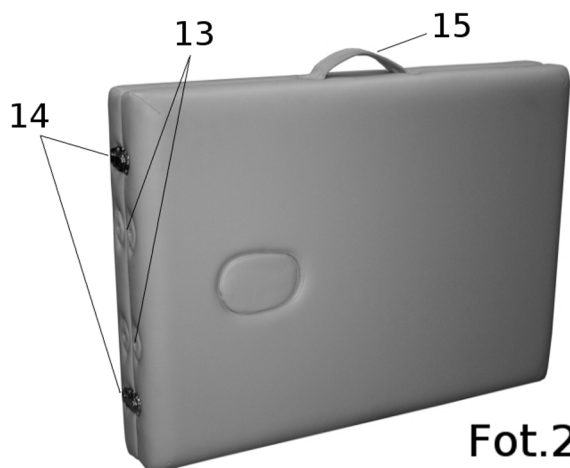

Fot.2

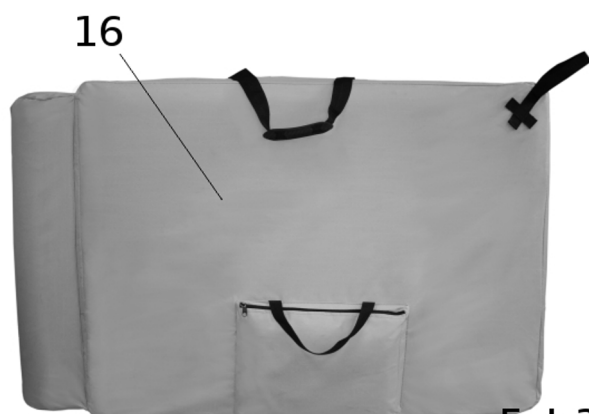

Fot.3

ul. Śrutarska 20
43-400 Cieszyn
tel. +48 516 805 405

Instrukcja obsługi Składany stół rehabilitacyjny "Prosport 3"



Fot.4

IV. Obsługa

Stół w stanie złożonym ma postać walizki (fot. 2) aby go rozłożyć należy:

- Otworzyć dwa zewnętrzne zamki walizkowe (14)
- Odchylić blaty stołu (1), rozchylając nogi maksymalnie na zewnątrz (2)
- Wyciągnąć wyposażenie z wnętrza stołu (8, 9, 10)
- Ustawić stół na twardym i równym podłożu (fot. 1)
- Sprawdzić naciąg linek (4)
- Ustawić odpowiednią wysokość poprzez:
 - odkręcenie nakrętek motylkowych (6)
 - zdjęcie nogi ruchomej (5) ze śrub mocujących
 - przełożenie nogi ruchomej na wybrane położenie
 - zakręcenie nakrętek motylkowych (6)
- Zamontować podgłówek (10) oraz w razie potrzeby podłokietnik przedni (9) oraz panele boczne (8))
- Aby podnieść sekcję ruchomą (11) należy otworzyć środkowy zamek walizkowy (14) i unieść sekcję na żadaną wysokość
- Aby opuścić sekcję ruchomą (11) należy unieść ją do uzyskania oporu zwalniając tym samym mechanizm blokujący i swobodnie opuścić
- Sekcję ruchomą zabezpieczyć poprzez zamknięcie zamka walizkowego (14)

V. Ułożenie pacjenta:

Zabieg należy rozpocząć od prawidłowego ułożenia pacjenta na stole. Pacjent powinien najpierw usiąść na blacie stołu po czym zająć odpowiednią dla danego zabiegu pozycję leżącą. Zajęcie odpowiedniej pozycji na stole jak i zejście ze stołu powinny być asekurowane przez osobę wykonującą zabieg.

WAŻNE

Przed położeniem pacjenta należy sprawdzić prawidłowość rozstawienia nóg, prawidłowe dokręcenie nakrętek motylkowych, jednakowe ustawienie długości nóg, stan techniczny linek i ich naciąg.

VI. Złożenie stołu

- Zdemontować podgłówek i wyposażenie dodatkowe (jeżeli występuje).
- Przewrócić stół na bok stawiając go na stopkach (fot. 4)
- Złożyć nogi zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe położenie linek
- Umieścić wyposażenie wewnątrz stołu - jeżeli występuje (fot. 4)
- Zamknąć walizkę dwoma zewnętrznymi zamkami (14), uważając aby nie zatrasnąć linek.
- Postawić stół na stopkach do tego przeznaczonych lub umieścić walizkę w pokrowcu (16)

VII. Konserwacja i czyszczenie

- Eko - skóra, skaj. Czyścić łagodnym roztworem szarego mydła oraz letniej wody za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używać rozpuszczalników oraz detergentów.
- Elementy chromowane i lakierowane. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używać rozpuszczalników oraz środków ściernych.
- Drewno, sklejka. Czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie stosować żadnych środków chemicznych.

VIII. Dezynfekcja

Dezynfekować spirytusem lub ogólnie dostępnymi środkami dezynfekującymi

IX. Uwagi eksploatacyjne

- Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Zabrania się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
- Stół należy transportować w stanie złożonym z zamkniętymi zamkami.
- Zabrania się siadania, klękania i opierania na podgłówku (10) i podłokietnikach (8,9).
- Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.

X. Zalecenia

- Używać stół zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

ul. Śrutarska 20
43-400 Cieszyn
tel. +48 516 805 405

Instrukcja montażu kółek do torby transportowej



"A" kółka tylne

***"B" Kółka przednie
(skrętne)***



Kółka należy przykręcić śrubami dołączonymi do zestawu (16sztuk, po 4 śruby do jednego kółka) śrubokrętem krzyżakowym. Kółka tylne "A" (nie-skrętne) po stronie kieszeni na walek, kółka przednie "B" (skrętne) po stronie uchwytu do ciągnięcia. Kółka należy przykręcić zgodnie ze zdjęciem numer 2 zachowując conajmniej centymetr odstępu od brzegu deski.