



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

PODKŁAD NA MATERAC RIZO PVC+

REF

POM 02

„POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR OP-4901, WAŻNA DO 15.04.2020 R.”

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podkład na materac RIZO PVC+ w normalnych warunkach użytkowania przeznaczony jest do ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami powodującymi choroby, znajdującymi się w bezpośrednim środowisku chorego (materacu). Nieprzemakalna konstrukcja wyrobu zapobiega przedostawaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych, zanieczyszczeń stałych i płynnych z materaca do skóry pacjenta (podkład na materac stanowi ochronę dla pacjenta/użytkownika jako materiał barierowy).

SPOSÓB UŻYWANIA

Podkład na materac RIZO PVC+ należy położyć na wybranej lub całej powierzchni łóżka. Wyrób zalecany jest do stosowania podczas odpoczynku lub snu, u alergików i osób zdrowych.

Podkład jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użycia.

Wyrób użytkować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, zaleceniami i wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA WYROBU

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować wyrobu w bezpośrednim kontakcie ze skórą, w przypadku wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA

- Podkład na materac jest wyrobem osobistego użytku, przeznaczonym do wielokrotnego użycia. W celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych, wyrób nie może być używany przez inne osoby. W przypadku konieczności zastosowania wyrobu przez inne osoby, przed ponownym użyciem, należy przeprowadzić właściwą procedurę prania.
- Podkład na materac należy stosować zabezpieczony bawełnianym prześcieradłem. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.
- Nie stosować wyrobu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. W przypadku silnych zabrudzeń, niemożliwych do usunięcia lub uszkodzenia wyrobu należy wymienić go na nowy, pozbawiony wad.

- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować zmianę barwy poszycia, natomiast nie ma wpływu na właściwości wyrobu.
- Jednorazowo nie stosować wyrobu dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności dłuższego użycia, należy przewietrzyć wyrób.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów oraz nadmiernego kurzu i wilgoci.

Należy stosować następujące parametry procesu konserwacji:



Maksymalna temperatura prania 95°C, proces normalny.



Nie stosować bielenia.



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej, suszenie w normalnej temperaturze.



Nie prasować.



Nie czyścić chemicznie.

SKŁAD

Poszycie: 70% bawełna, 30% poliestr / 100% PVC

AMW NAWROT SP.J.



Numer i data wydania instrukcji: IU/AMW/WM/PV/Rew.1/06.2017