

# KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Podnózek toaletowy

## 1. Przeznaczenie produktu

Podnózek toaletowy służy do przyjęcia ergonomicznej, lekko kucznej pozycji podczas korzystania z toalety. Poprawia ustawienie ciała, ułatwia wypróżnianie oraz wspiera naturalną pracę układu pokarmowego. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem opiekuna.

## 2. Dane techniczne

- Materiał:** polipropylen (PP), tworzywo sztuczne odporne na wilgoć
- Kolor:** biały
- Wymiary:** 42 × 26.5 × 17 cm (±5%)
- Waga jednostkowa:** ok. 0,8 kg
- Wykończenie:** powierzchnia gładka, łatwo zmywalna
- Stabilizacja:** nóżki z warstwą antypoślizgową

## 3. Sposób użytkowania

- Ustawić podnózek centralnie przed muszlą klozetową na stabilnym, płaskim podłożu.
- Zająć miejsce na toalecie i postawić obie stopy na podnóżku.
- Nie zmieniać pozycji podnóżka w trakcie użytkowania.
- Po zakończeniu odsunąć podnózek w miejsce przechowywania.

## 4. Zalety użytkowe

- umożliwia przyjęcie pozycji wspomagającej naturalną perystaltykę jelit,
  - zmniejsza nacisk na odcinek lędźwiowy,
  - ułatwia dzieciom korzystanie z toalety,
  - nie wymaga montażu,
  - kompaktowy – łatwy do przechowywania.
- 

## 5. Zagrożenia i przeciwwskazania

- **Nie stosować jako stołka, drabinki ani podstawki do stania** – grozi upadkiem i urazem.
  - **Nie przekraczać maksymalnego obciążenia** ryzyko pęknięcia i obrażeń.
  - **Nie używać na nierównych lub śliskich powierzchniach** – możliwość przesunięcia i utraty równowagi.
  - **Nie dopuścić do samodzielnego użytkowania przez małe dzieci** – ryzyko przewrócenia lub potknięcia.
  - **Nie stosować w przypadku problemów ortopedycznych lub po operacjach** bez konsultacji z lekarzem.
  - **Brak stabilizacji przy niewłaściwym ustawieniu** może prowadzić do upadku z toalety.
- 

## 6. Czyszczenie i konserwacja

- czyścić wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem,
- nie stosować środków ściernych ani agresywnych chemikaliów,
- regularnie sprawdzać stan powierzchni antypoślizgowej.