



Poduszka elektryczna rozgrzewająca termofoor XL

Opis produktu

- Wysoka jakość materiałów**
Miękki polar (220 GSM) zapewnia nie tylko komfort, ale również trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Poduszka nadaje się do prania w pralce dzięki odłączanemu kontrolerowi.
- Indywidualne dopasowanie ciepła**
10 poziomów temperatury (od 30°C do 70°C) pozwala na precyzyjne dostosowanie poziomu ciepła, aby skutecznie złagodzić ból i napięcie mięśniowe.
- Bezpieczeństwo i wygoda**
Funkcja automatycznego wyłączania po 90 minutach oraz ochrona przed przegrzaniem zapewniają bezpieczne użytkowanie, nawet podczas snu.
- Długi kabel**
Długość przewodu 240 cm zapewnia swobodę ruchu i komfort użytkowania w różnych miejscach – na kanapie, w łóżku czy fotelu.
- Wszechstronność**
Idealna do stosowania na różnych partiach ciała – plecy, kark, brzuch czy nogi – przynosząc ulgę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Dane techniczne

Zakres temperatury	10 ustawień temperatury od 30°C do 70°C, z dokładnością +/-5°C
Rozmiar	30x60 cm
Materiał	Polar o gramaturze 220 GSM
Bezpieczeństwo	Automatyczne wyłączanie po 90 minutach, ochrona przed przegrzaniem
Długość przewodu	240 cm
Moc	75W
Pranie	Możliwość prania w pralce w temperaturze 30°C, odłączany kontroler
Waga	376g
Kod producenta	SHP-1029



Poduszka elektryczna rozgrzewająca termofoor XL

Instrukcja obsługi

Upewnij się, że wcześniej przeczytałeś i zrozumiałeś poniższe instrukcje poduszki grzewczej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem z poważnymi obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE!

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

Produkt przeznaczony dla ludzi.

OSTRZEŻENIE: To jest produkt elektryczny. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami.

1. Przeczytaj instrukcję przed użyciem tego produktu.
2. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Nie używać, jeśli są widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rozdarcia lub odsłonięte przewody i element grzejny).
4. Należy natychmiast wyłączyć poduszkę grzewczą i odłączyć ją od prądu w przypadku przegrzania lub odczuwania zwęglonego aromatu.
5. Ludzie z chorobami serca, osoby z rozrusznikiem serca i kobiety w ciąży powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
6. Nie stosować u osób nieprzytomnych i wrażliwych na ciepło.
7. Nie dokonuj żadnych modyfikacji przycisku przełączającego, przewodów i elementu grzejnego.
8. Nie stosować podczas snu; Podczas użytkowania nie należy umieszczać poduszki grzewczej pod materacem lub kołdrą.
9. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
10. Nie przekłuwaj ani nie używaj ostrych przedmiotów do mocowania poduszki grzewczej.
11. Nie używaj innego elektronicznego urządzenia grzewczego w połączeniu z poduszką grzewczą.
12. Nie chowaj poduszki grzewczej podczas jej używania.
13. Przykrywaj poduszkę grzewczą wyłącznie na ciele, nie siadaj i nie kładź się na poduszce grzewczej.
14. Podczas użytkowania nie przykrywaj poduszki grzewczej.
15. Nie stosować u dzieci.
16. Odłącz, gdy nie jest używana.
17. Nie używaj, gdy jest mokra.
18. Nie czyść chemicznie poduszki grzewczej. Rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho mogą uszkodzić przewody.
19. Nie używaj wybielaczy ani płynów czyszczących.
20. Nie używaj suszarki.
21. Nie prasuj poduszki grzewczej.
22. Nie używaj kulek na mole ani żadnego rodzaju sprayów.
23. Nie podłączaj ponownie produktu jeśli jest wilgotny.
24. Nie używaj kremu przeciwbólowego w połączeniu z poduszką rozgrzewającą.

Funkcje:

10 poziomów temperatury do regulacji (30°C/86°F do 70°C/158°F).

3 poziomy timer do regulacji (45/90/120 min.);

Funkcja automatycznego wyłączania.

Bardzo długi przewód o długości ok. 2 metrów: ułatwia korzystanie z niego w zaciszu łóżka lub ulubionego krzesła.

Można prać w pralce: wyłącz podkładkę grzewczą, odłącz podkładkę grzewczą od gniazdka ściennego.

Wymontuj sterownik i zasilacz. Podkładkę grzewczą można prać w pralce i przed ponownym złożeniem urządzenia należy ją wysuszyć. Nie używaj środków czyszczących ani chemicznych.

Przechowywanie: Wyłącz podkładkę rozgrzewającą, wykręć ją, a po wyczyszczeniu przechowuj podkładkę w suchym, bezpiecznym, czystym i chłodnym miejscu. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek konieczności serwisowania urządzenia. (Jeśli urządzenie zostanie wysłane bez oryginalnego opakowania, może nastąpić: uszkodzenie i unieważnienie gwarancji).



Poduszka elektryczna rozgrzewająca termofofor XL

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA PRZED OBSŁUGĄ

Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń transportowych.

Jeśli urządzenie nosi jakiegokolwiek ślady uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego obchodzenia się, należy natychmiast skontaktować się ze spedytorem i sprzedawcą.

Zawartość:

1 x poduszka grzewcza, 1 x instrukcja obsługi, 1 x kontroler z przewodem zasilającym

Galeria



Podmiot odpowiedzialny:

Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyń, Poland

NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274

e-mail: office@shopivo.eu

Marka: EVI | EUIPO: 018884444



BDO: 000582762 | WEEE: 48997845