

Plaster ekonomiczny

Plaster ekonomiczny do cięcia z opatrunkiem

- hipoalergiczny
- centralnie umieszczony opatrunek na folii perforowanej z klejem akrylowym
- warstwa zabezpieczająca
- nieprzywierający opatrunek
- elastyczny, łatwo dopasowujący się do kształtu ciała



INSTRUKCJA UŻYCIA: Dokładnie oczyścić ranę i osuszyć jej okolice. Wyjmij plaster z opakowania. Przytnij do potrzebnej wielkości. Usuń jeden z dwóch papierków ochronnych i naklej pierwszą połowę plastra, pod warunkiem, że gaza znajduje się pośrodku rany. Usuń drugi papierek ochronny i dokończ aplikację plastra. Ostrożnie dociśnij plaster. Poczekać kilka minut aż plaster idealnie będzie przylegał do skóry. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Natubay sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin