

Instrukcja obsługi

Ławka do wanny z oparciem

Kod produktu: BathTim



1. Wykonanie

Ławka do wanny z szerokim siedziskiem oraz oparciem jest wykonana z wytrzymałego PCV i posiada 10-cio stopniową regulację wysokości. Dodatkowy uchwyt boczny ułatwia korzystanie ze sprzętu, a specjalnie zaprojektowane gumowe przyssawki oraz nasadki antypoślizgowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach oraz zapewniają lepszą stabilizację podczas korzystania z ławki.

Zestaw zawiera:

oparcie PCV, siedzisko, nóżki zakończone przyssawkami – 2 szt.
nóżki z nasadkami antypoślizgowymi – 2 szt., rurki montażowe – 2 szt.,
rama oparcia bocznego.




2. Zastosowanie

Ławka do wanny z oparciem jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Ławka polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Siedzisko ławki należy położyć płasko na podłożu. Następnie zamontować nóżki w otworach montażowych do momentu zatrzaśnięcia pinów blokujących.


- Nóżki z przyssawkami powinny znaleźć się po tej samej stronie co uchwyt boczny (zdjęcie 1).

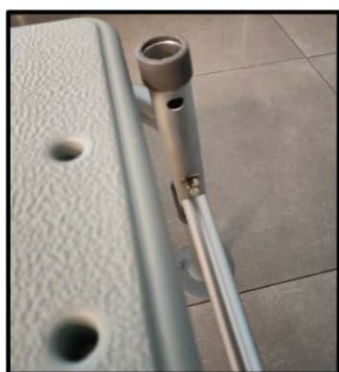

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

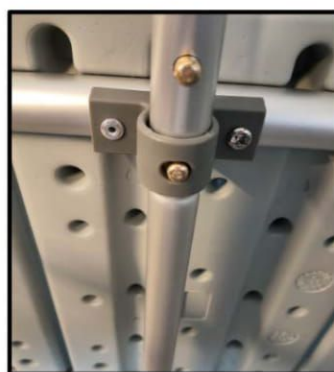

Zdjęcie 3

Krok 2. Zamontować rurki montażowe w otworach oparcia (zdjęcie 2). Pamiętaj aby oba piny blokujące znalazły się w otworach na oparciu. Odwróć ramę siedziska z nóżkami na bok. Następnie przelóż oparcie przez specjalne nakładki znajdujące się z tyłu siedziska do momentu zaskoczenia pinu blokującego (zdjęcie 3).

- Oparcie posiada dwustopniową regulację długości (zdjęcie 3). Aby wyregulować długość między oparciem i siedziskiem należy wcisnąć pin blokujący i dopasować długość do potrzeb użytkownika.

Krok 3. Postaw ławkę na nóżkach i zamontuj uchwyt boczny w odpowiednich otworach siedziska ławki (zdjęcie 1). Zablokuj uchwyt za pomocą pinów blokujących.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować wysokość ławki, należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie pinem. Nóżki regulowane są skokowo co 1 cm. Wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie wysokości.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary siedziska	67 x 41 cm
Regulowana wysokość	83-94 cm
Waga	4,70 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła. Po każdym użyciu wycierać do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników. (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej, pinów blokujących, rurek montażowych, oparcia oraz siedziska.




7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



4/2024 (I)