

Instrukcja Obsługi Jednorazowego Nakłuwacza do Poboru Krwi

[Nazwa produktu] Jednorazowy nakłuwacz do poboru krwi

[Model] Mięka

[Specyfikacja]

Nr zamówienia:	01-0121	01-0123	01-0126	01-0128	01-0130	01-0132	01-0133
Specyfikacja:	21G	23G	26G	28G	30G	32G	33G


[Przeznaczenie] Jednorazowy nakłuwacz do krwi jest używany z nakłuwaczem do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca lub innych miejsc do badania poziomu glukozy we krwi lub innych badań wykorzystujących małe ilości krwi.

Docelowa populacja pacjentów: Dorośli i dzieci starsze niż 2 lata.

Docelowy Użytkownik: Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez profesjonalistów i osoby prywatne.

Wskazania: Nadaje się do wykrywania cukrzycy lub glukozy we krwi i pobierania krwi włóścikowej.

[Instrukcje obsługi]

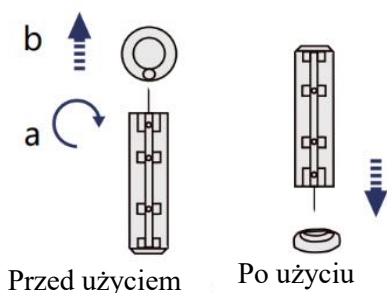

1. Wczytaj urządzenie do nakłuwania i odkręć osłonę ochronną.
2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia do nakłuwania.
3. Po użyciu, proszę usunąć używaną lancetę do odpowiedniego pojemnika.

Kompatybilny z urządzeniami do nakłuwania serii LDE, LDE3, LDE4 firmy SteriLance i większością innych urządzeń do nakłuwania.

[Przeciwwskazania] Nieznane.

[Ostrzeżenie]

- Nie używaj, jeśli chroniący kapelusz został wcześniej usunięty z lancety.
- Nie przechowuj lancety w urządzeniach do klucia po użyciu.

[Okres trwałości] 5 lat.

[Interpretacja symboliczna]



Sterylizowane
przy użyciu
promieniowania



Nie
powtarzaj
użycia




Numer partii



Data ważności



Producent

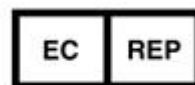

Upoważniony
Przedstawiciel
Europejski



Organ
Notyfikacyjny



Urządzenie
medyczne



Data produkcji

[Upoważniony Przedstawiciel Europejski]

Emergo Europe B.V.

Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

[Producent]

SteriLance Medical (Suzhou) Inc .

No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[Data aktualizacji] 19 czerwca 2023 r. (Wersja 02)