

INSTRUKCJA OBSŁUGI



STOLIK PRZYŁÓŻKOWY DIFFUSION

Nr kat. 421 ***

Zastosowanie: DIFFUSION przeznaczony jest jako wyposażenie dodatkowe do łóżek szpitalnych czy rehabilitacyjnych. Może być także stosowany w warunkach domowych jako pomoc dla osób leżących, o ograniczonej sprawności ruchowej, do podawania posiłków, czytania i innych czynności.

Budowa i funkcje: Stolik składa się z konstrukcji stalowej i laminowanego blatu (60 x 40cm lub 80 x 40 cm) z brzegiem PCV zapobiegającym zsuwaniu się umieszczonych na nim przedmiotów podczas użytkowania. Konstrukcja stolika umożliwia następujące ustawienia:

- wysokość: w zakresie od 61cm do 94cm – regulacja bezstopniowa za pomocą pokrętki blokującego, mechanizm teleskopowy;
- kąt pochylenia podstawy: 3 pozycje (pionowo 90°, 80°, oraz złożona) – regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem blokującym w wybranym otworze konstrukcji;
- kąt nachylenia blatu: 8 pozycji – regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem blokującym w wybranej pozycji.

Stolik DIFFUSION wyposażony jest w cztery kółka umożliwiające podjazd pod łóżko. Dwa z nich zaopatrzone są w hamulec. Minimalna przestrzeń pod łóżkiem dla swobodnego podjazdu to 10 cm od podłogi.

Utrzymanie czystości: Błat czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor. Konstrukcję metalową w razie potrzeby przetrzeć zwilżoną szmatką.

Gwarancja: Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych mogących wystąpić w normalnym użytkowaniu. Ważna z dowodem sprzedaży.

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01

INSTRUKCJA OBSŁUGI



STOLIK PRZYŁÓŻKOWY DIFFUSION

Nr kat. 421 ***

Zastosowanie: DIFFUSION przeznaczony jest jako wyposażenie dodatkowe do łóżek szpitalnych czy rehabilitacyjnych. Może być także stosowany w warunkach domowych jako pomoc dla osób leżących, o ograniczonej sprawności ruchowej, do podawania posiłków, czytania i innych czynności.

Budowa i funkcje: Stolik składa się z konstrukcji stalowej i laminowanego blatu (60 x 40cm lub 60 x 40 cm) z brzegiem PCV zapobiegającym zsuwaniu się umieszczonych na nim przedmiotów podczas użytkowania. Konstrukcja stolika umożliwia następujące ustawienia:

- wysokość: w zakresie od 61cm do 94cm – regulacja bezstopniowa za pomocą pokrętła blokującego, mechanizm teleskopowy;
- kąt pochylenia podstawy: 3 pozycje (pionowo 90°, 80°, oraz złożona) – regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem blokującym w wybranym otworze konstrukcji;
- kąt nachylenia blatu: 8 pozycji – regulacja za pomocą dźwigni z kołkiem blokującym w wybranej pozycji.

Stolik DIFFUSION wyposażony jest w cztery kółka umożliwiające podjazd pod łóżko. Dwa z nich zaopatrzone są w hamulec. Minimalna przestrzeń pod łóżkiem dla swobodnego podjazdu to 10 cm od podłogi.

Utrzymanie czystości: Blat czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor. Konstrukcję metalową w razie potrzeby przetrzeć zwilżoną szmatką.

Gwarancja: Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych mogących wystąpić w normalnym użytkowaniu. Ważna z dowodem sprzedaży.

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01