



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszki

~~Pomoc przeciwodleżynowa~~

PODUSZKA PROFILOWANA POD GŁOWĘ

Rozmiar poduszki

Długość w cm	
Szerokość w cm	
Wysokość w cm	

Numer kat. REF 136

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wskazania:

Poduszka profilowana utrzymuje kręgosłup szyjny w linii prostej. Dobrze dostosowuje się do ciała i równomiernie rozkłada nacisk głowy na poduszkę, dzięki czemu w znacznym stopniu zmniejsza się nacisk na połączenia kręgow szyjnych i na napięcie mięśni przy różnych ułożeniach ciała podczas snu. Poduszka zwiększa komfort snu, zapobiega bólowi szyi, ramion, zmniejsza też dolegliwości związane z bólem całego kręgosłupa. Wykonana z pianki poliuretanowej.

Przeciwwskazania:

Osoba z gorsetem szyjnym po nagłych i ciężkich wypadkach.

Sposób czyszczenia i konserwacji:

- Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego, prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać.
- W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia a tym samym zniszczenie pokrowca.
- Nie prać chemicznie, nie chlorować.
- Często wietrzyć w słoneczne dni.
- Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeżeli występują działania niepożądane np. alergia, ból – skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Wyrób medyczny nie zawiera tkanki pochodzenia zwierzęcego.

Warunki reklamacji:

Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia,
- wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji,
- uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia),
- odbarwienia pokrowca,
- wygoda i komfort użytkowania.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.



Data produkcji:

LOT

