



STERYLIZATOR

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

CHARAKTERYSTYKA

- Automatyczna temperatura: 125°C
- Zbiornik ze stali nierdzewnej

METODA PRACY

Sterylizacja narzędzi wysoką temperaturą.

KORZYSTANIE

1. Umieść produkt na stabilnym stole klinicznym.
2. Podłącz zasilanie, a następnie włącz przełącznik, lampka grzania zaświeci się na czerwono, a urządzenie zacznie się nagrzewać.
3. Po 10-12 minutach nagrzewania, gdy lampka zgaśnie, włóż narzędzia wymagające dezynfekcji (takie jak nożyczki, maszynki do golenia itp.).
4. Ustaw czas sterylizacji za pomocą pokrętki timera.
5. Podgrzej narzędzia w aluminiowym zbiorniku, następnie załóż rękawice adiabatyne i wyjmij wysterylizowane narzędzia.
6. Gdy temperatura zbiornika osiągnie 125 C, lampka grzewcza zgaśnie automatycznie, a produkt przestanie się nagrzewać. Produkt będzie automatycznie podgrzewany, gdy temperatura będzie niższa, kontrolka podgrzewania ponownie zaświeci się na czerwono.

Ważne!

Sterylizacja odbywa się przy użyciu gorącego suchego powietrza. Konieczne jest stosowanie specjalnych pakietów/torebek przeznaczonych do tego rodzaju sterylizacji. Używanie zwykłych torebek do autoklawu jest surowo zabronione!

KONSERWACJA PRODUKTÓW

1. Produkt należy regularnie czyścić wacikiem nasączonym alkoholem, nigdy nie należy używać przemysłowych rozpuszczalników ani papieru ściernego.
2. Produkt należy zawsze umieszczać w suchym miejscu.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, należy zwrócić się do profesjonalistów w celu sprawdzenia i naprawy produktu.

UWAGI

1. Nie należy podłączać urządzenia przed upewnieniem się, że napięcie produktu i źródła zasilania są zgodne.
2. Upewnij się, że źródło zasilania jest dobrze uziemione.
3. Umieść produkt na stabilnym stole medycznym.
4. Nie pozwalaj dzieciom na dotykanie produktu podczas pracy.
5. Nie dotykać kadłuba gołymi rękami, aby uniknąć poparzeń.
6. Po dezynfekcji należy wyłączyć zasilanie i założyć rękawice przed wyjęciem narzędzi.
7. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zasilanie. Należy pamiętać o odłączeniu zasilania, jeśli produkt nie będzie używany przez krótki czas.
8. Czyszczenie należy wykonać po odłączeniu produktu od zasilania i ostygnięciu.
9. Produkt nie może być bezpośrednio polewany wodą ani innymi płynami.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Godziny pracy:

- Pon – czw: 7-15
- Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

