

INSTRUKCJA OBSŁUGI – SMART OTOSKOP Z KAMERĄ HD I WIFI

1. Zawartość zestawu:

- 1x otoskop z kamerą HD
- 4x wymienne końcówki
- 1x kabel USB do ładowania
- 1x zestaw akcesoriów do czyszczenia

2. Specyfikacja techniczna:

- Kolor: Czarny
- Zasilanie: Akumulatorowe, 240 mAh
- Czas ładowania: ok. 1 godzina
- Kamera: 3,9 mm, 1920p, kąt widzenia 83°
- Oświetlenie: 6 diod LED
- Komunikacja: Wi-Fi 2.4 GHz
- Kompatybilność: Android / iOS
- Format wideo: MP4 / AVI
- Ogniskowa: 1,5–2 cm

3. Przygotowanie do pracy:

1. Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Pobierz aplikację "Soulear" ze Sklepu Play lub AppStore.
3. Włącz otoskop – przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund.
4. Na telefonie/tablecie połącz się z siecią Wi-Fi otoskopu.
5. Otwórz aplikację i wybierz "Connect Device".
6. Po połączeniu możesz rozpocząć transmisję obrazu na żywo.

4. Użytkowanie:

- Delikatnie wprowadź końcówkę otoskopu do ucha.
- Obserwuj obraz na ekranie w czasie rzeczywistym.
- Możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą aplikacji.
- Nie używaj siły – operuj powoli i ostrożnie.
- Po zakończeniu użycia wyczyść końcówkę.

5. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść końcówki po każdym użyciu miękką szmatką lub wodą z mydłem.
- Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

6. Wskazówki bezpieczeństwa:

- Nie używaj na uszkodzonym uchu.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie kieruj światła LED bezpośrednio w oczy.
- Nie używaj dłużej niż 5 minut na jedno ucho.

Dziękujemy za wybór naszego produktu – dbaj o zdrowie swoich uszu bezpiecznie i nowocześnie!