



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**AR-228-2S Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny.  
IMMOBILO HERNIA-2**

**Właściwości wyrobu:** Pas wykonany z innowacyjnych materiałów. Materiał pokrywający peloty (od strony wewnętrznej), miękki, delikatny i oddychający. Umożliwiający odprowadzanie ciepła, ze wzmocnioną siłą odprowadzania wilgoci. Dopinane pachwinowe taśmy z Velcro - wąskie, z zaokrąglonymi krawędziami dla zwiększenia komfortu użytkowania. Pas główny niezwykle wytrzymały, od dużej kompresji, utrzymujący wyrób na właściwej pozycji. Peloty odpowiednio wyprofilowane, specjalny kształt zapewnia dopasowanie do anatomicznej budowy ciała i odpowiednie właściwości terapeutyczne. Wykorzystanie nowoczesnego systemu zapinania gwarantuje idealne przyleganie zapewniając przy tym komfort oraz solidną stabilizację.

**Zastosowanie:** Pas przepuklinowy, pachwinowy stosowany jest w celu podtrzymania niewielkich przepuklin u pacjentów, którzy nie mogą być operowani. Stanowi zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych. Szczególnie polecany w przypadku przepuklin pachwinowych obustronnych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Idealny przy wspomaganiu procesu leczenia i rehabilitacji niewielkich przepuklin pachwinowych oraz profilaktycznie przeciw nawrotom w przypadku słabego aparatu mięśniowo - więzadłowego prawostronnego lub lewostronnego.

**⚠ Przeciwwskazania:** Nie należy stosować w przypadku otwartych ran, zmian skórnych tj. otarcia, odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skóry. Nie wolno stosować w przypadku otwartych ran. Nie stosować pasa po uprzednim zastosowaniu maści lub żeli rozgrzewających. Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej lub uwięzionej, ponieważ może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita i opóźniać konieczność pilnego leczenia operacyjnego. Okres stosowania należy skonsultować z lekarzem specjalistą. Nie stosować w przypadku indywidualnych przeciwwskazań określonych przez lekarza lub specjalistę. Przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem specjalistą, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

**⚠ Ostrzeżenie:** Jeżeli użytkownik ma lub miał jakiegokolwiek przeciwwskazania użytkowania wyrobu, wynikające z jego wcześniejszych kontuzji/aktywności powinien przed zastosowaniem niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.

**Instrukcja użytkowania:** Aby założyć pas w pierwszej kolejności należy rozpiąć rzepy. Pas główny należy zapiąć na wysokości bioder. Do taśmy głównej przypiąć kolejno taśmy pachwinowe – najpierw z przodu, dociskając odpowiednio odprowadzoną przepuklinę pachwinową, a następnie, prowadząc wzdłuż wewnętrznej części uda, zapiąć taśmy z tyłu. Należy pamiętać aby pas był zapięty z siłą zapewniającą skuteczną stabilizację ale jednocześnie nie powodował bólu. W szczególnych przypadkach osoby z osłabioną siłą mięśniową oraz obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osób trzecich. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Czas stosowania pasa winien być określony przez lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeutę.

**Sposób konserwacji:** Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Rozmiary:** (mierzyć obwód wokół bioder)

S: 70-79cm, M: 80-90cm, L: 91-102cm, XL: 103-115cm, XXL: 116 – 130cm,

**Skład:** 40% Nylon, 30% Poliester, 20% Spandex, 10% Pianka EVA

**Utylizacja:** Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:** W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

**Incydenty:** Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

## KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska, udziela niniejszym **12-miesięcznej** gwarancji na produkt ortopedyczny.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieoptymalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu.
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należytym stanie higienicznym (czyste).
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (uszkodzeń na skutek przecięcia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu), zetknięcia produktu z substancjami tłustymi, olejnymi lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji opisanym w instrukcji produktu, w punkcie „Sposób konserwacji”. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi klient reklamujący towar.

Numer LOT:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis.

## SYMBOLE:



Wyrób medyczny

Zapoznaj się z instrukcją

Producent Wyrób spełnia wymagania UE

Ostrzeżenie

Nr dato / serii

Data produkcji m-c/rok

Nadaje się do recyklingu

Selektywna zbiórka odpadów

Wydanie 1 z dnia 10.04.2024r.



**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

